

有効成分：加速化過酸化水素：AHP

2024年版

アクセルプリベンション シリーズ



日本



カナダ 特許取得

Oral Studio

PREvention[™]

医療施設の環境整備
に最適な洗浄・除菌
をワンストップ

▶ シンプルで 効果的・経済的

唾液 血液の飛沫やエアロゾルで汚染された
ユニット・レントゲン、床、ドアノブ※1

拭くだけで

【洗浄】 【除菌】 が完了
環境負荷/人体へ影響はゼロ
もちろん 低コスト※2

▶ ユニットを拭いた直後に 実感して頂けます

■ 加速化過酸化水素（AHP）とは？ アクセルプリベンションの安全性や特徴は？

加速化過酸化水素（AHP）はVIROX社（カナダ）の特許技術により開発された成分。従来の過酸化水素の弱点であった除菌スピードを加速的に高め、かつ界面活性剤を配合することにより洗剤レベルの洗浄力を発揮します。これにより、洗浄と除菌を同時に行えるため、医療機関の環境整備に最適な有効成分として利用されています。

「医療施設における消毒と滅菌のためのCDCガイドライン（2008）」や「手術医療の実践ガイドライン（改訂版）」等、様々なガイドラインでAHPの有効性が示されています。

AHPを有効成分とするアクセルプリベンションは、環境や人体への安全性も認められ、アメリカ環境保護局（EPA）の厳格な環境基準認証であるECO LOGOも取得。2018年には、NASAがアクセルプリベンションの洗浄除菌力と環境・人体への安全性を認定し、国際宇宙ステーションの除菌洗剤として採用を承認しました。

一般細菌, エンベロープウイルス,
ノンエンベロープウイルスまで対応

消毒と同時に洗浄
汚染を残留させない洗浄力

細菌	30秒
ウイルス	3分（RTU）

アクセルプリベンション	洗剤レベル
エタノール・塩素系製品には洗浄力なし	

■ エタノールや次亜塩素酸による清拭では不十分

医療機関ではスタンダードプリコーション※3に則り、環境表面の【感染源の除去＝洗浄】と【感染経路の遮断＝除菌】を行う必要がありますが、エタノールや次亜塩素酸による清拭では病原体を洗浄・除去できず、更に消毒効果も不十分（ノンエンベロープウイルスに対応できない）であると報告※4されています。

エタノール・次亜塩素酸による清拭：不十分
アクセルプリベンションによる清拭：洗浄と除菌が同時にOK

■ ラインナップ

1 希釈不要 	4L 希釈用 C. 	清拭用ワイブ 
1L そのまま使える 保存：24ヵ月 2,970円（ガン付）	32~128倍希釈用 3.8L 保存：24ヵ月 （希釈後1ヵ月） 17,600円（ポンプ付）	160枚 約15cm角のワイブ 保存：24ヵ月 4,180円

■ 運用方法

- 1：RTU（Ready to Use）をまず使用
- 2：RTUがなくなったら、濃縮タイプ32cc（1プッシュ7cc吐出）を水道水1Lで希釈し、RTU容器で使用

■ ワンポイント

- ・濃縮タイプで作成すると120円/Lで経済的
 - ・希釈作成した後、30日間安定的に使用可能
- 参考：次亜塩素酸は24時間で効果が減弱

※3 全ての患者由来の全ての湿生体物質は感染性があるものとして取り扱う概念、※4 2009年 日本環境感染学会「ATPふき取り検査を用いた歯科診療室環境における清浄度調査」によると、歯科で多用されるエタノール清拭のみによる感染予防対策では「医療機関レベルの清浄度」が達成できず、高レベルの汚染残留が認められると報告されている

■ アクセルプリベンションの使い方【適切な感染対策のために】

1 塗布

マイクロファイバークロスに噴霧し、対象物を清拭

2 放置

3分程度放置（RTUの場合）

3 拭上げ

マイクロファイバークロスで拭上げて終了



ワンポイント

- ・マイクロファイバークロスを使用することで、汚染回収率が向上します
- ・拭上げ後も、表面の微細な凹凸内で有効成分が働き、消毒効果は持続します
- ・タンパク汚れと有効成分が反応し発泡しますが、効果に問題はありません

PREvention™		高頻度 接触面	医療機器	床	血液・体液で汚 染されたエリア	水回り
製品	使用方法	テーブル・キャビネット・椅子・ドアノブ・キーボード・受付待合・手指接触エリアなど	ユニットやレントゲン・医療機器外装表面・タッチパネル・電源コードなど	診療室や技工室の床 レントゲン室の床 水回りの床	ユニット周囲の床	トイレ・シンク周り
濃縮	32倍希釈	○	○		○	○
	128倍希釈			○		
RTU	原液使用	○	○		○	○
ワイプ	ワイプ	○	○		○	○



注意：アクセルプリベンションは手指消毒等、人体の洗浄・除菌にはご使用頂けません



洗浄・消毒これひとつ

残留性及腐蝕性なし
どこにでも安全に使用可

■ 世界での評価

- 2003 SARSへの有効性が承認（カナダ）
- 2007 ノロウイルスへの有効性が承認（英国）
- 2008 CDCガイドライン2008に効果が収載
- 2008 SARSへの有効性が承認（アメリカ）
- 2013 手術医療ガイドラインに収載（日本）
- 2018 国際宇宙ステーションに採用（アメリカ）
- 2020 透析施設のガイドラインに収載（日本）
- 2020 COVID-19への有効性が承認（日本）
- 2020 COVID-19への有効性が承認（カナダ）

他多数

ネットショップは送料がお得

ショップURL <https://oralstudio.thebase.in/categories/4550418>



ショップQR

FAX ご注文

貴施設名			担当者様	
送付先〒 ご住所				
電話		メール		

商品名	価格税込	数
■ アクセルプリベンションRTU（1L） スプレーガン付	¥2,970	
■ アクセルプリベンション ワイプ（160枚）	¥4,180	
■ アクセルプリベンション 濃縮タイプ（3.8L） ポンプ付（7cc吐出）	¥17,600	
■ 初回キット アクセルプリベンションRTU スプレーガン付×1 アクセルプリベンションワイプ×1 アクセルプリベンション濃縮タイプ ポンプ付×1 40cm角 マイクロファイバークロス 青×5	¥27,918	
■ マイクロファイバークロス5枚組 40cm角 マイクロファイバークロス 医療機関向けの高耐久性です（400回洗濯可） 単色5枚組、ご希望の色とセット数をご記入ください。 青（ 組） 緑（ 組） 桃（ 組） 黄（ 組） 白（ 組）	¥ 3,168 1組 単色5枚 セット の価格	

FAX注文：送料一律 1,100円、ネットショップ注文：11000円（税込）以下の場合のみ送料550円

FAX注文の場合、ご請求書をご注文翌月に株式会社デンタルアローより送付いたします

FAX 011-787-0034

株式会社デンタルアロー