

# ホワイト色登場。 矯正用に特化した、ニュープラストーンII

矯正用硬石こうとして  
際立つ白さ

- 滑沢な模型面
- ソーピング作業がしやすい
- クリーミーな練和感
- 分割やトリミングがしやすい

NEW

矯正用に特化したホワイト色の硬石こう

ニュープラストーンII ホワイト  
ニュープラストーンII ホワイト ファスト



# 矯正用模型に特化したホワイトタイプ


ニュープラストーンⅡ ホワイトは、ジーシーとしては初めて矯正用に特化した硬石こうで、普通石こうと比較しても遜色のないホワイト色です。もちろん、通常の硬石こうとしてもご使用いただけます。




## ▶ 滑沢な模型面

各印象材に対する表面粗さが従来品と比べ小さく、印象面がより滑沢になりました。

### ■ 各印象材に対する表面粗さ

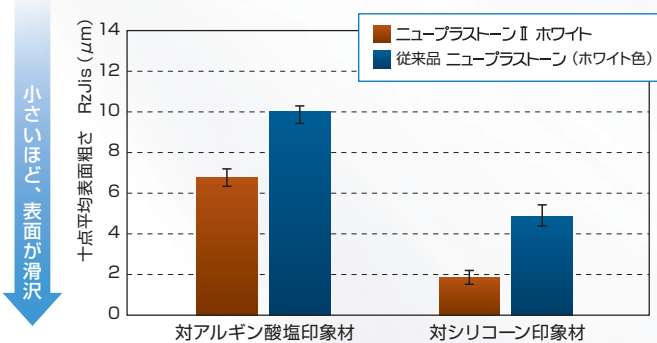

### ■ 硬化後の石こう表面

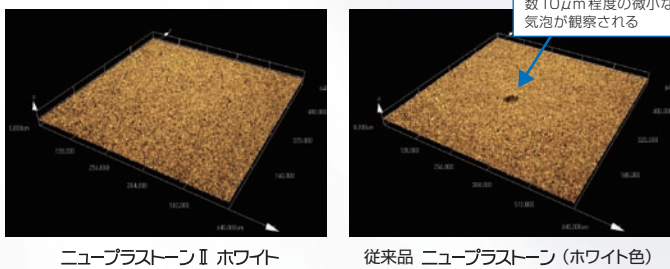


## ▶ ソーピング作業がしやすい

良好な面性状のため、ソーピング作業が行いやすく、短時間で均一に光沢のある模型に仕上げることができます。また、ソーピング後の模型の変色が少なく、長期の保存性にすぐれています。



## ▶ クリーミーな練和感

ニュープラストーンⅡ ホワイト

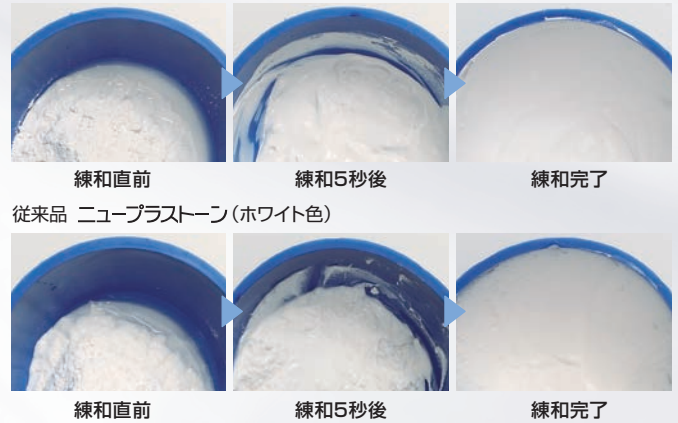

## ▶ 分割やトリミングがしやすい

1時間後の圧縮強度を従来品の49MPaから44MPaに下げること、分割やトリミングの作業がしやすくなりました。




	ニュープラストーンⅡ ホワイト	従来品 ニュープラストーン (ホワイト色)
湿水比 (W/P)	0.23	0.24
硬化時間 (min)	11	11
硬化膨張率 (%)	0.25	0.25
圧縮強度 (MPa) [1hr後]	44.0	49.0

・試験方法: JIS T 6605による

## ニュープラストーンⅡ 共用計量器について

水の計量器は「ニュープラストーンⅡ/LE/HE」と共用になりますが、「ニュープラストーンⅡ ホワイト」(ファスト含む)は粉計量器で採取できる量(重さ)が少ないため、水の量も少なくなりますのでご注意ください。「ニュープラストーンⅡ共用計量器」(粉、水)をご希望の方は、お取引先のディーラーまたは弊社支店・営業所にお申し出ください。

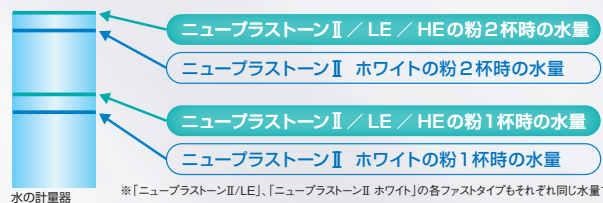

※「ニュープラストーンⅡ/LE/HE」、「ニュープラストーンⅡ ホワイト」の各ファストタイプもそれぞれ同じ水量です。

ジーシー ニュープラストーンⅡ ホワイト 一般医療機器 13B1X00155000211  
 ジーシー ニュープラストーンⅡ ホワイト ファスト 一般医療機器 13B1X00155000212

※「ニュープラストーンⅡ ホワイト」は練和時にラバーボール等が白く着色することがありますので、その場合は中性洗剤等でよく洗浄してください。  
 ※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
 ※掲載の価格とジーシー研究所測定の実測データは、2010年11月現在のものです。  
 ※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、包装に記載の注意事項をお読みください。

製造販売元 株式会社 ジーシー / 製造元 ジーシーアメリカ  
 東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC (デンタルインフォメーションセンター)  
 お客様窓口 ☎0120-416480  
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)  
<http://www.gcdental.co.jp>

支店  
 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333  
 営業所  
 ●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722  
 ●東北 (022)283-1751 ●九州 (092)441-1286