

GC

咬合接触検査材


ブルーシリコンで採得したバイトを撮影し、咬合接触部位の厚みに応じて色分け表示。



咬合接触面積と接触点数を数値とグラフで表示、全体と左右のバランスを客観的に把握。



咬合接触状態の変化などを比較して把握でき、患者さんにも、わかりやすく説明。

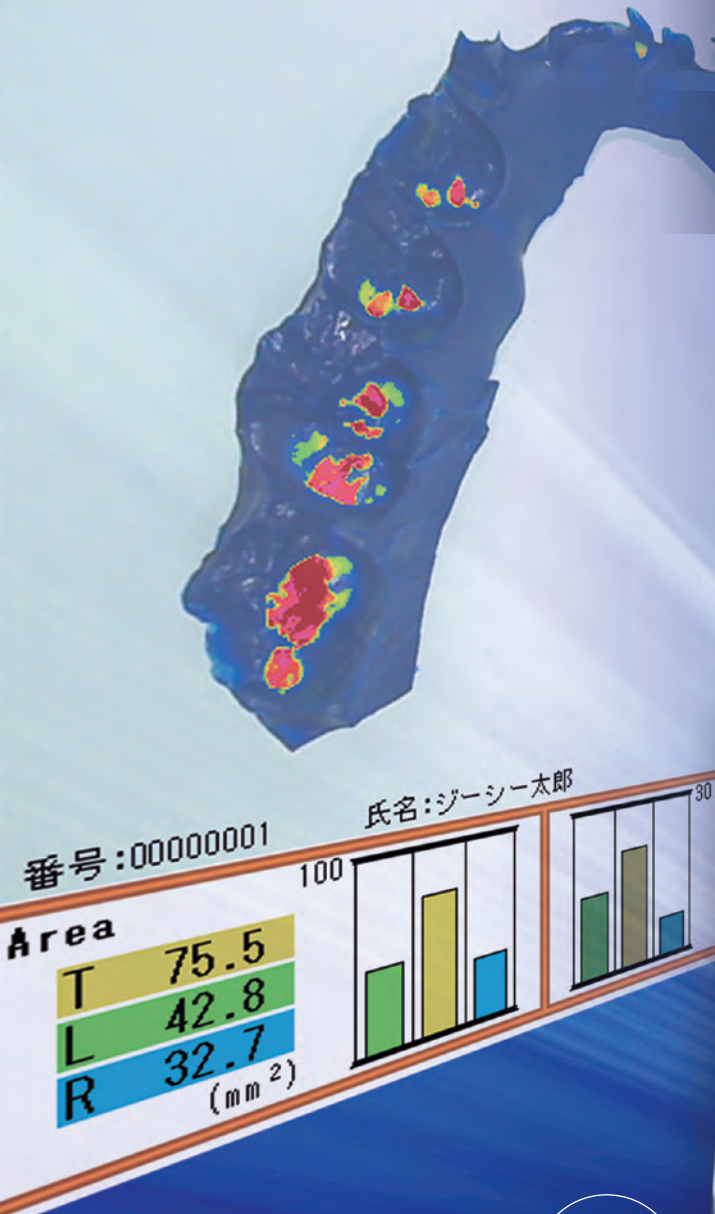

NEW

歯接触分析装置


ジーシー バイトアイ BE-I

咬合接触検査材 ジーシー ブルーシリコン専用

BITEEYE BE-I

シンプル操作とスピーディな解析で 咬合接触状態の可視化を実現。

- 咬合接触検査材「ブルーシリコン」で採得したバイトを、撮影から色調差による解析までワンタッチで簡易操作。
- 咬合接触面積と接触点数を数値とグラフで表示。約200 μ mまでの厚みに対して14段階で色表示。
- 撮影したバイト画像は保存でき、咬合接触状態の違いの把握や変化などの経過観察にも有効。

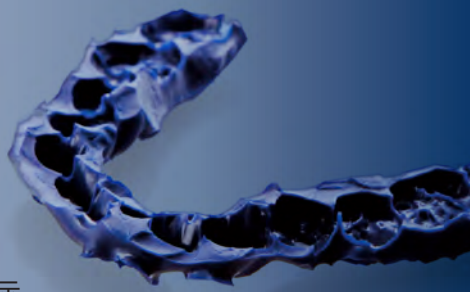

ジーシー ブルーシリコン専用
「ブルーシリコン」は、咬合接触状態を透明性のあるブルー色の濃淡で確認する咬合接触検査材です。

STEP 1 採得したバイトをガイドに合わせてセット

画面はタッチパネルでスマート操作

STEP 2 撮影

約200 μ mまでの厚みに対して観察したい厚みの可視化レベルを設定し、咬合接触部位を色分けして表示、観察することができます。

クラス	厚み(μ m)	色
Class1	180~200	赤
Class2	150~179	赤
Class3	130~149	赤
Class4	110~129	赤
Class5	90~109	赤
Class6	70~89	赤
Class7	60~69	赤
Class8	50~59	赤
Class9	40~49	赤
Class10	30~39	赤
Class11	20~29	赤
Class12	10~19	赤
Class13	5~9	赤
Class14	0~4	赤
Class15	—	赤

STEP 3 データ解析・画面表示

咬合接触面積を数値とグラフで表示

Area	Value
T	75.5
L	42.8
R	32.7

(mm²)

咬合接触点数を数値とグラフで表示

Point	Value
T	22
L	15
R	7

(Numbers)

RANK C

多彩な解析機能でより詳しく咬合接触状態を把握できます。

解析データを4つまで同時表示

部位を限定して解析

拡大して表示

機能 4画面表示、一部領域指定解析、拡大表示、左右領域指定解析、咬合接触点追加、ノイズ除去、可視化レベルの設定、咬合接触面積表示、咬合接触面積データ出力、表示画面出力、解析データエクスポート/インポート

歯接触分析装置

ジーシー バイトアイ BE-I

包装●一式(ジーシー バイトアイ BE-I 本体、ARシート1枚、パネル保護シート1枚、バイトアイ for PCインストールCD 1枚)

一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000217

■仕様
寸法: 幅280mm×奥行232.7mm×高さ343mm、重量: 9.9kg、電源電圧: AC100V 50/60Hz、電源入力: 65VA、カメラ: 200万画素、内蔵PCポートOS: Windows 7 Home Premium、CPU: インテルAtom プロセッサ、メインメモリ: 1GB、液晶モニター画面サイズ: 10.4インチ、モニタ解像度: SVGA (V800xH600)、4線式抵抗膜方式タッチパネル(シングルタッチ)、ハードディスク: 160GB、USBポート: 3個

■バイトアイ for PC動作環境
OS: Windows XP/Windows Vista/Windows 7(各OS 32/64Bit版)、プログラム: Microsoft .Net Framework 2.0以上必須、CPU: 1.6GHz以上のIntel系、メモリー: 1GB以上、ディスプレイ: 128MB以上のVRAM、表示解像度: 800x600以上、USBポート、CD-ROMドライブ: 必須

※上記動作環境を満たしていても、全てのコンピュータでの動作を保証するものではありません。
※ドライバーが十分な機器には接続することができません。
※.Net Framework 2.0は、Windows XP/XP SP1/XP SP2で自動更新を行っていないコンピュータにインストールされていない場合があります。
※.Net Frameworkは<Microsoft公式サイト>より無償でダウンロードすることができます。各OSに適したバージョンを入手してインストールを行ってください。

適合試験材、咬合接触検査材

ジーシー ブルーシリコン

包装●1函: カートリッジ56g(48mL)2本、ミキシングチップ II S(ピンク)6本

一般医療機器 23B2X00038000042

※掲載の参考データは、2011年5月現在のものです。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※カタログ中のソフトウェア画面写真は、ハメ込み合成のため実際とは若干異なります。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
 東京都文京区本郷 3-2-14 東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC(デンタルインフォメーションセンター) 支店
 お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く) 営業所
 http://www.gcdental.co.jp ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
 ●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286