

PRATICA

ジーシー プラティカ **【歯科用】**

ディスポーザブル口腔ケアスポンジ &
口腔用ジェル
オーラルアクアジェル PC

『G.C.』

ジェルを多用する
訪問診療先でも
十分な大容量



**訪問診療や介護施設などで
高齢者の口腔ケアを
サポートします。**

PRATICA (プラティカ) とは？

PRATICA (プラティカ) は、Practice (英)【プラクティス】と同意のイタリア語で、実践・習慣などの意味があります。ジーシーでは、同ブランド名で「専門家による口腔ケアを必要とされている方々、また高齢者の方々の口腔ケアの実践・習慣化、口腔健康の維持・向上」を目指した製品を展開して参ります。

衛生的な
1本ずつの個別包装



口腔内の汚れを取り除く ディスポーザブル口腔ケアスポンジ

特 長

- 汚れを効果的にからめ取りやすいスポンジ形状
- 出血が分かりやすいスポンジ色調
- 強度があり、柔軟性のある軸
- 軸が長いので、口腔内のすみずみまで清掃可能
- 衛生的なディスポーザブル仕様



ジーシー プラティカ
ディスポーザブル
口腔ケアスポンジ

種類●2種=S、M
包装●1函:50本入

サイズは2種類。口腔の状況に合わせて選択できます。

S

口が開けにくい方・粘膜出血傾向のある方に

※ほぼ実寸大です



M

口がしっかり開けられる方



全長150mm、柄130mm
口腔内のすみずみまで
清掃できる長い軸

口腔用ジェル

オーラルアクアジェルPC

(PC=Professional Care)

乾いてこびり付いた口腔内の
汚れを除去しやすくする

たっぷり**120g!**

特長

- ジェルを多用する訪問診療先でも十分な大容量(120g)
- 口腔内のうるおい浄化を助ける
- pHはほぼ中性(pH7.1)のため、長時間の使用でもむし歯のリスクの心配がない




化粧品
ジーシー プラティカ
オーラルアクアジェルPC

包装●1 函: 120g1 本
製造販売元 株式会社ジーシー


口腔ケアスポンジ&オーラルアクアジェルPC 使用法




1 スポンジ部に少量の水分を含ませて必ずしっかり絞る

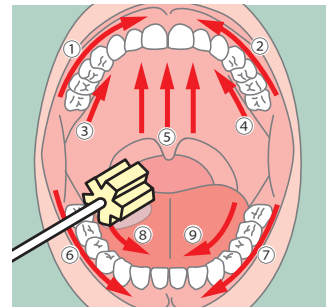

2 スポンジ部にオーラルアクアジェルを取り、口腔内全体に行き渡るように塗布し、数分間待つ

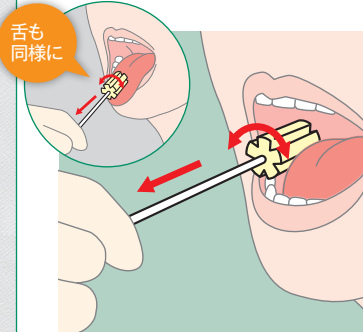

3 奥から手前にこすったり、回転したりして、汚れをからめ取るように口腔内を清掃する

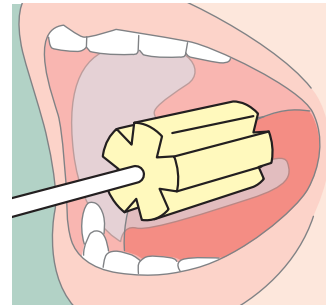

4 スポンジ部を洗い保湿のためもう一度オーラルアクアジェルを塗布する

※ご使用に際しましては、必ず口腔ケアスポンジの説明書もお読みください。

関連製品

ジーシー プラティカ ディスポーザブル 口腔ケアブラシ

色調●1 色=ホワイト
包装●1 函: 100 本入



義歯洗浄には

義歯ブラシ

ジーシー プラティカ デンチャーブラシ

色調●1 色=ホワイト
包装●1 函: 12 本入



入れ歯洗浄剤

ポリデント® フレッシュクレンズ

色調●1 色=ホワイト
包装●1 本: 125mL



※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の実測データは、2013年2月現在のものです。

ご使用に際しましては、必ず使用上の
注意事項をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3-2-14

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎ **0120-416480**
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支 店
●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東 北 (022)207-3370 ●九 州 (092)441-1286