

# ruscello®

PROFESSIONAL CARE SERIES  
プロフェッショナル ケア シリーズ

今までにない新しい選択。  
プロフェッショナル『ruscello』。



院内指導用ハンドル  
ルシェロ 院内指導用ハンドル **未滅菌**  
(オートクレーブ可)  
材質●ポリフェニルサルホン (PPSU)  
※本製品には替ブラシは付属しておりません。



歯間ブラシ  
ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ (医院用)  
種類●7種 (4S, SSS, SS, S, M, L, LL)



ペリオブラシ  
ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ NO.1T (医院用)  
毛のかたさ●やわらかめ



薬用ジェル  
ルシェロ ポイントケアジェル **医薬部外品** <薬用ハミガキ>  
[販売名] ジーシー薬用ポイントケアジェル  
成分●[溶剤] 精製水、エタノール [湿潤剤] 濃グリセリン、プロピレングリコール [薬用成分] 乳酸アルミニウム、ポリリン酸ナトリウム、フッ化ナトリウム (フッ素)、塩化セシルピリジニウム、β-グリチルレチン酸 [pH調整剤] クエン酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、クエン酸 [粘結剤] キサンタンガム、カラギーナン [可溶剤] ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 [香味剤] 香料 (クラリセージタイプ) [清涼剤] l-メントール [防腐剤] パラベン [着色剤] 黄色4号、青色1号  
フレーバー●ハーブミント  
内容量●30g  
包装・希望患者価格●1本=¥680 (税込)

製造販売元  
日本ゼトック株式会社  
東京都千代田区九段南2丁目3番26号

## 替ブラシ交換が簡単な着脱ケース

**着脱ケース**

必要に応じて各ブラシを着脱ケースにセットし、ふたを閉めます。

**ヘッドの付け方**

押しながら **カチッ**

ハンドルの向きを確認し、ケースをしっかりと押さえながら、**カチッ**と鳴るまでハンドルを差し込みます。

白いライン (凸部) が隠れるまで確実に!

**ヘッドの外し方**

替ブラシ部分の空いているスペースに上からセットし、ふたを開め、ハンドルを引き抜きます。

※着脱ケースはオートクレーブ滅菌することはできません。使用後は十分に洗浄し、過酢酸やグルタルアル等で薬液消毒を行ってください。

## 患者さん用としておすすめください



ルシェロ 歯間ブラシ (ハンドル付)

【包装・価格】  
ハンドル……………1本  
替ブラシ……………4個  
(1個はハンドルにセット済)  
キャップ……………1個  
着脱ケース……………1個  
種類●7種 (4S, SSS, SS, S, M, L, LL)  
希望患者価格●1袋=各¥500 (税込)

ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ (4個入)

【包装・価格】  
替ブラシ……………4個  
キャップ……………1個  
着脱ケース……………1個  
種類●7種 (4S, SSS, SS, S, M, L, LL)  
希望患者価格●1袋=各¥260 (税込)



※写真はSSS

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※掲載のジーシー研究所測定参考データは、2013年10月現在のものです。

発売元 **株式会社 ジーシー**  
東京都文京区本郷3-2-14

DIC (デンタルインフォメーションセンター)  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)  
<http://www.gcdental.co.jp>

支店  
●東京 (03) 3813-5751 ●大阪 (06) 4790-7333  
営業所  
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722  
●東北 (022) 207-3370 ●九州 (092) 441-1286

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

目的に合わせて選び、歯や歯肉をやさしくケア。

プロフェッショナルケアに効果的な機能性と操作性を備えた、

今までにないプロフェッショナルのための「ruscello」新登場!

## 滅菌対応で衛生的に繰り返し使用できる ルシェロ 院内指導用ハンドル

(オートクレーブ可)

オートクレーブ滅菌対応の繰り返し使用可能なハンドル。ルシェロ歯間ブラシ、ルシェロペリオブラシを装着し使用できます。ハンドルは患者さん用と同じ形状のため院内でのTBIを患者さん自身が自宅で再現しやすい設計です。

### ■ハンドル形状




※ルシェロ院内指導用ハンドルに装着した替ブラシは、ルシェロ院内指導用ハンドル以外のハンドルに再装着しないでください。脱落の恐れがあります。


### 白歯部にも容易に届く ロングハンドル&ロングネック



### グリップエンドが手に乗せられ 安定感のある握りやすいロングハンドル

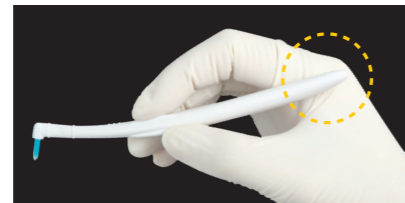

### オートクレーブ滅菌対応

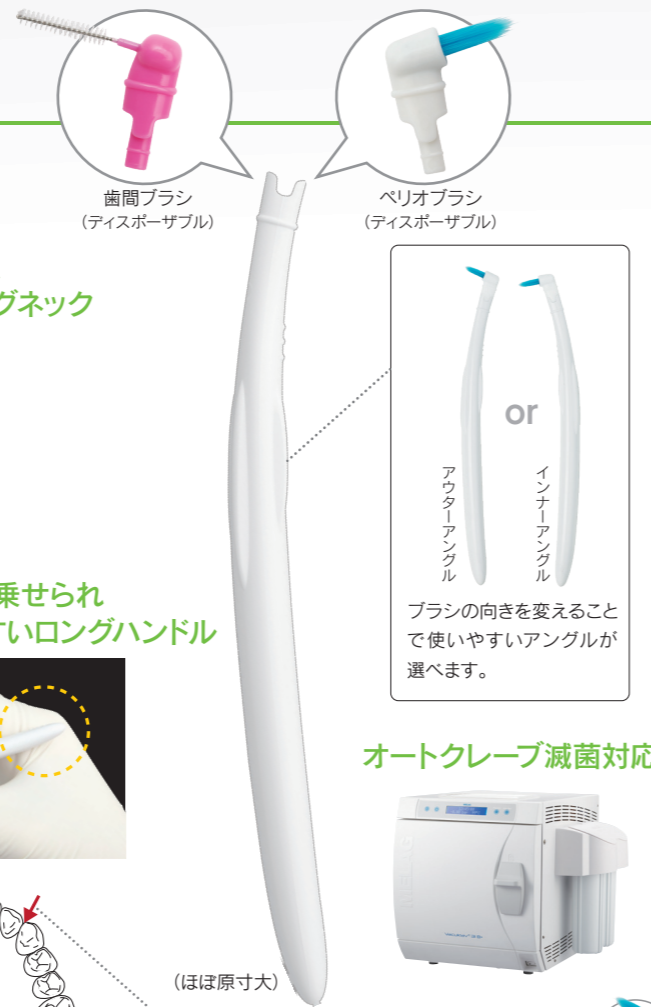

白歯歯間部には…  
歯周病のリスクが高く、歯間空隙が広く根面に凹部があることもあるため、歯間ブラシを推奨。



前歯歯間部には…  
審美的な理由からブラクトライアングルを防ぎ、クリーピングを促すため、歯間ブラシではなく、ペリオブラシを推奨。




コストパフォーマンスの高さとバリエーションの多さがポイント


## ルシェロ 歯間ブラシ 替ブラシ (医院用)

(ティスポーザブル)

TBI、PTC (Professional Tooth Cleaning) 等、院内での使用におすすめの大容量パックをご用意しました。

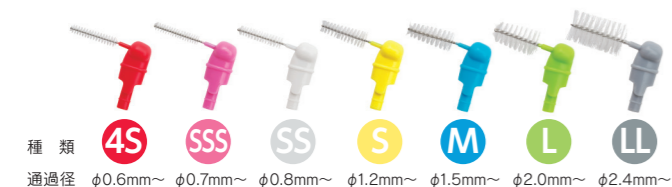


### 高強度ワイヤー& ルートコーティングで耐久性アップ

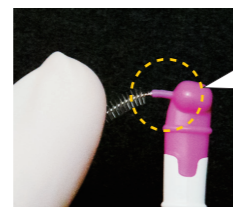

ルートコーティング樹脂がワイヤーの動きに合わせて柔軟にサポート。

### ■ワイヤー折曲耐久性試験 (0.3mmワイヤー)

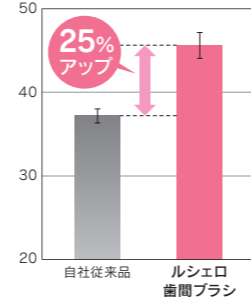


## SPTやメンテナンス時のペリオリスク部位のプラーク除去に ルシェロ ペリオブラシ 替ブラシ NO.1T (医院用)

(ティスポーザブル)

SPT (Supportive Periodontal Therapy) やメンテナンスにおいて、様々な口腔内の患者さんに対し長期にわたりPTCを提供する場面が一般的になりました。

治療により病状安定となった歯周組織の維持や、治療した歯周組織の長期的維持のため、歯や歯肉・補綴物等にやさしく、かつ適切なPTCを提供することが求められています。

ルシェロ ペリオブラシは、歯周ポケット、インプラント、補綴物周囲等、歯周病リスクの高い部位を低侵襲的にケアするプロフェッショナル専用の今までにない新しいブラシです。

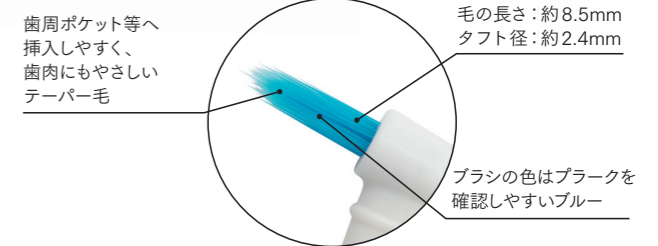

### 使用方法

歯周ポケットや歯間部等に挿入し、やさしく掃くように動かしプラークを除去してください。使用時の適正圧はプロービング圧と同等の20~25gです。

### 歯周ポケット、インプラント周囲溝のプラーク除去が容易



左下6近心 PD:4mm BOP:+  
従来はプラスチック製PMTC器材に対応しており金属や歯肉へのダメージを懸念していた。ペリオブラシは歯周ポケットへスムーズに挿入でき低侵襲的なプラーク除去が可能。

右下6近心 PD:3mm BOP:+  
従来は超音波スケーラーで対応していたが、繰り返しおこなうことで根面へのダメージが懸念された。ペリオブラシは根面を傷つせず低侵襲的なプラーク除去が可能。

カントアップがついた上部構造のためインプラント周囲溝へスケーラーを挿入することが難しく、従来はシリンジ洗浄で対応。ペリオブラシはインプラント周囲溝へ容易に挿入でき、低侵襲かつ確実なプラーク除去が可能。

歯間ブラシは痛みを伴い使用できないが、ペリオブラシは痛みを与えることなく、低侵襲的なプラーク除去が可能。

### 補綴物周囲のプラーク除去が容易



従来は超音波スケーラー(プラスチックチップ)で対応していたが、ペリオブラシは狭窄した鼓形空隙へスムーズに挿入でき、より簡便・確実にプラーク除去が可能。

従来はデンタルフロスで対応していたが、繊維の残留やプラークの取り残しを懸念していた。ペリオブラシは安全かつ効率的なプラーク除去が可能。

メンテナンス中に左上1に歯肉炎を発症。超音波スケーラーは補綴物を傷つけることが懸念されるが、ペリオブラシは低侵襲的にプラーク除去が可能。

### 低侵襲的な歯間部のケア



ブラクトライアングルを防ぎクリーピングを促すため、歯間ブラシではなくペリオブラシでプラーク除去をおこなう。

薬用ジェル  
ルシェロ ポイントケアジェル

- ①う触、歯周病、知覚過敏、歯石沈着に有効な5種の薬用成分
- ②操作性にすぐれ、細部に浸透しやすいジェル性状
- ③歯や歯肉にやさしい研磨剤・発泡剤無配合
- ④視認性が高く、適量がわかりやすいグリーンジェル
- ⑤スッキリと爽快感あるミントフレーバー

※ペリオブラシや歯間ブラシ、ワンタフトブラシにも使用できます。

ペリオブラシ併用例

- 歯頸部・歯周ポケットの細菌を殺菌・歯肉炎の予防
- 歯周炎の予防
- β-グリチルレチン酸
- 歯石沈着の防止
- タバコのヤニ除去
- ポリリン酸ナトリウム
- 歯周ポケットや露出した象牙質の知覚過敏症状を防止
- 乳酸アルミニウム
- フッ化ナトリウム(950ppm)
- エナメル質や根面のむし歯の発生と進行を予防
- 歯化セチルピリジニウム(CPC)
- 根面カリエス
- フッ化ナトリウムの効果を期待し根面へ塗りこむ
- インプラント周囲粘膜炎
- CPCとグリチルレチン酸の効果を期待しインプラント周囲溝へ塗布