

診療スタイルにあわせて 選べる2タイプの合着材

約**30**秒間

余剰セメントの除去可能時間

口腔内保持時間

2分45秒
以上



接着性グラスアイオノマー系レジンセメント

ジーシー
フジルーティング EX

約**90**秒間

余剰セメントの除去可能時間

口腔内保持時間

5分
以上



NEW

接着性ルーティングセメント

ジーシー
ルーティング VErSa

バーサ

合着時の診療スタイルに着目し、合着臨床の効率化（待ち時間の使い方）をご提案。


シャープに硬化する「ジーシー フジルーティング EX」に加えて、

新たに時間的な安心感をもたせた「ジーシー ルーティング VEr^{sa}」をラインナップ。

**フジルーティング EXを
お使いの歯科医院の皆様へ**

最終硬化時間は、「フジルーティング EX」の口腔内セット後2分45秒に対し、「ルーティング VEr^{sa}」は5分と長く設定されています。このため「フジルーティング EX」と同様のタイミングで、余剰セメントの除去を行ったり、コア装着後の支台歯形成を行うと脱落することがありますので充分にご注意ください。

37°C下へ静置後の硬化特性の違い

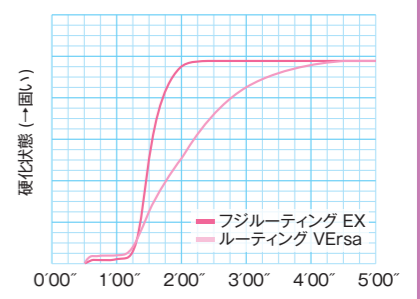

“合着臨床”の効率化をご提案

シャープな硬化特性により、早いタイミングで余剰セメントを除去。患者さんに対して負担が少なく、チェアタイムも短い

**ジーシー
フジルーティング EX**



ゆっくり硬化する特性により、余剰セメントの操作余裕時間が長く、ゆとりをもって除去作業ができる

**ジーシー NEW
ルーティング VEr^{sa}**



※ VEr^{sa} (バーサ) はVERSATILE (融通が利く) という新しい発想から生まれた商品名です。 ※ 23°Cで練和開始からセットまでの操作余裕時間：フジルーティング EXは約2分、ルーティング VEr^{sa}は約4分です。

**エコSTOPPERを使用
1クリック(インレー)、2クリック(クラウン)**

エコSTOPPERを用いることで、1クリックでインレー、2クリックでクラウンの適量(目安)が採取可能。誰でも簡便・正確な計量操作で、より経済的に使用できます。



■ 1クリック採取量 体積比(Aペースト：Bペースト)	フジルーティング EX		ルーティング VEr ^{sa}	
	1.4 : 1.0		1.0 : 1.0	
エコSTOPPER使用の場合				
	Aペースト	Bペースト	Aペースト	Bペースト
	Aペースト	Bペースト	Aペースト	Bペースト
	Aペースト	Bペースト	Aペースト	Bペースト

ほぼ実物大

容易な練和操作と高い視認性

各ペーストは練和しやすいクリーミーなペースト性状。2色に色分けすることで、練和状態を視覚的に確認できます。また、歯質と余剰セメントの判別がしやすい色調設定にしています。



プラスチックヘラ (別売)




ピンクのプラスチックヘラ (No.4) は、インレー、クラウン、コアなどへ適量のペーストを塗布しやすい先端形状です。



世界の合着臨床で実績のある高い理工学的特性

世界の合着臨床で実績がある「フジルーティング EX」*。「ルーティング VEr^{sa}」は、この「フジルーティング EX」と同レベルの高い歯質接着性、曲げ強さなど理工学的

特性を発揮します。特に、被膜厚さは10μmと薄いため浮き上がりの無い合着を行うことができます。
*フジルーティング EXは海外仕様製品名「GC FujiCEM 2」です。

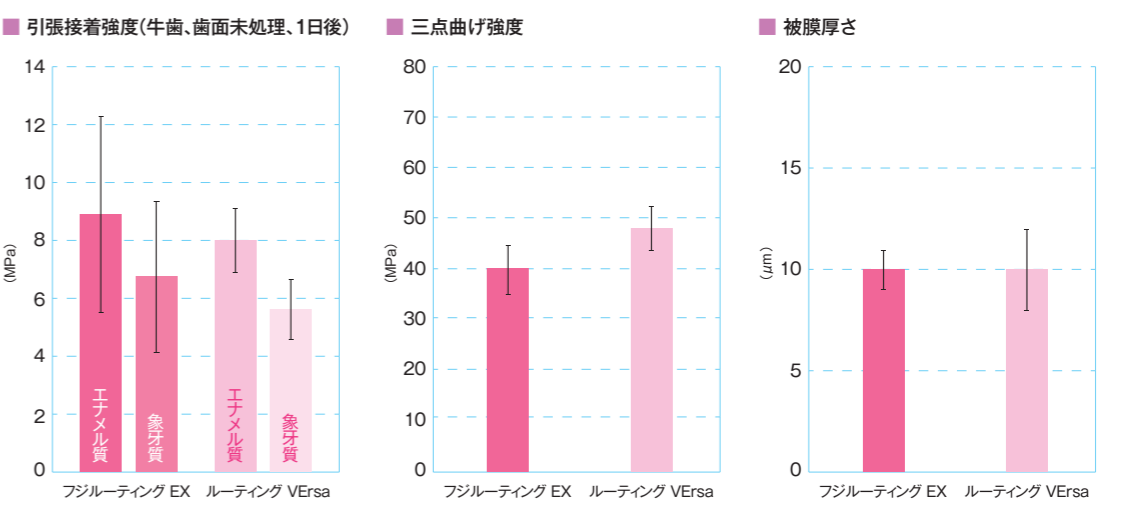

※イメージ図
※上記写真はルーティング VEr^{sa}を使用した症例です。

接着性ガラスイオノマー系レジンセメント

ジーシー フジルーティング EX



色調●1色=ライトイエロー

包装●1函：カートリッジ13.3g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊
管理医療機器 223AKBZX00077000

接着性ルーティングセメント

ジーシー ルーティング VErSa ^{バーサ} **NEW**



色調●1色=ホワイト

包装●1函：カートリッジ12.0g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊
ジーシー ルーティングバーサ 管理医療機器 225AKBZX00150000

※ 歯面処理材(ジーシー フジルーティング コンディショナー)は使用できません。

「合着・接着」歯科用セメント 使い分けのすすめ ※ 接着力、経済性などを考慮した製品選択の目安です。		フジルーティング EX	ジーセム リンクエース
		ルーティング VErSa	
メタル	インレー/アンレー	◎	○
	クラウン	◎	○
	ブリッジ	◎	○
	コア	◎	◎
	ポストコア	◎	◎
CAD/CAM ハイブリッドレジン	インレー/アンレー	—	◎ *1
	クラウン	—	◎ *1

*1:セラミックプライマー II(1液性)

接着性レジンセメント

ジーシー ジーセム リンクエース



色調●3色=A2、A03、トランスルーセント

包装●1函：シリンジ4.6g(2.7mL)2本、EMミキシングチップT 15個、EMミキシングチップF 5個、EMミキシングチップF用ノズルRC 5個
管理医療機器 225AKBZX00043000

関連製品

ジーシー CDディスペンサーⅢ

〈使用方法〉



すべてのCDカートリッジ製品にご使用いただけます。カートリッジをセットします。

包装●1函：1個
一般医療機器 09B2X00010G00063



プッシュボール(押し棒)をカートリッジ中皿に突き当たるまでスライドさせます。



安全ツマミを回し、押し出し操作ができるようにします。



ストッパーをスライドさせ、押し出し量を決め、カートリッジのキャップを外して採取します。

ジーシー CDディスペンサーⅢ エコストッパー **NEW**



セットも簡単で1回の採取量が少量で経済的です。
※フジルーティング EX、ルーティング VErSaのみ対応


包装●1函：1個
一般医療機器 09B2X00010G00063

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載のジーシー研究所測定の実験データは、2014年7月現在のものです。

プラスチックハラ



色調●2色=青、白
包装●1本(No.1)

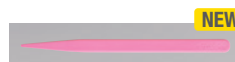

色調●1色=ピンク
包装●1本(No.4)

ジーシー フジルーティング CDプランジャー



フジルーティング EX、ルーティング VErSaのみ押し出しが手軽に行える軽量*でコンパクトな専用のプランジャーです。オートクレープ減菌が行えます。

※本体重量25g・CDディスペンサーⅢの約1/5

包装●1函：1個
一般医療機器 13B1X00155000227

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

DIC(デンタルインフォメーションセンター) 支店
お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)
http://www.gcdental.co.jp

営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286