

塗布後待ち時間「0秒」で、マルチユース。



Zero-sec. & Multi-use

コンポジットレジン修復

知覚過敏抑制

口腔内リペアー




多目的光重合型1液性ボンディング材

ジーシー G-プレミオ ボンド

G-Premio BOND

塗布後の待ち時間「0秒」 の簡便性

ボンディング材塗布後、待ち時間なしで乾燥、光照射へとスピーディに行なえ、特に唾液の多い下顎前歯部や小児、高齢者の症例等にもストレスなくコンポジットレジン修復が行なえます。

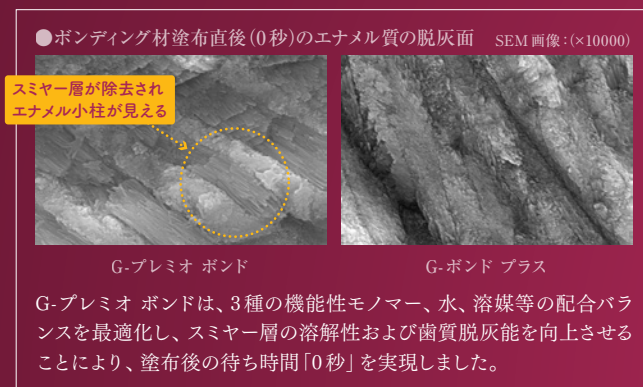

唾液の多い下顎前歯部などに

コンポジットレジン修復

小児の症例に

知覚過敏抑制

高齢者の症例に

口腔内リペアー

1ボトルで様々な症例に活躍 の「マルチユース」

コンポジットレジン修復だけではなく、様々な補綴物の口腔内リペアー、露出した象牙細管を確実に封鎖することによる知覚過敏抑制など、ボンディング材としての臨床用途が広がりました。




塗布後待ち時間「0秒」でも、高い接着力

臨床実績があるリン酸エステル系モノマー「MDP (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)」とカルボン酸系モノマー(4-MET)を配合することにより、エナメル質、象牙質と共に強固に接着。溶媒に揮発性の高いアセトンを使用することにより、ボンディング層から水を効果的に除去。また、親水性の高いHEMAを配合していないため吸水しにくく、長期的な接着耐久性が期待できます。

0秒から安定した 高い接着力！

「G-プレミオ ボンド」は、塗布後の処理時間
0秒、5秒、10秒で有意差は見られない

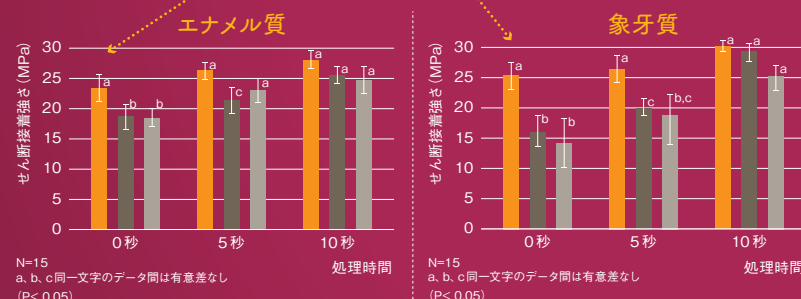

歯面処理時間別せん断接着強さ

日本歯科保存学会 2014年度秋季学術大会(第141回)発表より
辻本晴正、宮崎真至：ストレスフリーを実現したユニバーサルタイプの接着システム
「G-プレミオ ボンド」デンタルダイヤモンド、40(1):142-147, 2015

各種補綴物への長期的に安定した接着力

リン酸エステル系モノマー配合により非貴金属や金属酸化物であるジルコニア、アルミナに、また、新規チオリン酸エステル系モノマー(MEPS)配合により貴金属にも接着します。ハイブリッドレジンやセラミックスには、「ジーシー セラミックプライマー II」の併用で強固な接着が可能。口腔内リペアーに使用できます。


ハイブリッド
レジン

セラミックス
(長石系・ニケイ酸リチウム)

には「ジーシーセラミックプライマーII」を併用ください。



長期的に 安定した接着力！

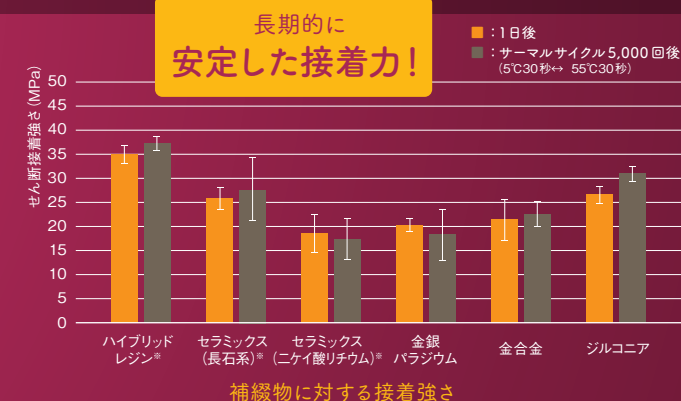


基本ステップ(コンポジットレジン修復) 塗布後すぐに乾燥！



照射器	G-ライト プリマII Plus (LED)	G-ライト (LED)	フリッポ (キセノン)	コピー (ハロゲン)
光照射時間	5秒 (モードF5)	5秒	5秒 (2ステップ照射)	10秒
窩洞が深い場合	10秒 (モード10)	10秒	8秒 (2ステップ5秒+3秒)	20秒

※他社製LED照射器を使用する場合は、コピーの光照射時間を参考にしてください。

CR 充填・光照射

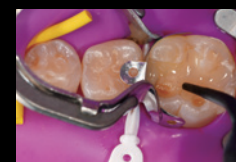

形態修正・研磨後




審美性を追求し5μm以下の ボンディング層を実現

薄いボンディング層でありながら、歯質への強固な接着を実現。審美性に優れた治療が行なえます。



多数歯充填を可能にした 操作余裕時間7分

粘性の経時的変化を抑え、操作余裕時間7分(付属のディスポディッシュ使用時)を実現。余裕を持って処置が行なえます。

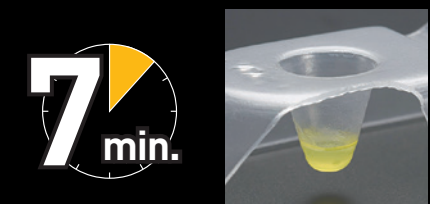



歯科用象牙質接着材
歯科金属用接着材料
歯科セラミックス用接着材料
歯科用知覚過敏抑制材料



ジーシー G-プレミオ ボンド NEW

多目的光重合型1液性ボンディング材

セット

包装●セット1函：G-プレミオ ボンド(5mL) 1本、ディスポーザブルアブリケーター(ファイン) 50本、ディスポディッシュ 20枚

単品包装

包装●1本

ディスポディッシュ

包装●1函：50枚

ディスポーザブルアブリケーター(ファイン)

包装●1函：50個

管理医療機器 226AABZX00098000

近日発売 2本包装 / ユニドース セット



ジーシー セラミックプライマーII

セラミック接着用プライマー

包装●1函：3mL 1本

管理医療機器
221AABZX00190000



ジーシーオリジナルの「1ドロップボトル」



- 液が垂れることなく、1滴ずつ採取
- 液垂れによるノズル周りの汚れ低減
- 握りやすいキャップで、軽い力で開閉

関連製品

ジーシー MIフロ-Ⅱ

ナノハイブリッドフロアブルコンポジットレジン



なめらかに流れて
窩底にとどまる

色調●9色=A1、A2、A3、A3.5、A4、A5、U(ユニバーサル)、A02、A03

包装●1包：3.6g(2mL)入シリンジ1本、フィリングチップⅢプラスチック2個、フィリングチップⅢニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個

管理医療機器 225AABZX00175000

ジーシー MIロ-フロ-

ナノハイブリッドフロアブルコンポジットレジン



適度に流れて、
ねらった部位にとどまる

色調●19色=A1、A2、A3、A3.5、A4、A5、B1、B2、B3、C2、C3、U(ユニバーサル)、A01、A02、A03、E1、E3、BW(ブリーチングホワイト)、WO(ホワイトオパール)

包装●1包：3.4g(2mL)入シリンジ1本、フィリングチップⅢプラスチック2個、フィリングチップⅢニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個

管理医療機器 223AABZX00118000

ジーシー MIフィル

ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン



ダイレクトに填入、
しかも良好な付形性

色調●17色=A1、A2、A3、A3.5、A4、A5、B1、B2、B3、C2、C3、A01、A02、A03、E1、E3、BW(ブリーチングホワイト)

包装●1包：3.4g(2mL)入シリンジ1本、フィリングチップⅢプラスチック2個、フィリングチップⅢニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個

管理医療機器 221AABZX00034000



G-ライト プリマⅡ Plus

LED可視光線照射器

包装●G-ライト プリマⅡ Plus
一式

一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000203

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載のジーシー研究所測定参考データは、2015年1月現在のものです。

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区本連沼76番1号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286