

カンタン操作 × MMAフリー

術者にも患者にもスマートなTeC診療



48mLカートリッジ



10mLカートリッジ

デュアルキュア型テンポラリーC&B用コンポジット

TEMPSMART

ジーシー テンプスマート

保険適用



簡単

オートミキシングで簡単作製

テンプスマートは、オートミキシングタイプの暫間修復用コンポジット。常温重合レジンのように粉液の計量や混和、片付けが不要。ミキシングチップを装着して押し出すだけで気泡のない均一に練和されたペーストが出てきます。



10mL カートリッジは手押しタイプ。プランジャーを外せば「ユニフィルコアEM」用のEMディスペンサーに装着し使用可能。




48mL カートリッジは、シリコン印象材用のカートリッジディスペンサーIIに装着して使用。

速い

作業時間を大幅短縮

支台歯形成前に採得した印象を用いることで、形態修正や研磨時間を大幅に短縮でき、安定したクオリティの高い暫間修復物が簡単に作製できます。またデュアルキュアタイプのため、最終重合を光照射で行うことにより、硬化時間を短縮することができます。

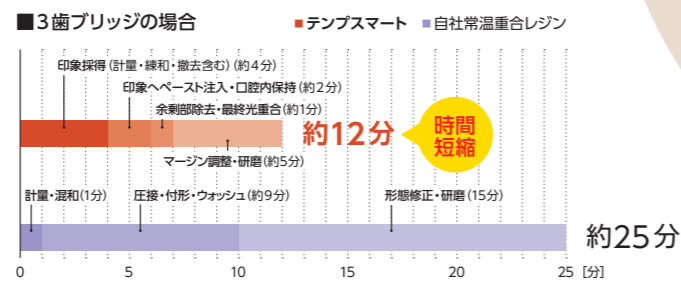


テンポラリー作製へ オートミキシングの 新提案



低収縮

高い適合性と高精度

常温重合レジンに比べて低収縮のため、高い適合性を発揮します。重合時の変形が少なく、単冠からブリッジまであらゆるケースで高い精度が保たれます。

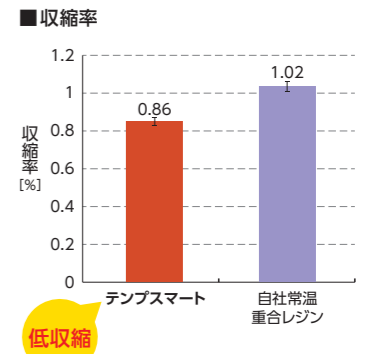

硬化性


印象材の種類を選ばず作製が可能

印象材を選ばないテンプスマート。可塑性を含まないため吸熱されにくくアルジネート印象材、シリコン印象材等、あらゆる印象材を使用することができます。

高強度

長期の使用にも最適




高い艶維持性と耐摩耗性、そして曲げ強度も兼ね備えており、口腔内装着期間の長い症例にも最適です。

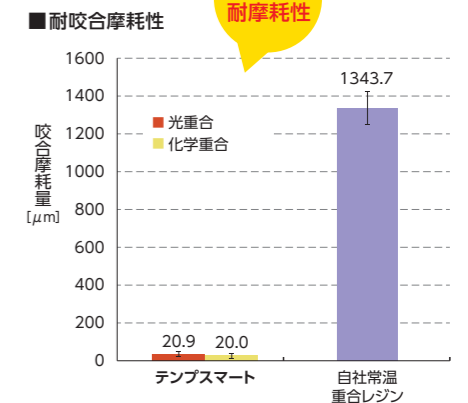

優しい

MMAフリーで刺激臭なし 発熱量少なく患者への負担軽減

MMAを含まないコンポジットレジン組成の採用により、特有の刺激臭がありません。重合時の発熱量も常温重合レジンよりも少ないため、患者さんの負担が軽減されます。

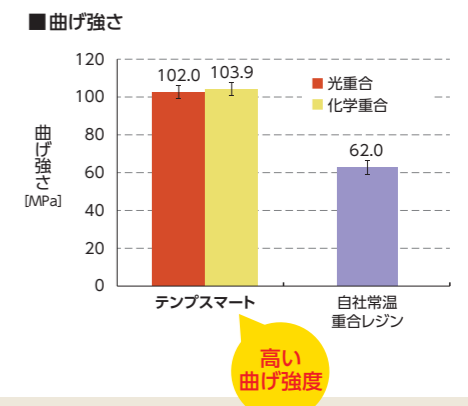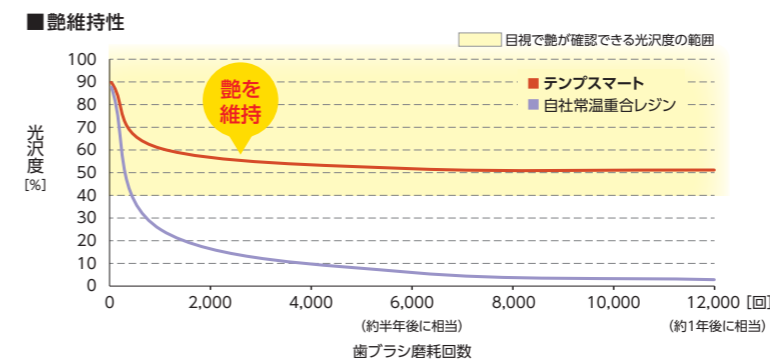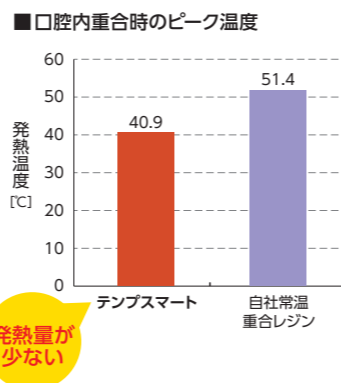

作製例 (直接法による暫間修復物の作製)

- 術前**
支台歯を形成する前。
- 印象採得**
支台歯を形成する前に印象を採得します。
アルジネート印象材も使える
- 支台歯形成**
印象採得後に支台歯形成を行います。次にアンダーカットの除去、分離剤の塗布を行います。
- ペースト (テンプスマート) 注入**
採得した印象 (コア) にペーストを注入します。
- 印象 (コア) を支台歯へ装着**
ペーストを注入した印象 (コア) を支台歯へ装着します。(ペースト注入開始から45秒以内に装着)
※透明シエルなどを用いた光照射による重合は行わないこと (火傷の恐れがあるため)
- 暫間修復物を支台歯から撤去**
ペースト注入開始から2分~2分30秒の間に、硬化した暫間修復物を支台歯から外し余剰部を除去します。
※必ずペースト注入開始から2分~2分30秒の間に支台歯から外すこと (硬化が進むと外れなくなる恐れがあるため)
- 最終重合**
1歯当り5秒間咬合面から光照射します。光照射を行わない場合は、ペースト注入開始から5分以上待ちます。
- 仮着**
形態修正・研磨・咬合調整を行い、仮着します。


材料を選ばず簡単に追加築盛やリペアー可能



テンプスマートを使用



常温重合レジンを使用
(例: ユニファストⅢ)

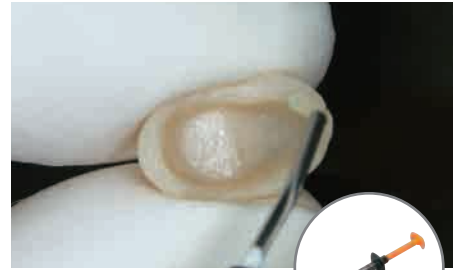

フロアブルコンポジットレジンを使用
(例: MI ローフロー)




※追加築盛・リペアー・ウォッシュの前に必ず新鮮面を出してください。(唾液が付着すると接着力が著しく低下します)
※接着面積が小さい場合は、シランカップリング剤「セラミックプライマーII」との併用を推奨します。

デュアルキュア型テンポラリーC&B用コンポジット

ジーシー テンプスマート

色調●4色=

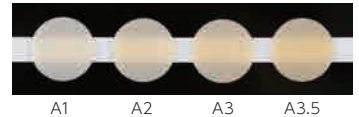

10mLカートリッジ

色調●4色=A1, A2, A3, A3.5

包装●1函: カートリッジ (10mL) 1本, EM ミキシングチップT 10本

歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ ジーシー テンプスマート
管理医療機器 226AABZX00140000

別売



ジーシー EMディスペンサー

包装●1函: 1個

10mLのカートリッジは、プランジャーを外して「ユニフィルコアEM」用のEMディスペンサーに装着し使用できます。

歯科用充填・修復材補助器具 ジーシー EMディスペンサー
一般医療機器 13B1X00155000187
製造販売元 株式会社ジーシー



48mLカートリッジ

色調●4色=A1, A2, A3, A3.5

包装●1函: カートリッジ (48mL) 1本, ミキシングチップII (SSS) 16本

歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ ジーシー テンプスマート
管理医療機器 226AABZX00140000

別売



ジーシー カートリッジディスペンサーII

包装●1函: 1個

48mLカートリッジは、シリコン印象材(エクザミックスファイン、フュージョンIIなど)用のカートリッジディスペンサーIIで使用します。

歯科用練成器具 ジーシー カートリッジディスペンサーII
一般医療機器 23B2X00038000019

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ

東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもこちらのQRでOK!

推奨OS/バージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

BE026X2303