

口腔機能モニター Oramo2



歯科用咬合力計



Oramo

咬合力がその場でわかる 小児の咬合力測定にも

全顎の測定に加え、個歯の測定も可能です。

小児や口の小さな方の検査にも適しています。

ポイント | 1

リアルタイム表示

ディスプレイには、測定中の最大咬合力が表示されます。
患者さんへの即時フィードバックが可能です。

ポイント | 2

軽量・ポータブル

乾電池式で、ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。
訪問診療にも活用できます。



注) センサーシート、
センサーカバーは別売です。

※センサーシートの最大使用回数は50回です。

ディスプレイに交換表示が出ましたら、新しいセンサーシートに交換してください。

個歯用

全顎用



ジーシーの口腔機能情報サイトはこちら

使用方法

簡単 3 STEP




1st STEP



本体の電源を入れる

電源ボタンを2秒以上長押ししてください。

2nd STEP

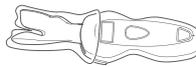


患者の口腔内へセンサーを挿入

センサーシート(Uタイプ)は、挿入の際、湾曲させても問題ありません。

※センサーシート(Iタイプ)は、湾曲させずにご使用ください。

3rd STEP

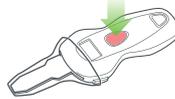

計測ボタンを押し、計測を開始

咬合力の最大値が表示されます。

製品仕様

■機器本体

名称	口腔機能モニター Oramo2
医療機器届出番号	23B2X10022000007
類別	機械器具 24 知覚検査または運動機能検査用器具
一般的名称	一般医療機器 歯科用咬合力計(JMDN コード7069900)
医療機器分類	クラスI 特定保守管理医療機器
測定内容	最大咬合力値
測定時間	約1秒～
表示範囲	Iタイプ:0～1300N Uタイプ:0～1999N (ただし計測精度保証範囲は100～500N)
測定精度	±10%(繰り返し性)
外形寸法	約245mm × 79mm × 40mm
本体重量	約160g(電池含む)



同梱物

- ・本体(1台)
- ・単4電池4本(内1本予備)
- ・セミハードケース(1個)

センサーシート、センサーカバーは別売です

消耗品(別売)

(個菌用)



bf-センサーシート(Iタイプ)

入数: 1枚
最大使用回数: 50回
表示範囲: 0～1300N
精度保証範囲: 100～500N

(全額用)



bf-センサーシート(Uタイプ)

入数: 1枚
最大使用回数: 50回
表示範囲: 0～1999N
精度保証範囲: 100～500N



bf-カバー(Iタイプ)

入数: 50袋



bf-カバー(Uタイプ)

入数: 50袋

※小児に使用する場合は、Iタイプセンサーを利用し、第二乳臼歯または第一大臼歯の一对で測定してください。

※「Oramo」「オラモ」および「Oramo」ロゴは住友理工株式会社の商標または登録商標です。

※掲載情報は、2026年2月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

※本パンフレットに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **住友理工株式会社**

東京都文京区本郷3丁目2番14号

愛知県小牧市東三丁目1番地

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

