

GC



義歯・マウスピース用錠剤タイプ洗浄剤

Tablet Cleanse

タブレット
クレンジ

5分の浸けおきで99.99%除菌*

口腔内装置のお手入れガイド



※すべての菌に効果があるわけではありません

毎日の


正しいお手入れですっきり清潔

口腔内装置 (マウスピース・ナイトガード)
矯正用リテーナー・入れ歯

のお手入れをしていますか？



きちんとお手入れをしないと...

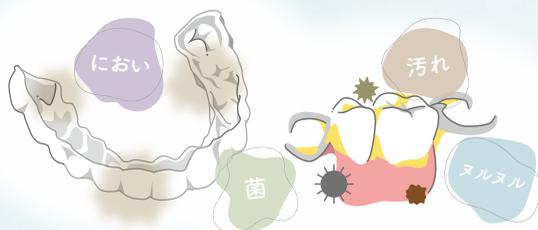


落とすきれない汚れや菌が積み重なる

誤ったお手入れをすると...

極めのブラシを使うと

ブラシのみでも
傷ついてしまう

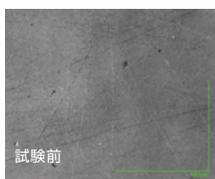

極みがきペーストを使うと

研磨剤によって
さらに傷つく



株式会社ジーシー試験結果

口腔内装置が傷つき汚れや菌がつきやすくなる

専用ブラシと
洗浄剤を使いましょう！



目に見える汚れは
専用ブラシと泡タイプ洗浄剤で
ブラッシング



着色汚れや細かい部分の汚れは
錠剤タイプ洗浄剤で浸けおき



タブレットクレンズでしっかり洗浄

5分の浸けおきで99.99% 除菌*

口腔内装置に付着した、細菌・カビの一種・においの原因菌を除菌できます。

ペイコネラ菌

カンジダ菌

カンジダ菌
にも対応

肺炎桿菌

99.99%

P.gingivalis菌

除菌

※全ての菌に効果があるわけではありません

隅々までしっかり洗浄

酵素の力でタンパク汚れを分解し、漂白洗浄成分がコーヒーやタバコのやになどの着色汚れをきれいに落とします。

15分
浸けおき



株式会社ジーシー試験結果

マルチユース

防サビ剤配合により、幅広い口腔内装置に使用できます。



入れ歯



マウスピース

毎日のケアに
使える



矯正用リテーナー

*詳しくは歯科医師、歯科衛生士にご確認下さい。

使い方

1 目に見える汚れをブラッシングで落とす



泡の洗浄剤を
使用すると
傷つけない

専用のブラシを準備しましょう

2 150mL~200mLのぬるま湯または水に1錠入れる



40~50℃のぬるま湯がおすすめ

3 口腔内装置を洗浄液に5分浸す



生活スタイルや
汚れに合わせて
洗浄時間が選べる

ひどい汚れの場合は一晩

4 流水ですすぐ



洗浄液をしっかり洗い流しましょう



ミントの香り

マウスピース・入れ歯用洗浄剤 **【歯科用】**

タブレットクレンズ

液性●弱アルカリ性

内容量●48錠

包装●1函

関連製品



ネイビー



オレンジ

マウスピース・入れ歯用ブラシ **【歯科用】**

ブラッシュクレンズ

包装●1本



ミントの香り

泡の洗浄剤 **【歯科用】**

ホイップクレンズ

内容量●180mL(約240プッシュ分)

包装●1本

製造元

サラヤ株式会社

大阪市東住吉区湯里2-2-8

※掲載内容は、2026年3月現在のものです。

※印刷の都合上、実物と多少色が異なる場合がございます。

※無断転載、無断複製を禁じます。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎ **0120-179418**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

株式会社 ジーシー

東京都文京区本郷3丁目2番14号