

GOKURI™ 頸部装着型電子聴診器

頸部用電子聴診器

嚥下スクリーニングや食事観察時の
生体音の聴診・記録を支援する電子聴診器



GOKURI

PLIMES



Since 1921
100 years of Quality in Dental



嚥下スクリーニングや食事観察時の
生体音の聴診・記録を支援する電子聴診器

GOKURI™

頸部装着型電子聴診器



GOKURIは頸部装着型デバイスで嚥下音を取得し、再生や波形表示で嚥下の様子を確認できる管理医療機器です。食事の様子とあわせて嚥下音を記録し、医療従事者間で共有することもできます。操作は簡単で、術者のスキルに関わらず一定の基準でデータを取得できます。頸部音の聴診・記録、飲水テストや食事観察時の記録を補助し、専門職による判断に必要な情報の記録・共有を支援します。

※本品は、頸部音の聴診・記録を支援する医療機器です。診断、治療方針、食形態等の判断は、医師・歯科医師等の専門職が、他の臨床情報と併せて行ってください。また、ご使用前に、電子化された添付文書および取扱説明書を必ず確認してください。



嚥下音の
見える化



非侵襲・簡単装着の
ウェアラブル
デバイス

今までの検査方法との違い

「口腔機能低下症に関する基本的な考え方(令和8年3月 日本歯科医学会)」の嚥下機能低下の検査に以下のフローが示されており、GOKURIは頸部聴診法の機器として使用できます。※保険算定はできません。

口腔機能精密検査 (嚥下機能低下の検査)

スクリーニングテスト

精密検査




嚥下スクリーニングツール
(EAT-10)

自記式質問票
(聖隷式嚥下質問紙)



頸部聴診法

RSST(反復唾液嚥下テスト)

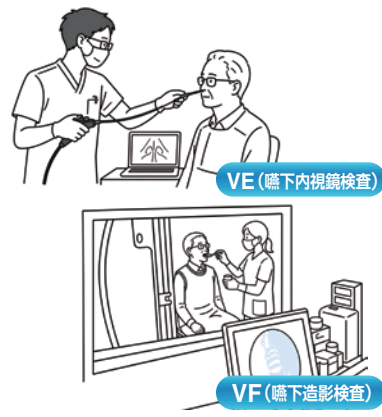

VE(嚥下内視鏡検査)

VF(嚥下造影検査)

使い方(頸部聴診法の場合)

01

スマホに近づけるだけ!




Bluetooth®でアプリに接続

02




装着

03

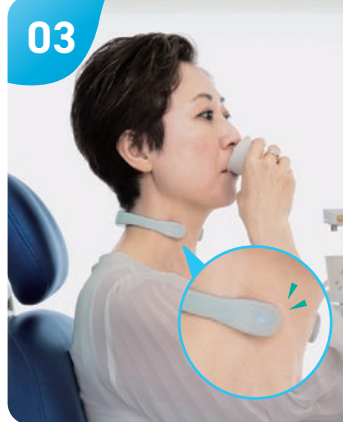

飲み込む

04

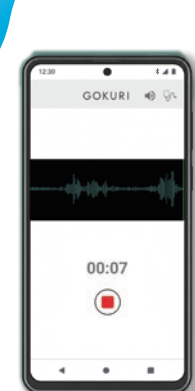

嚥下音を波形で表示

GOKURIアプリでできること



アプリは測定内容が異なる「GOKURI」と「GOKURIケア」の2種類があります。各アプリはGoogle Playストアを通じてAndroid端末にインストールできます。



電子聴診器
(頸部聴診法)

嚥下音など生体情報を録音・再生します。
録音データは波形表示され視覚的に確認できます。



ビデオ聴診法
(オンライン診療)

食事の様子を動画で撮影しながら
嚥下音も記録します。

GOKURIアプリ
ダウンロードはこちら
(Google Playストア)



オンライン診療での活用も

スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、自宅等にしながら医師の診察等を受けることができる診療です。



※「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」において、オンライン診療を実施する歯科医師は、厚生労働省が定める研修を受講することとされています。



GOKURI
医療機器用情報提示アプリ

概要

嚥下音など生体情報を取得
※医療機器プログラムではありません。

測定内容

2項目
・電子聴診
・ビデオ聴診法

利用料

無料

必要備品

Android 端末 (アプリはGoogle Playストアから入手)

データ保管

スマートフォン本体に保存



GOKURIケア
業務支援アプリ

概要

摂食嚥下管理システム
患者情報や取得データの管理と共有
※医療機器プログラムではありません。

測定内容

8項目
・ビデオ聴診法
・RSST(反復唾液嚥下テスト)
・MWST(改訂水飲みテスト)
・フードテスト
・GOST(食形態目安判定)
・SST(簡易嚥下テスト)
・食事モニタリング
・クラッカーテスト

利用料

12万円/年 ※PLIMES株式会社と直接契約が必要です

必要備品

Android 端末 (アプリはGoogle Playストアから入手)
※ブラウザ不要

データ保管

クラウド保存 ※Microsoft Azure

RSST・MWST・Food Test など

さらに詳しく分析・管理したい方へ



GOKURI ケア



クラウドにて患者さんごとの計測データを保存・確認できます。

GOKURIケアに関するお問い合わせ、
デモ依頼、ご購入手続きはこちら



※GOKURIケアに関する内容は右のQRコードよりPLIMES株式会社にお問い合わせください。

頸部用電子聴診器

GOKURI™ 頸部装着型電子聴診器

包装●
本体1台、USB ケーブル1本

電子聴診器 GOKURI™ 頸部装着型電子聴診器
管理医療機器 305AFBZX00070000




製品の詳細はこちら
PLIMES 株式会社
製品Webサイト



仕様

重量：45g
材質：熱可塑性エラストマー（ポリエステル系）、ポリプロピレン
サイズ：W100 × L110 mm
充電方式：USB2.0 タイプC

※アルミカバーの接触面はアルミニウムの素材でできています。
患者および被計測者が金属アレルギー（アルミニウム）がないか事前に確認して使用すること。

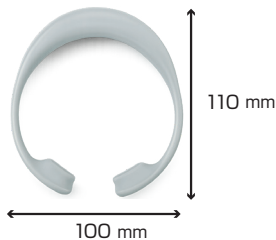

推奨ACアダプター（仕様適合品）

定格出力	DC 5V / 500mA 以上
入力/接続方式	USB Type-C port
適合規格・認証	・PSEマーク（電気用品安全法）に適合しているもの ・IEC62368-1、IEC60950-1、又はIEC60601-1のいずれかに適合しているもの

推奨スマートフォン環境

OS	Android 10+以上※ ※ただし、Google LLCによるサポートが継続されているOSバージョンに限ります。 ※2026年現在、安定した動作のためAndroid13以降でのご利用を推奨しています。 ※iPhoneではご利用できません。
通信	Bluetooth5.0対応
入力/接続方式	USB2.0Type-C port
適合規格・認証	・RoHS対応 ・IEC60950-1又はIEC62368-1、又は同等の規格に適合しているもの ・VCCI、又は同等の規格に適合しているもの ・総務省所管法令電波法に関する技適マークのあるもの
注意事項	※上記の動作事項を満たさない場合、正常に動作しないことがあります。 ※本製品の仕様にあたっては、最新のGOKURIアプリおよび該当アプリが対応するOSをご使用ください。対応OSの詳細は、Google Playストアにてご確認ください。

※Google PlayはGoogle LLCの商標です。
※上記OSを搭載している端末であっても、OSのアップデートや端末の特別な設定、空き容量や通信状況・通信速度などが起因し、動作しない場合があります。
※全ての端末での動作を保証するものではありません。
※アプリダウンロードやご利用時にかかるデータ通信料はお客様のご負担となります。

関連製品



舌圧測定器

JMS 舌圧測定器 TPM-02

包装●一式＝本体1台、
USB通信ケーブル、収納ケース、
単三形アルカリ乾電池2個

別売

舌圧プローブ1函：25本
連結チューブ1函：5本

舌圧測定器 JMS 舌圧測定器
管理医療機器 22200BZX00758000
製造販売元 株式会社ジェイ・エム・エス



舌圧トレーニング用具

ペコぱんだ

種類●9 種＝
SS（ブルー）：極めて軟らかめ
S（ピンク）：軟らかめ
MS（バイオレット）：やや軟らかめ
M（グリーン）：普通
MH（オレンジ）：やや硬め
H（イエロー）：硬め
こども用やわらかめ（ベリー）
こども用ふつう（グレープ）
こども用かため（ライム）
包装●1函：5 個
包装・希望患者価格●1個＝¥920（税込）

販売元 株式会社ジェイ・エム・エス



口腔細菌定量検査装置

口腔内細菌カウンタ

包装●一式＝本体1台、定圧検体採取器具1個、電源コード、ACアダプター1個

別売

専用測定消耗品（100 回分）1 函（品番：N-DP05）＝センサーチップ 100 本、ディスポーザブルカップ 100 個、滅菌綿棒 105 本

微生物定量分析装置 口腔内細菌カウンタ NP-BCM01-A
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B2X10654000003
製造販売元 パナソニック株式会社

医科用捲綿子 医科用綿棒 N-DP05
一般医療機器 13B2X10654000004
製造販売元 パナソニック株式会社

※掲載情報は2026年7月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※アプリ画面写真はハズ込み合成のため実際とは若干異なります。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **PLIMES株式会社**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 茨城県つくば市天王台一丁目1番1号 産学リエゾン共同研究センター棟

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.～5:00p.m.（土曜日、日曜日、祝日を除く）
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東 北 (022)785-8040 ●九 州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store からダウンロード
Google Play でお申し込み
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

