

舌圧トレーニング機器



ペコピーな



Orarize
オーラライズ


舌圧トレーニングゲーム対応



ペコジーなは、舌のチカラを鍛え続けたいくなる！

■ ノーマルモード

表示画面を見ながら、舌のトレーニングを行います。

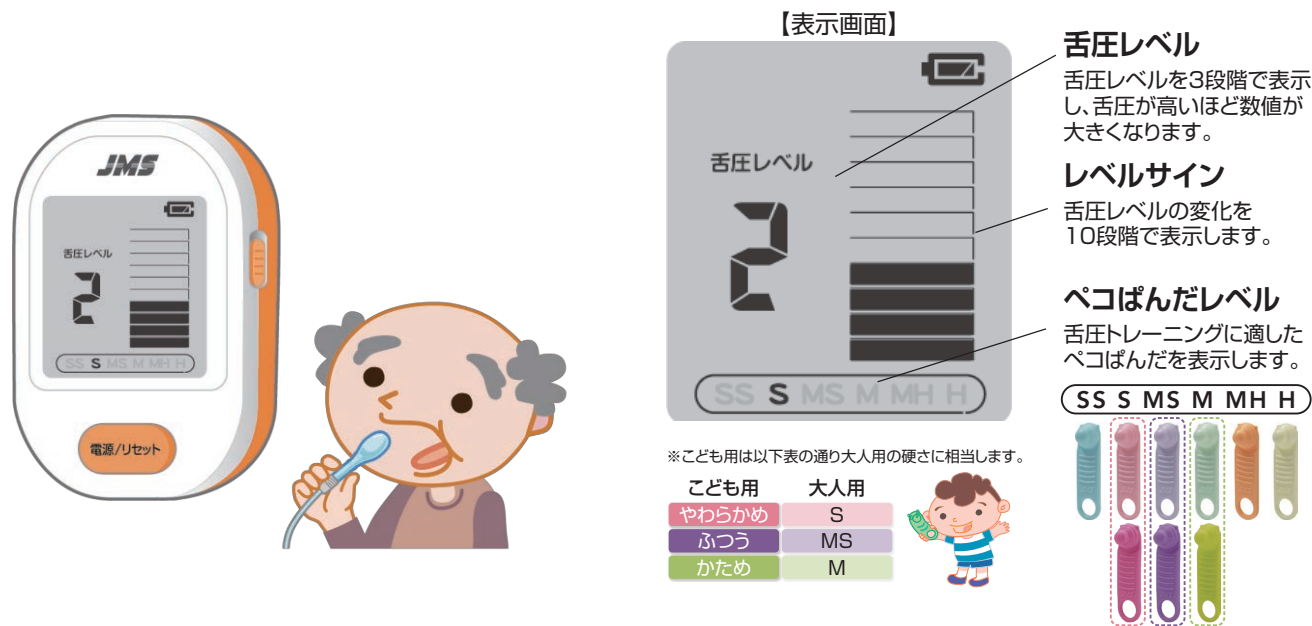

口腔機能向上をサポートするトレーニング機器です。

■ ゲームモード

専用アプリで遊びながら、舌のトレーニングを行います。



*Appleロゴ、App Storeは、米国その他の国や地域で登録されたApple Inc.の商標です。
*Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

トレーニングメニュー①舌の筋力アップ

目標レベル*1

- 舌圧レベル=3
- ペコぱんだレベル=H



しっかり 舌圧プローブを押し潰す！

7秒間 × 3セット

*1)目標レベルは個人によって異なります。最大のチカラで潰せるところで7秒間押し潰し続けてください。

トレーニングメニュー②舌の筋持久力アップ

目標レベル*2

- 舌圧レベル=2
- ペコぱんだレベル=S





ゆっくり 舌圧プローブを押し潰す！

10回 × 3セット

*2)目標レベルは個人によって異なります。無理のないチカラで潰せるレベルで押し潰してください。



- ペコジーナの舌圧プローブを押し潰すと下駄が飛んでいきます。
- 成績順のランキングを表示します。

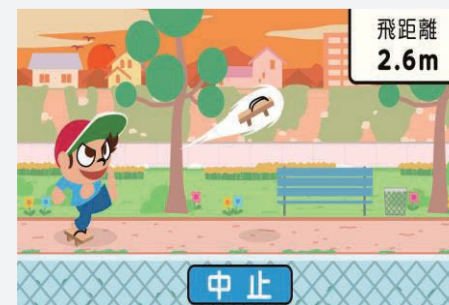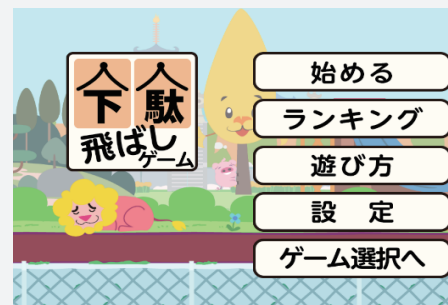

筋力アップ



- ペコジーナの舌圧プローブを押し潰すと、「アジ」、「カツオ」、「タイ」などの釣りが楽しめます。
- 制限時間を設定してトレーニングする事ができます。
- 成績順のランキングを表示します。






筋持久力アップ

基本操作方法

各部位を接続して電源を入れる

バルーンを口に入れる

バルーンを押し潰す

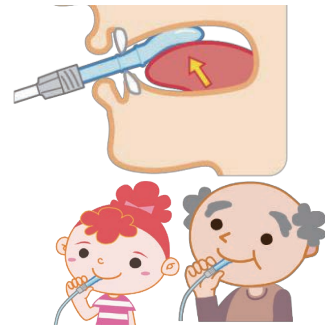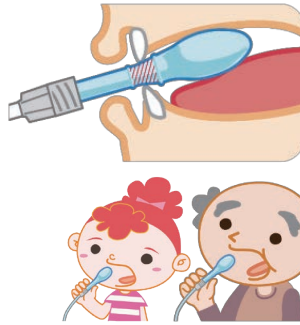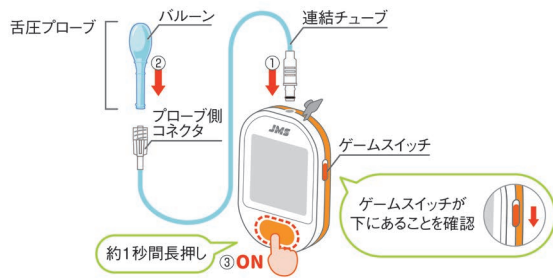

規格一覧

品名	品番	JANコード	梱包単位
ペコジーな スターターキット	JF-PCG3	4987494379996	1セット/箱
ペコジーな 舌圧プローブ	JF-PCGP2	4987494379897	25本/箱
ペコジーな 連結チューブ	JF-PCGT2	4987494379903	5本/箱

注)本品は、医療機器ではありません。舌圧検査(140点)の保険算定対象外となります。

仕様一覧

型式	PCG-02		
使用電源	単四形アルカリ乾電池 × 2		
連続使用時間	約16時間（新品の乾電池を使用した場合）		
寸法	74(W) × 118(L) × 28(H)mm		
表示機能	舌圧レベル	1、2、3	
	ペコぱんだレベル	SS、S、MS、M、MH、H	
	レベルサイン	バーグラフ	
通信	Bluetooth® Ver.4.1（Bluetooth Low Energy）WSP		
付属品	舌圧プローブ 3本 連結チューブ 1本 乾電池（単四形アルカリ乾電池 × 2） 1セット 収納ケース（巾着袋） 1袋 取扱説明書 保証書付 1部 クイックマニュアル 1部		
オプション	舌トレアプリ		

*仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。

専用アプリ(無料)

アプリ名	舌トレアプリ
対応OS	iOS(11,12,13,14,15,16,17) / Android(8,9,10,11,12,13,14)
言語	日本語
容量	90.7MB(iOS) / 70MB(Android)



ペコジーな特設サイトはこちら
<https://pecogina.jms.cc>

*OS対応状況の最新情報は、<https://pecogina.jms.cc> をご覧ください。

・ペコジーな、Orarizeロゴ、オーラライズ、ペコぱんだは、株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。
・iOSは、米国その他の国や地域におけるCisco System, Inc. および/またはその関連会社の商標または登録商標です。
・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

※掲載情報と価格は、2026年7月現在のものです。※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

お問合せ先

販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス
広島市中区加古町12番17号

カスタマーサポートセンター
 0120-923-107
フリーコール

2023.09.01XA241-JMS
2025.04.01XA241-RA

販売代理店 株式会社 ジーシー

東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

MA040X2606