

サーチャーAD RKG

歯科用X線撮影装置

シンプル操作で適切に撮影



IP、フィルム、デジタルイメージ用センサー どれでも簡単な操作で、適切に撮影

searcherAD CONTROLLER



■16種類の感度設定

お使いのフィルムやデジタルイメージ用センサーに合わせて、あらかじめ感度を選択・記録することが可能です。

■ワンタッチ切り替え


切り替えが簡単で、照射時間設定に煩わされることがありません。

■使い方は至ってシンプル

撮影する歯と患者さんの体型を選ぶだけで、自動で適切な条件にセッティングされます。



Switch!

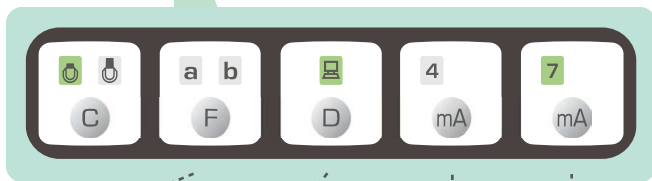

フィルムタイプ 選択スイッチ

フィルムを用いて撮影する際に選択します。感度の異なる2種類のフィルムを切り替えて使用できます。

デジタルモード スイッチ

デジタルイメージ用センサーを用いて撮影する際に選択します。

管電流 選択スイッチ

先点火方式に加え、4mA/7mAの切り替えが可能なので、高感度のデジタルイメージ用センサーやフィルムにも対応できます。



ポジショニングが簡単に行えるようにデザインされたX線ヘッド

歯科用X線撮影装置


サーチャーAD RKG

包装●本体一式

仕様

販売名	サーチャーAD DX-097
一般的名称	アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
認証番号	223ABBZX00137000
クラス分類等	管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
方式	先付け点火、半波整流方式
電源	定格電圧 AC100V 電圧範囲 AC90~110V 電源入力 0.8kVA 周波数 50Hz/60Hz
定格出力	70kVp 4mA/7mA
照射時間	0.02~3.2秒
デューティサイクル	1(照射):50(休止)
エックス線管	D-0712(キャノン製)
公称焦点値	0.7
総ろ過	2.2mmAl当量
冷却	絶縁油自然冷却方式
焦点皮膚間距離	204mm(レギュラーコーン)
照射スイッチ	デッドマン方式
ヘッド質量	7.9kg
重量	51kg
保護形式・程度	クラスI B形装着部

寸法図(1/50縮寸)単位:mm

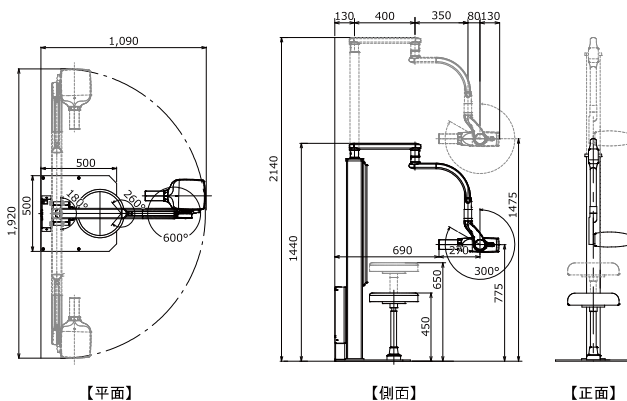

安全にお使いいただくために

◎ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。
◎ご使用前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※掲載情報は2026年8月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **タカラメディカル株式会社**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 兵庫県尼崎市額田町5-15

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store からダウンロード
Google Play でお申し込み
どちらもこちらのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

