

ヒステクト™

歯科用知覚過敏抑制材料

保険適用

最短30秒※で知覚過敏症状にアプローチ


※使用時間：こすり塗り30秒またはトレー装着10分（最長60分）




エアブロー
不要常温保管
OK

知覚過敏症状の刺激を抑制

親水性のジェルの働きによって、有効成分が歯面に効率よく行き渡り、知覚過敏症状を抑制します。

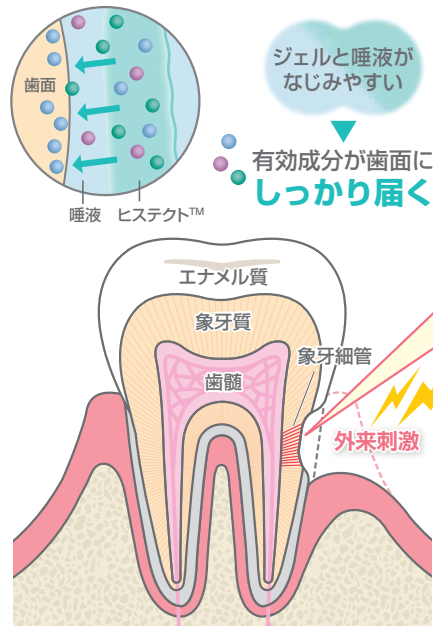

複数成分を配合したジェルが象牙細管を封鎖

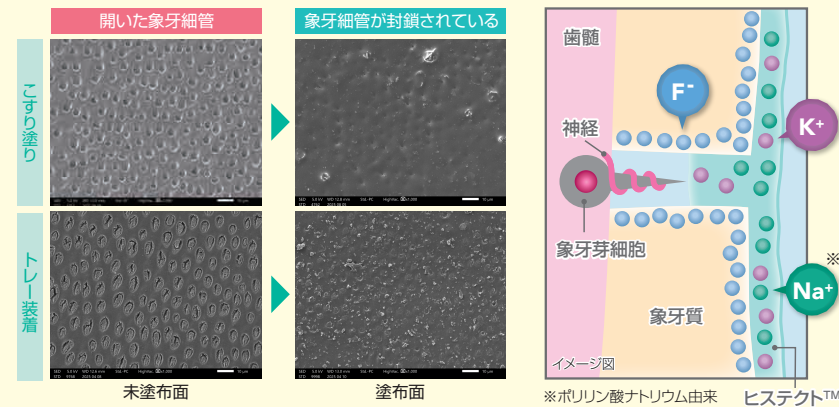

- 【試験方法】
1. 耐水研磨紙を用いて牛歯象牙質を研磨した試験片を準備
 2. 試験片にキャピティコンディショナーで20秒間処理を行い、歯面を水洗
 3. こすり塗り：PTCカップ(1,000rpm)で 30秒間こすりつけるように塗布
 トレー装着：ヒステクト™をのせた歯面にトレーシートで覆い、軽く圧接し10分間静置
 4. こすり塗り：水洗
 トレー装着：トレーシートを除去し、水洗
 5. 試験片を乾燥させ、ヒステクト™未塗布面と塗布面を電子顕微鏡で観察
- ※ポリリン酸ナトリウム由来 ヒステクト™
- ジーシー研究所試験結果

K⁺ 硝酸カリウム5%




知覚過敏症状を抑えます。

F⁻ フッ化ナトリウム0.25% (1130ppmF)

歯質に作用します。


Na⁺ ポリリン酸ナトリウム

再着色しにくくなります。

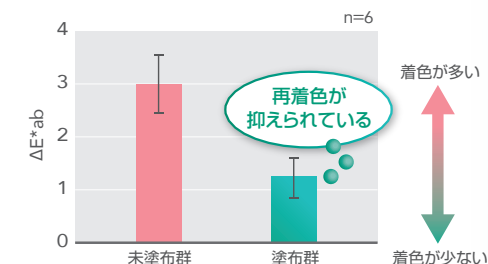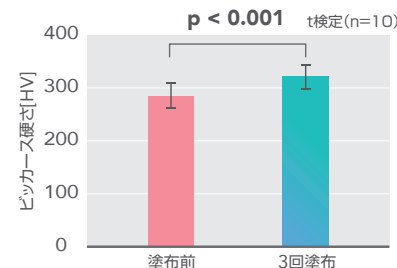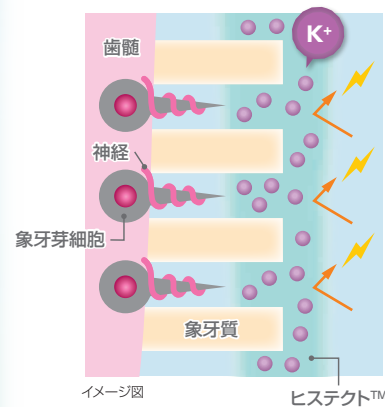


歯面にやさしい

中性 (pH7.2) のジェルで、歯面や補綴装置などの金属への影響が少なくなっています。

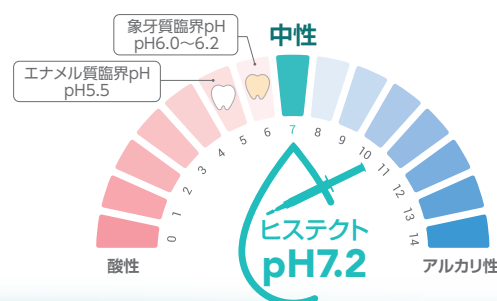

セルフケアにも使用できる

セルフケアに取り入れることで、継続した知覚過敏症状対策ができます。

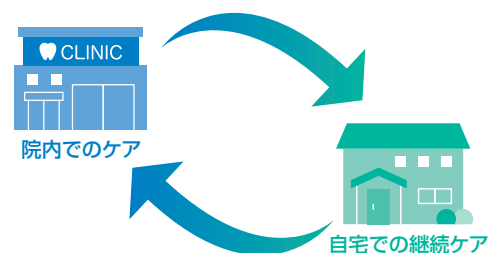

このようなケースに



歯肉退縮

くさび状欠損

クラック

酸蝕症

ホワイトニング後




院内での使い方



塗布部位の唾液やプラークを可能な限り綿球等で拭う。



ラバーカップ*や綿球等にヒステクト™を適量取り、歯面に30秒間こすり塗る。
※回転数目安：1,000 rpm程度

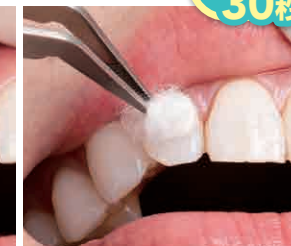

水洗する。



自宅での使い方



1歯ずつ
塗布する場合



塗布部位の唾液を可能な限り綿棒等で拭き取る。



綿棒や歯ブラシ等にヒステクト™を適量のせ、歯面に30秒間こすり塗る。



口腔内を水ですすぐ。



マウストレーを
使用する場合



1歯あたり米粒1~2つ分を目安に、マウストレーにヒステクト™を注入する。



マウストレーを装着する。
(ヒステクト™がはみ出した場合は、拭き取る。)
※装着時間：標準10分・最長60分



口腔内に溜まったヒステクト™と唾液を吐きだし、口腔内を水ですすぐ。マウストレーは、やわらかいブラシで清掃する。



歯科用知覚過敏抑制材料

ジーシー ヒステクト™

常温保管

内容量●2.5mL

包装●1函:1本

歯科用知覚過敏抑制材料 ジーシー ヒステクト
管理医療機器 307AKBZX00062000

知覚過敏症状対策 関連製品



ユニバーサル アドヒーズブ

G-ボンド ユニバーサル

セット

包装●

セット1函:G-ボンド ユニバーサルボトル(5mL)1本、ディスポーザブルアプリーカーII グリーン(50本)1函、ディスポーザブル採取皿20枚、テクニクガイド1部

歯科用象牙質接着材 歯科金属用接着材料 歯科セラミックス用接着材料 歯科用知覚過敏抑制材料 歯科用シーリング・コーティング材 歯面コーティング材(歯科用充填・修復材補助器具) ジーシー G-ボンド ユニバーサル 管理医療機器 307AKBZX00014000

製造販売元 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地



2本包装

包装●

2本包装1函:G-ボンド ユニバーサル
ボトル(5mL)2本



単品包装

包装●

1本包装1函:G-ボンド ユニバーサル
ボトル(5mL)1本

薬用歯みがきジェル

ルシェロ おとなのトータルケア歯みがきジェル

【医薬部外品】 【販売名】ジーシーイオン歯みがきジェル

複数の口腔内リスクを全部まとめてシンプルケア

イソプロピルメチルフェノール(IPMP)

歯肉炎予防、口臭予防

塩化セチルピリジニウム(CPC)

歯肉炎予防、口臭予防

グリチルリチン酸ジカリウム

歯肉炎・歯周炎予防、口臭予防

フッ化ナトリウム(1450ppmF)

う蝕の発生と進行予防

硝酸カリウム

知覚過敏症状予防

ポリリン酸ナトリウム

歯石の沈着を防ぐ、タバコのやに除去

成分●[湿潤剤]ソルビット液、濃グリセリン、プロピレングリコール[溶剤]精製水、エタノール[粘度調整剤]無水ケイ酸、ヒドロキシエチルセルロース[薬用成分]硝酸カリウム、フッ化ナトリウム(NaF:フッ素として1450ppm)、イソプロピルメチルフェノール、塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン酸ジカリウム、ポリリン酸ナトリウム[可溶剤]ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液[香味剤]香料(ビターミントタイプ)[pH調整剤]リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、水酸化ナトリウム[安定剤]エデ酸二ナトリウム[矯味剤]塩化亜鉛[着色剤]黄色4号、青色1号

内容量●90g 香味●ビターミント
包装・希望患者価格●1函:1本=¥1,220(税込)

※6歳未満の手の届かないところに保管し、使用させない。

製造販売元 日本ゼット株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



歯科医院用

薬用歯みがき類

ルシェロ歯みがきペースト ホワイトプレミアムケア

【医薬部外品】 【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイトP

ホワイトニング前後の+αケアに

弱アルカリ性

ステインを分解して浮かせる

Lime粒子®(清掃剤)

ステインをやさしく落とす

ポリエチレングリコール(PEG)400

タバコのやにを溶解除去

モノフルオロリン酸ナトリウム(1450ppmF)

う蝕の発生と進行予防

乳酸アルミニウム

知覚過敏症状予防

成分●[清掃剤]炭酸カルシウム(Lime粒子)[溶剤]精製水[湿潤剤]濃グリセリン[薬用成分]ポリエチレングリコール400、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素1450ppm)[甘味剤]キシリトール[pH調整剤]水酸化ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム[粘度調整剤]カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース[香味剤]香料(グリーンシトラスタイプ)[保存剤]安息香酸ナトリウム[増粘剤]無水ケイ酸
内容量●100g 香味●グリーンシトラス
包装・希望患者価格●1函:1本=¥2,200(税込)

※6歳未満の手の届かないところに保管し、使用させない。

※本製品に配合している原料に由来してペーストが部分的に

黄色く見える場合がございますが、品質に問題はございません。

製造販売元 日本ゼット株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



歯科医院用

ステイン:着色汚れ

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2026年8月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ



JJ067G2608