


Filtek™ Supreme Ultra Flowable Restorative

フィルテック™ シュープリーム ウルトラ
フロー コンポジットレジン

光重合型低粘度ナノフィラーコンポジットレジン

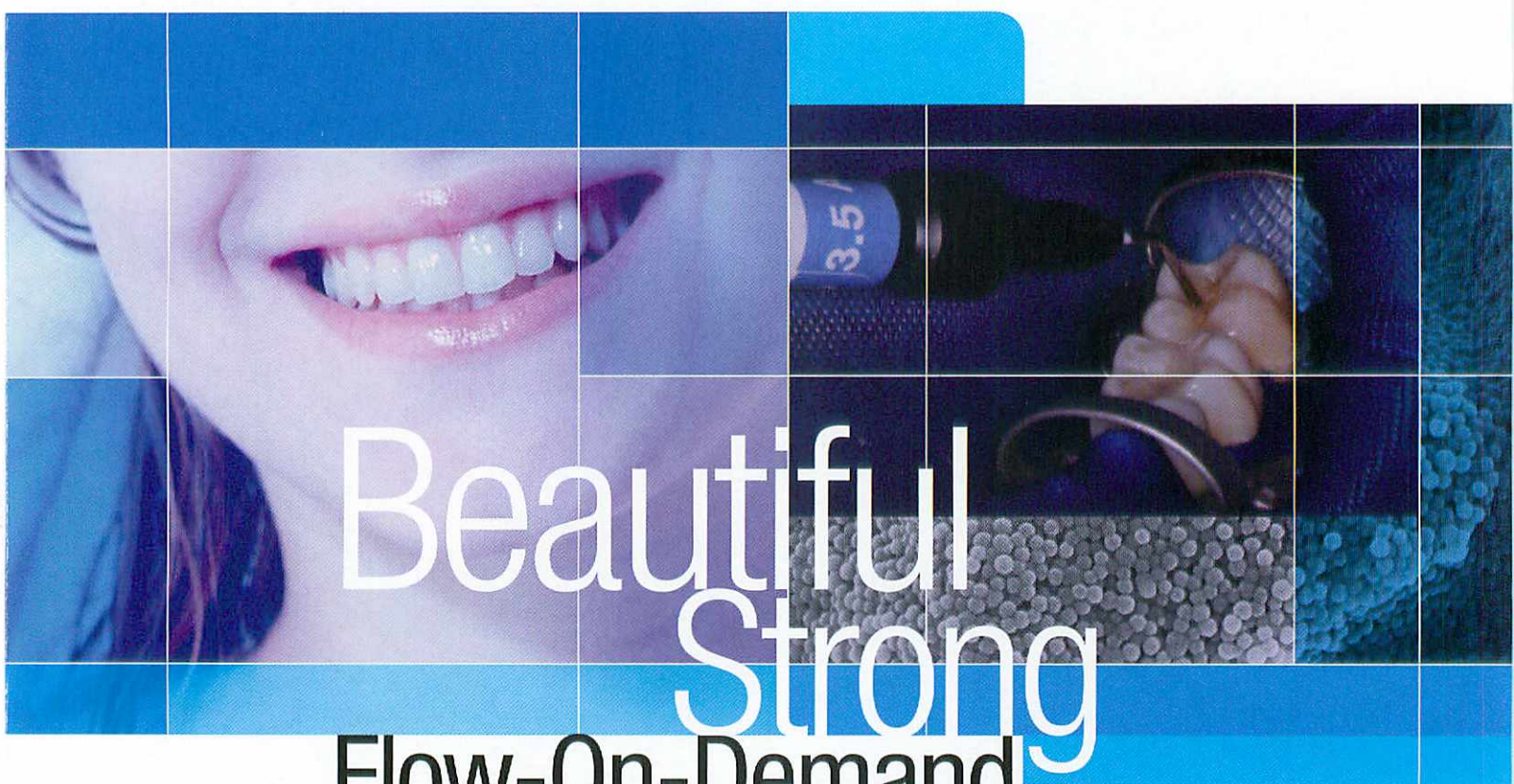

Beautiful
Strong
Flow-On-Demand

より高い**審美性**

優れた**物性**

サッと流れて、キレがよく、ピタッと留まる**操作性**

3M ESPE

3Mのフロアブルコンポジットレジンがさらに使いやすくなりました。

3M独自のナノテクノロジーの進化により、優れた審美性と強度を兼ね備えたフロアブルコンポジットレジンがさらに使いやすくなりました。オンデマンドなペーストの流動性と操作性の良さで、広範囲な症例に対応。簡単でスピーディな美しい修復が可能になりました。歯医者さんの幅広い日常診療の効率化に貢献します。

その1 操作性

流れやすく垂れにくい

適度な粘稠度と流動性があり、窩洞への流し込みが容易で、ねらった箇所にピタッと留まる。アンダーカットや深部の微細な凹部にしっかり届きます。




その2 審美性

自然な色合いと光沢の持続性

超微粒子の“ジルコニアナノフィラー”を配合し、艶やかな滑沢面と光沢の持続性を実現。透明感のある自然な色調を再現。審美性の高い修復ができます。

■滑沢持続性

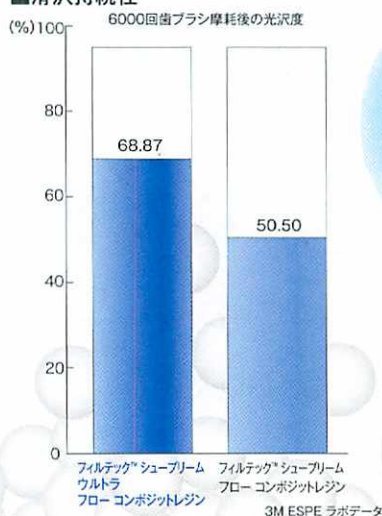

蛍光性を付与!


天然歯に近似した蛍光性を有することで、より自然な修復が可能になりました。

その3 信頼性

低い重合収縮率とX線造影性

重合収縮が小さいので、術後のトラブルを抑えます。また、X線で充填部がはっきりと確認できるので、予後観察が容易です。

■重合収縮率

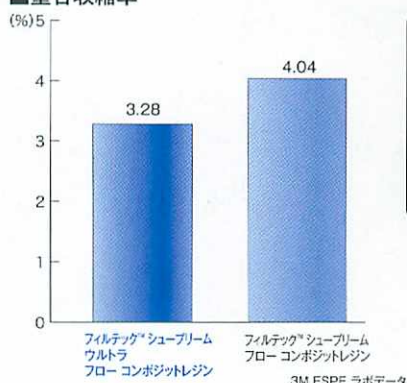

象牙質との境界が明瞭に識別できます。

提供:高橋 純一先生

その4 物性

優れた耐摩耗性




ナノフィラーをクラスターにすることで、フィラーの容積を最大化。臼歯部咬合面にも使用可能な優れた強度と耐摩耗性を有しています。



Filtek™ Supreme Ultra Flowable Restorative

その5 適応症

よりワイドな症例に適応

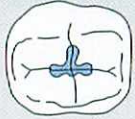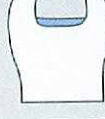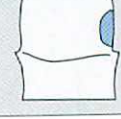I級窩洞 (咬頭を含まない)	Ⅲ級窩洞	V級窩洞 及び 楔状欠損	ベース	ライナー	ポーセレンの 破折修理 (小さな部分)	アンダーカット の埋め立て	テンポラリー クラウン の補修
							

I級窩洞の修復

提供: Dr. Reich Germany



術前



窩洞形成



ボンディング処理後、ウルトラ フローで充填



研磨後

Ⅲ級窩洞の修復

提供: 岩田 淳先生



術前



窩洞形成



ボンディング処理後、ウルトラ フローで充填



研磨後

V級窩洞の修復

提供: 佐氏 英介先生



術前



窩洞形成



ボンディング処理後、ウルトラ フローで充填



研磨後

楔状欠損の修復

提供: 高橋 純一先生



術前



エナメル質にベベル形成



ボンディング処理後、ウルトラ フローで充填、研磨

幅広い症例に対応する豊富なシェードバリエーション 透明感のある11色と遮蔽性のあるオパーク1色を揃えました。

全12色

標準シェード(ボディシェード)

標準的な透明度



オパークシェード(デンティンシェード)

不透明で遮蔽性に優れる
ベースやライナーに



標準シェード(ボディシェード)									ホワイトニングシェード		オパークシェード (デンティンシェード)
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	C2	D2	W	XW	OA3

●このシェードは厚さ1mmの実物写真です。実際の色調はコンポジットレジン厚みと背景色により変化して見えます。●実際の色調を参考にされる場合は、該当するコンポジットレジンと光重合し、ご確認ください。
●充填厚みおよび照射時間は、2.0mmで20秒です。OA3のみ1.5mmで40秒です。

フィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン

一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン

内 容: シリンジ1本(2g)、注入チップ20個、
シェードカード、シェードラベル

希望医院価格: 3,000円(本体価格)

認証番号: 222AKBZX00110000

全12シェード製品番号: 6032A1、
6032A2、6032A3、6032A3.5、
6032A4、6032B1、6032B2、
6032C2、6032D2、6032W、
6032XW、6032OA3



2011年
7月発売予定

同色3本セット

希望医院価格 6,300円(本体価格)
対象シェード: 全5色(A1、A2、A3、A3.5、A4)

付形性・滑沢性・審美性・強度・耐久性に優れた 光重合型ナノフィラーコンポジットレジン

フィルテック™ シュープリーム ウルトラ コンポジットレジン

一般的名称: 歯科充填用コンポジットレジン 保険適用

内容: シリンジ1本 / 1袋(4g)

希望医院価格: 2,700円(本体価格)

認証番号: 221AKBZX00174000

製品番号: 5916A2D、5916A3D、
5916A4D、5916A1B、5916A2B、
5916A3B、5916A3.5B、5916A4B、
5916B2B、5916A2E



ボンディング材・混和皿・ブラシが一体になった 使い切りタイプの接着材

アドバー™ イージー ボンド セルフエッチ アドヒーズブ ユニドースタイプ

一般的名称: 歯科用象牙質接着材

内容: 100本(11mL)

希望医院価格: 12,000円(本体価格)

認証番号: 220AKBZX00113000

製品番号: 41249

※ユニドースタイプ50本(5.5mL)入り

希望医院価格: 6,400円(本体価格)

製品番号: 41249TR もあります。



販売名: アドバー イージー ボンド セルフエッチ アドヒーズブ

●希望医院価格はすべて本体価格です。本カタログに掲載の情報は2011年2月現在のものです。●ご使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。
●3M、ESPE、Filtek、フィルテック、アドバーは3M社またはその関連会社の商標です。

3M ESPE

スリーエム ヘルスケア株式会社
歯科用製品事業部

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2010. All rights reserved
DEN-752-A(021180)IT

当事業部取扱製品のお問い合わせは
3M ESPE コールセンター

0120-332-329

※受付時間: 9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、
03-3709-9739をご利用ください。