# **RelyX<sup>™</sup> Unicem 2 Automix** Self-Adhesive Resin Cement

リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス


歯科接着用レジンセメント



術後疼痛の発生率が低いレジンセメント新登場!



### セラミック インレーの接着 (臨床写真提供:横須賀市ご開業 小池軍平 先生)

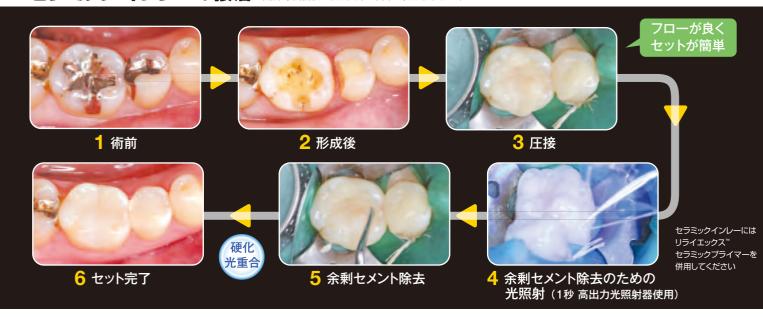

# 術後疼痛の発生率が低い!

10

100

1000 24時間

10000

28日

100000 (分)

pH measurement.3M FSPF internal data



### ジルコニアブリッジの接着(臨床写真提供:大阪市ご開業 南昌宏 先生)



### ハイブリッド レジン クラウンの接着 (臨床写真提供:台東区ご開業 大谷一紀 先生)







気泡が入りにくく、いつでも安定した粘稠度です。

#### ■物性一覧

曲げ強度(MPa) 99 圧縮強度(MPa) 291 弾性係数(GPa) 6.6 被膜厚み(μm) 13 溶解度(μg/mm<sub>3</sub>) 0

### ■硬化時間

#### ■光重合での硬化

- 余剰セメント除去のための光重合:2秒間
- 最終光重合:20秒間


(高出力光照射器をご使用の場合照射時間は半分) ■化学重合での硬化

- 余剰セメント除去開始: 練和開始3分後
- 硬化時間:練和開始6分後

## インプラントジルコニアの装着 (臨床写真提供:福岡市ご開業 松永興昌 先生)




## ゴールドクラウンの接着 (臨床写真提供:横浜市ご開業 吉村英則 先生)

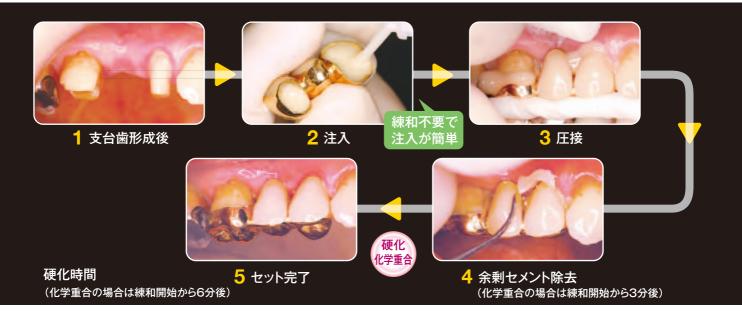

# 前処理が不要、多用途で強い接着力!

この1本で、メタル・セラミックス・ハイブリッドレジン・ジルコニアなど様々な症例にご使用いただけます。

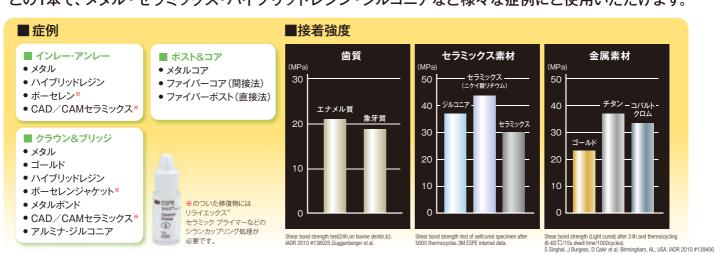

### 008373645

### コアの接着



3M ESPE のセメント技術が世界で評価されました


DENTAL ADVISOR





2010 [The Dental Advisor]誌7年間臨床実績 Exellent +++++

#### ■根管象牙質への接着強度

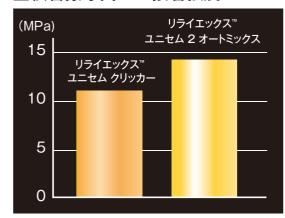

出典: 大竹志保先生 植田洋二先生 犬塚麻美先生 三浦宏之教授

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 口腔機能再構築学系専攻 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野

が映力法: アイソメットに でEUより歯配り様に抜動。 #2根管形成パーにてでEUより 1070温度100%に1時間保管後、 370掲載100%に1時間保管後、 370掲載370米に11歯につき 歯冠側より8試料切り出し。 接着面積が1mm²となるよう ダンベル型にトリミング。 クロスヘッドスピード1.0mm/min

> AZ AZ

> > A2 A2

# コアのセットにも使える!

リライエックス™ ユニセム 2 オートミックスは

コアのセットにも使えます。



◀ミキシングチップセメント用ワイドの先端に
エンド用チップを装着

3M ESPE

## ペーストの流れが良い

エンド用チップを使用する事で、根管内に注入しやすくなります。

■根管内への注入比較


(樹脂製の根管模型にファイバーポストを挿入した試験)

リライエックス<sup>™</sup> ユニセム 2 オートミックス を使用 ▶ 気泡などが入りにくい





ファイバーポスト 断面図

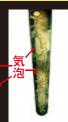

ファイバーポスト

(原寸大)

√ 従来方法 気泡などによる 隙間が確認できる

R.Watzke,M.Naumann:Homogeneity, Brisbane, Australia

## 親水性から疎水性に変化する



- 歯質となじむので強く接着できます。
- 根管内、臼歯部の湿潤環境でも接着できます。

水分の影響を受けないので安定し 長期の耐久性に優れます。





リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス バリューパック (3本パック) 歯科接着用レジンセメント A2ユニバーサル 製品番号:56849

トランスルーセント 製品番号:56858

- \_\_\_\_\_\_ 内容:●シリンジ(8.5g×3本)
  - ●ミキシングチップセメント用(30本)
  - ●ミキシングチップセメント用ワイド(20本)
  - ●エンド用チップセメント用(15本)
  - ●□腔内注入チップヤメント用(5本)





リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス 歯科接着用レジンセメント

A2ユニバーサル 製品番号: 56846 製品番号: 56847 トランスルーセント 製品番号:56848

- ●ミキシングチップセメント用(15本)
- ●ミキシングチップセメント用ワイド(5本)
- ●エンド用チップセメント用(5本)

希望医院価格:¥12,000



リライエックス™ ユニセム 2 ミキシングチップ セメント用 内容: ●ミキシングチップセメント用(30本) 製品番号: 56851 希望医院価格: ¥3,000



ミキシングチップ セメント用ワイド 内容: ●ミキシングチップセメント用ワイド(20本) 製品番号: 56856 希望医院価格: ¥2,000



リライエックス™ ユニセム 2 エンド用チップ セメント用

内容:●エンド用チップセメント用(15本) 製品番号:56855 希望医院価格:¥750



リライエックス™ ユニセム 2 口腔内注入チップセメント用

内容:●口腔内注入チップセメント用(15本) 製品番号:56852 希望医院価格:¥750



リライエックス セラミック プライマー

製品番号: 2721 希望医院価格: ¥8,100

販売名:リライエックス ユニセム 2 オートミックス 一般的名称:歯科接着用レジンセメント 認証番号:223AKBZX00006000 販売名:リライエックス セラミック ブライマー 認証番号:220AKBZX00144000 掲載の内容および希望医院価格は、2011年6月のものです。希望医院価格は本体価格です。仕様等は製品改良のため予告なく変更する事がありますので予めご了承ください。 3M. ESPE, BelvX. リライエックスは3M社またはその関連会社の商標です。

### **3M** ESPE

スリーエム ヘルスケア株式会社 歯科用製品事業部

東京都世田谷区玉川台2-33-1 http://www.mmm.co.jp/hc/dental/

Please Recycle. Printed in Japan © 3M 2011. All rights reserved DEN-790-A(061170)IT

当事業部取扱製品のお問い合わせは

3M ESPE コールセンター

oo.0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金(土·日·祝を除く) ※フリーダイヤルが繋がらない場合は、 03-3709-9739をご利用ください。