


Clinpro™ Sealant

小窩裂溝封鎖材

クリンプロ™ シーラント

NEW! シーラント

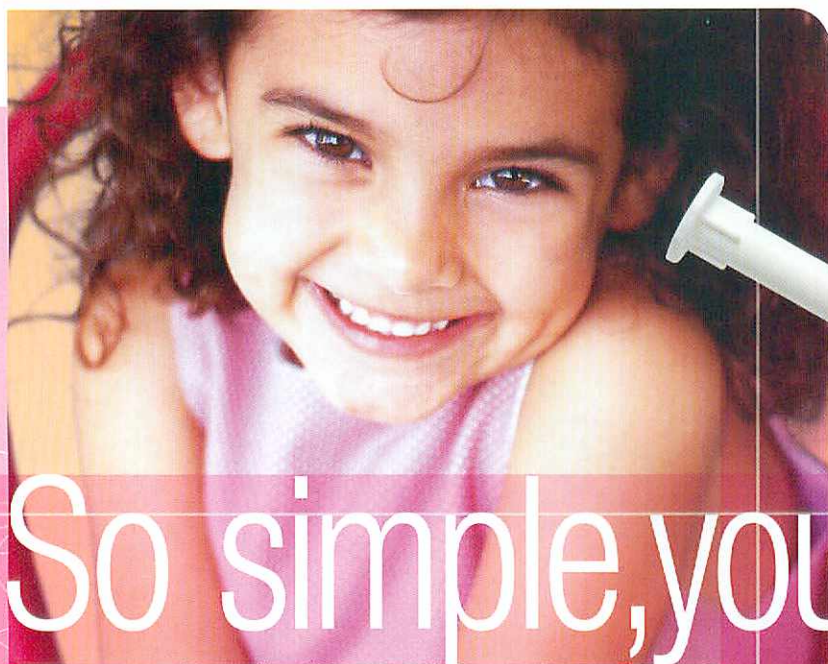

So simple, you'll  
be tickled pink.



極細チップと使いやすいシリンジタイプ  
光照射で色が変わるシーラント新発売

**3M** ESPE



# 新しい使いやすさ! クリンプロ™ シーラント

## Point 1 ペーストの色が変化します



## Point 2 歯に直接、狙い通りに塗布できるシリンジタイプ

小児の口腔内にも直接塗布しやすい、手軽でコンパクトなシリンジです。



## Point 3 極細先端チップ

フローが良いので、軽い押し出し圧で微細な小窩裂溝にも狙い通りに適量塗布できます。

クリンプロ™シーラントの極細先端チップ  
(管の直径約0.4mm)



レジン(当社従来品)の先端チップ  
(管の直径約0.9mm)



### その他の特長

冷蔵  
不要

常温保管できます

攪拌  
不要

振らずにすぐ使えます

フッ素  
徐放

フッ素を徐放します



折り曲げて使えます

スターターキットに付属のスコッチボンド™ エッチング ゲル シリンジ タイプも、コンパクトで使いやすいシリンジです。





■大臼歯小窩裂溝への術式

写真提供:吉田 昊哲 先生(南山手小児歯科、東京歯科大学小児歯科学講座非常勤講師)



1.術前 (歯面清掃後)



2.エッチング

シリンジタイプのスコッチボンド<sup>®</sup> エッチャントを使用。的確に塗布できる。



3.水洗・乾燥後



4.クリンプロ<sup>™</sup>シーラントを填塞

ピンク色で塗布範囲がわかりやすい。

先端チップが細く必要最小限な量を裂溝に填塞できる。



5.光照射

(高出力LED:10秒、ハロゲン:20秒)



6.光照射後

白色に変化するので歯になじんで目立たない。

■1年2ヶ月後も脱落していない症例



シーラント直後



術後1年2ヶ月経過



7.術後 (未重合層をふき取り、咬合チェック後)

クリンプロ<sup>™</sup>シーラントの使用感を実際に試していただきました。

パーセント値は、(満足)(やや満足)の合計です

<p>気泡がなくて満足</p> <p><b>88%</b></p>	<p>色が変わるのが良い</p> <p><b>96%</b></p>	<p>ノズルの細さが満足</p> <p><b>92%</b></p>	<p>塗布範囲がわかりやすいのでミスが少ない</p> <p><b>98%</b></p>
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--



グローバルに展開する  
 予防のクリンプロ™ ブランド。  
 スリーエムヘルスケアは、  
 予防歯科を応援しています。



■製品概要

クリンプロ™ シーラント スターターキット

内容：シーラント シリンジ(1.2mL)×1本  
 シーラント ディスペンシング チップ(10個)  
 スコッチボンド™ エッチング ゲル シリンジ タイプ(3mL)×1本  
 エッチャント チップ(25個)

製品番号：12646J

希望医院価格：8,600円



■補充品



クリンプロ™ シーラント チップ

内容：シーラント ディスペンシング チップ(10個)

製品番号：12626T

希望医院価格：700円



スコッチボンド™ エッチング ゲル シリンジ タイプ

内容：エッチング ゲル シリンジ タイプ(3mL)×2本

エッチャント チップ (25個)×2パック

製品番号：7523

希望医院価格：9,000円

販売名：クリンプロ シーラント 認証番号：222AKBZX00098000

販売名：スコッチボンド エッチング ゲル シリンジ タイプ 認証番号：20400BZY00775000

※希望医院価格、キャンペーン特別希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。掲載の情報は2012年4月現在のものです。

3M、ESPE、Clinpro、クリンプロ、スコッチボンドは、3M社またはその関連会社の商標です。

詳しい情報は… **Let's Access!**

3M ESPE 歯科用製品ホームページ

3M 歯科

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

検索

**3M ESPE**

スリーエムヘルスケア株式会社

歯科用製品事業部

〒158-8583

東京都世田谷区玉川台2-33-1

Please Recycle. Printed in Japan

© 3M 2012. All rights reserved

DEN-868-A(051290)IT

当事業部取扱製品のお問い合わせは

3M ESPE コールセンター

**0120-332-329**

※受付時間：9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合は、

03-3709-9739をご利用ください。