

Vitremer™ 2 Paste

ビトレマー™ 2 ペースト

合着用グラスアイオノマー系レジンセメント



Speedy & easier
is Standard in the future

新しくなったビトレマー™ 2 ペーストが
診療スタイルを変える!
補綴物のセットがもっと簡単&効率的に。



NEW!

3M ESPE

新しくなった ビトレマー™ 2 ペーストが 診療スタイルを変える!

補綴物のセットがもっと簡単&効率的に。

EASY
Clean Up

各面につき
光照射5秒!で
余剰セメントの除去が可能になりました!



光照射で余剰セメントを硬化できるため、
症例に合わせたタイミングで簡単に除去!



ポロツと
とれる

写真提供: 細田 透 先生(東京都ご開業)


探針やデンタルフロスで、
ポロツと塊のまま除去できます。

光照射をしなくても、
化学重合によりセット後2分で
余剰除去できます。

(最終硬化: 補綴物セット後5分)

■ 光照射が、診療スタイルを変えます!

ビトレマー™ 2 ペースト の化学重合と光照射での比較

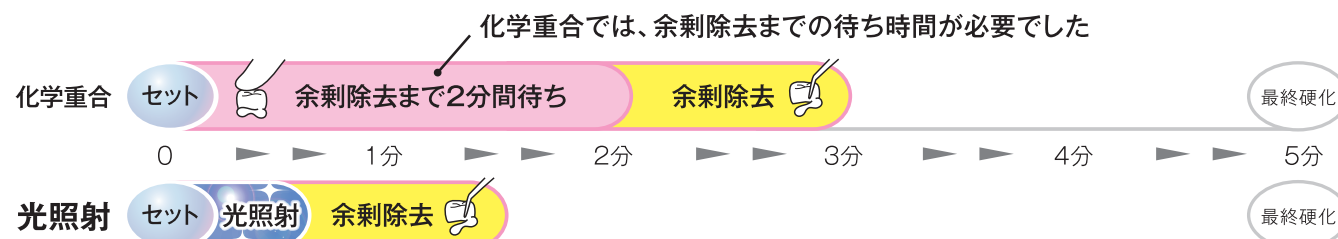


手を止めず 余剰除去までスピーディに、あとはフリータイム!!

待ち時間が
いない!



■ 光照射が、困った症例に役立ちます!

唾液の多い下顎臼歯部のセット

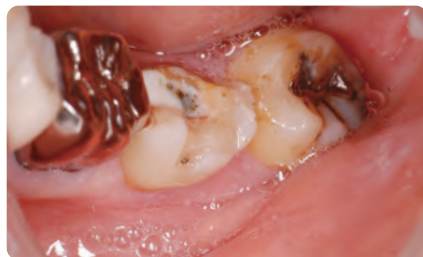

写真提供: 松永 興昌 先生(福岡県ご開業)

唾液による影響を受ける前にすばやく
余剰セメントを硬化、除去できます。

ブリッジのセット



写真提供: 大谷 一紀 先生(東京都ご開業)

ボンテックの下や鼓形空隙の余剰セメント
を半硬化の状態ですばやく除去できます。

連続した補綴物のセット




写真提供: 松永 興昌 先生(福岡県ご開業)

余剰セメントの硬化が進みやすい多数歯セット
の場合でも、硬化をコントロールできます。

手をとめることなく、スピーディな
セメンテーションを実現します!

術式

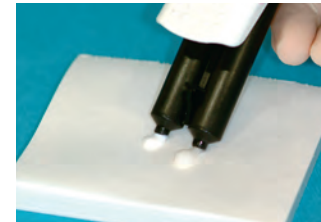


採取

レバーを1~2回押すだけ。
誰でも簡単・確実に
採取できます。

練和

20秒

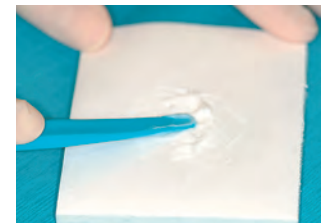

塗布

操作余裕時間は
2分30秒




セット



光照射 ※

各面につき5秒照射。

※または化学重合でセット後2分

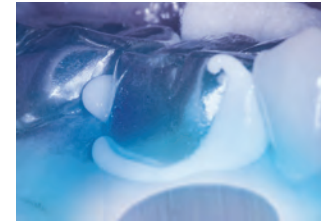

余剰セメント除去

探針などで、ポロツと
カンタンに除去できます。



最終硬化

補綴物セット後
最終硬化5分




合着完了

3Mテクノロジーによる
高い接着力と優れた耐久性


ビトラボンド コポリマーと、ジルコニアシリカフィラーを配合。
エナメル・象牙質への高い接着力と優れた耐久性を実現。

高い接着力を実現しました(当社従来品比)

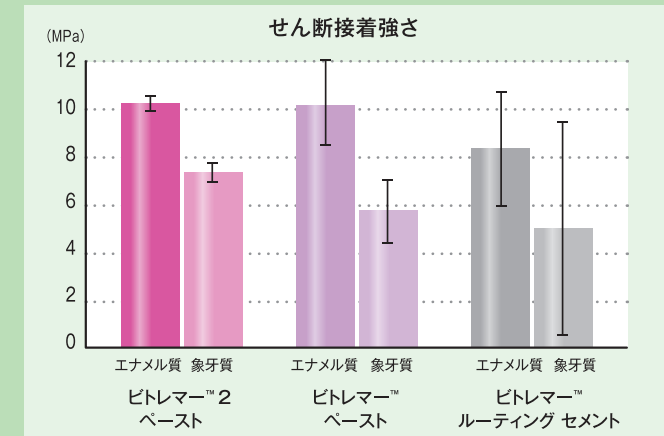

出典: 3M ESPE 社内データ (被着体: 牛歯)


優れた接着耐久性を有します

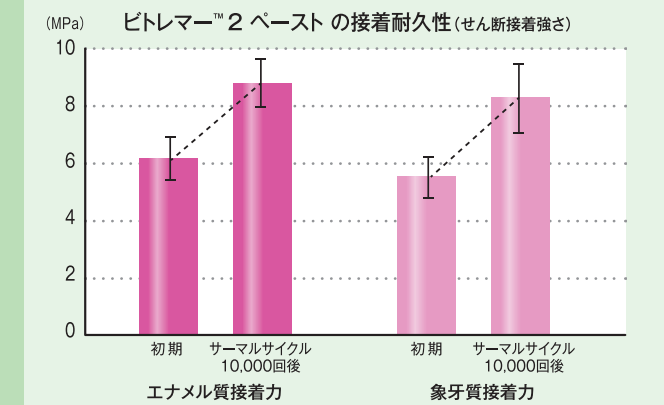

出典: 岡山大学大学院 生体材料科学分野 入江正郎先生 他 (被着体: 人抜歯歯)

フッ素徐放性

グラスアイオノマー系レジンセメントの特長の一つ、
フッ素の徐放性を有しています。

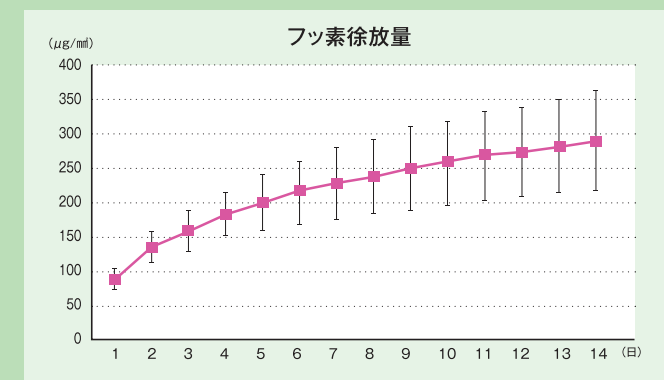

出典: 東京歯科大学 有床補綴学講座 櫻井 薫 教授 他 / 日本補綴歯科学会第122回学術大会 発表より抜粋

合着には ビトレマー™ 2 ペースト 合着用ガラスアイオノマー系レジンセメント



ビトレマー™ 2 ペースト トライアルパック
製品番号: 3527JTK

内容

- ビトレマー™ 2 ペースト
クリッカー™ ディスペンサー (11g) × 1本
 - 練板紙 × 1冊
- 希望医院価格 ¥6,800

▼ 残量が分かりやすいインジケーター付き。



ビトレマー™ 2 ペースト
スタンダードパック
製品番号: 3527J

内容

- ビトレマー™ 2 ペースト
クリッカー™ ディスペンサー
(11g) × 2本
 - 練板紙 × 2冊
- 希望医院価格 ¥12,000



ビトレマー™ 2 ペースト
ジャンボパック
製品番号: 3527JB

内容

- ビトレマー™ 2 ペースト
クリッカー™ ディスペンサー
(11g) × 5本
 - 練板紙 × 2冊
- 希望医院価格 ¥27,500

関連製品

接着には

リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス
歯科接着用レジンセメント

リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス



- 製品番号: 56846 (A2ユニバーサル)
製品番号: 56847 (A3オベーク)
製品番号: 56848 (トランスルーセント)

内容

- シリンジ (8.5g) × 1本
 - ミキシングチップセメント用 × 10本
 - ミキシングチップセメント用ワイド × 10本
 - エンド用チップセメント用 × 10本
- 希望医院価格 各 ¥12,000

リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス パリユーパック (3本セット)



- 製品番号: 56849 (A2ユニバーサル)
製品番号: 56857 (A3オベーク)
製品番号: 56858 (トランスルーセント)

内容

- シリンジ (8.5g) × 3本
 - ミキシングチップセメント用 × 30本
 - ミキシングチップセメント用ワイド × 20本
 - エンド用チップセメント用 × 15本
 - 口腔内注入チップセメント用 × 5本
- 希望医院価格 各 ¥29,400

セメントの臨床的使い分け	合着には	接着には
	ビトレマー™ 2 ペースト	リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス
メタル インレー・アンレー	◎	○
メタル クラウン・ブリッジ	◎	○
メタル コア	◎	◎
メタルボンド クラウン・ブリッジ	◎	○
ジルコニア クラウン・ブリッジ	○	◎
ポーセレン インレー・アンレー	—	◎
ポーセレン ジャケット クラウン	—	◎
ハイブリッド セラミックス インレー・アンレー	—	◎
ハイブリッド セラミックス クラウン	—	◎
硬質レジン ジャケット クラウン	—	◎
ファイバーコア (間接法)	—	◎

●症例に応じて、接着力、経済性、審美性を考慮して使い分けをお勧めします。 ◎おすすめ ○使用可能 —使用不可
●詳しくはセメンティングマニュアルをご覧ください。

販売名: ビトレマー 2 ペースト 一般名称: 歯科合着用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント 認証番号: 224AKBZX00107000

販売名: リライエックス ユニセム 2 オートミックス 一般名称: 歯科接着用レジンセメント 認証番号: 223AKBZX00006000

※希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。掲載の情報は2013年6月現在のものです。

3M、ESPE、Vitremer、ビトレマー、リライエックス、クリッカーは、3M社またはその関連会社の商標です。

詳しい情報は... **Let's Access!**

3M ESPE 歯科用製品ホームページ

3M 歯科

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

検索

当事業部取扱製品のお問い合わせは

3M ESPE コールセンター

0120-332-329

※受付時間 / 9:00~17:00 月~金 (土・日・祝を除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合は、
03-6409-3157をご利用ください。

3M ESPE

スリーエム ヘルスケア株式会社
歯科用製品事業部

Please Recycle. Printed in Japan.
Copyright © 2013 3M. All Rights Reserved.
DEN-991-AN(0513100.3)ON