


3M™ ESPE™

圧排ペースト スターターパック

複雑な圧排作業を楽にする圧排ペーストです。
より確実な印象採得のためにご使用ください。

- 塩化アルミニウムを配合したカプセル入りのペースト。
- 歯肉溝に挿入する先端部が細く、丸いため挿入し易い。
- 塗布後は水洗で洗浄可能（ペーストは水溶性）。
- 歯肉圧排糸との併用も可能。
- 縁下でのマージン形成時、クラウンセット時等にも使用可能。

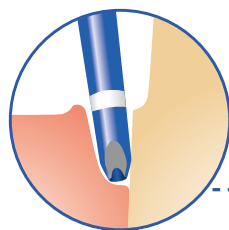

歯肉溝に
挿入しやすい
先端部分



**圧排ペーストと
ディスペンサーを組み合わせた
スターターパックをおすすめします。
単品で購入するより1,200円お得です。**

3M™ ESPE™ 圧排ペースト スターターパック

内容

- 3M™ ESPE™ 圧排ペースト
トライアルパック (3個入) × 1パック
- レストラティブディスペンサー × 1個

製品番号: 56940S

希望医院価格: 8,200円

製品と
ペーストの
原寸大



写真提供: 東京都ご開業 岡口 守雄 先生

使用方法



レストラティブ ディスペンサーにセットして試し出しをします。



洗浄・乾燥した歯肉溝に製品先端の白いラインを目安に挿入します。



ペーストを注入します。



歯肉圧排糸との併用も可能です。



注入後2分おきます。



流水によりペーストを洗い流します。

補充品



3M™ ESPE™ 圧排ペースト トライアルパック

内容: 3個
製品番号: 56940
希望医院価格: 1,500円

3M™ ESPE™ 圧排ペースト レギュラーパック

内容: 25個
製品番号: 56941
希望医院価格: 11,800円

3M™ ESPE™ 圧排ペースト バリュースタック

内容: 100個
製品番号: 56942
希望医院価格: 45,000円

レストラティブ ディスペンサーで
ご使用ください。
(他社製品でも使用可能)

関連製品



レストラティブ ディスペンサー

内容: 1個
製品番号: 5707SD
希望医院価格: 7,900円

クラウンの印象採得時における歯肉圧排法



1 支台歯形成後、印象採得を確実にするための歯肉圧排を行う。



2 3M™ ESPE™ 圧排ペーストで歯肉圧排する。先端を歯肉溝に挿入し、広げるようにゆっくりとペーストを注入していく。



3 ペースト注入後、2～5分間静置する。




4 スリーウェイシリンジを用いてペーストを洗い流す。ペーストは水溶性のため水洗で除去できる。



5 エアスケーラー(ソニックフレックス クリーンフォルダー48 及びフラット型ブラシ小:カボデンタルシステムズジャパン株式会社)を用いて確実に洗い流す。



6 内縁上皮が外側に押し広げられ、歯肉縁下のフィニッシュラインが明瞭に確認できる。上皮付着の損傷は無く、出血や浸出液は認められない。

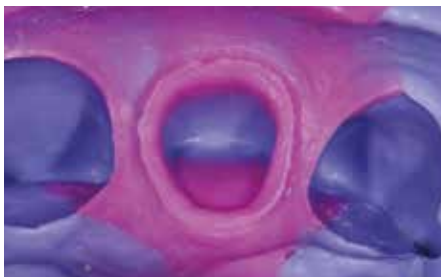

7 インプリント™ 4 印象材 ソフトトレー ボディとライト ボディにて印象を採得。



8 補綴物装着後。歯肉の退縮は見られない。

この症例は、
動画でご覧いただけます。
下記ホームページへ!

3M 圧排ペースト

検索

ブリッジの印象採得時における歯肉圧排法



1 今回は、圧排系とペーストを併用して歯肉圧排する。支台歯形成後圧排系にて一次圧排し、その上から3M™ ESPE™ 圧排ペーストを注入する。



2 ペースト注入後、2～5分間静置してから水洗で洗浄除去し、エア乾燥する。正確な印象を採取し易い圧排処理が完了している。



3 インプリント™ 4 印象材 ソフトトレー ボディとライト ボディにて印象を採得した。

販売名：3M ESPE 圧排ペースト 届出番号：13B1X10109000253
販売名：レストラティブ ディスペンサー 届出番号：13B1X10109000161
販売名：インプリント 4 印象材 認証番号：225AKBZX00168000
価格は、すべて税抜き本体価格です。掲載の情報は、2015年6月現在のものです。
3M、ESPE、インプリントは、3M社またはその関連会社の商標です。

詳しい情報は… **Let's Access!**

3M ESPE 歯科用製品ホームページ

3M 歯科

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

検索

3M

スリーエム ジャパン株式会社

ヘルスケアカンパニー

歯科用製品事業部

Please Recycle. Printed in Japan.
Copyright © 2015 3M. All Rights Reserved.
DEN-1216-AJ(061535)PN/MS

当事業部取扱製品のお問い合わせは

3M ESPE コールセンター

0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3157をご利用ください。