

3M Science.
Applied to Life.™

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブ

歯科用象牙質接着材 / 歯科セラミックス用接着材料 / 歯科金属用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材

Scotchbond™ Universal Plus Adhesive





シンプルな術式を可能にする 1ステップユニバーサルボンディング

3M独自の「VMSテクノロジー」が正当進化。スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブのもつ「汎用性」をそのまま継承しています。スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーシブは歯質・各種材料に接着可能なので、前処理材はこれ1本。各種専用プライマーが不要です。


3M独自のVMSテクノロジー



症例や被着体に合わせて使用する材料や術式を変える必要がなく、在庫管理が容易です。



この
1本だけ!

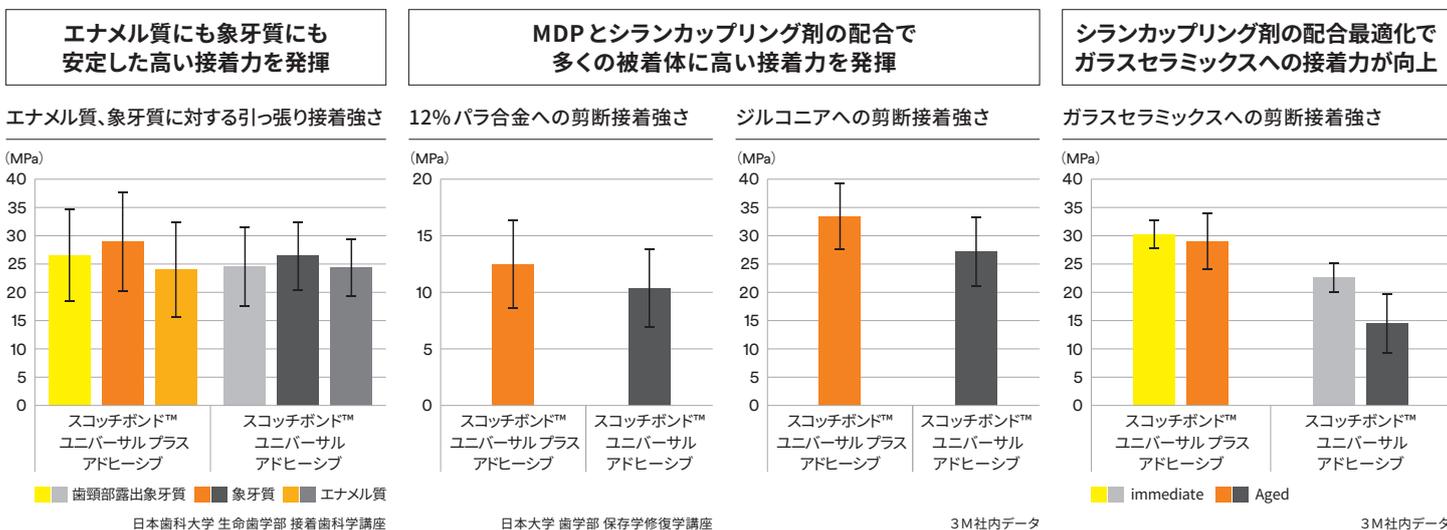

基本術式 (コンポジットレジン充填修復)

写真提供: 日本大学歯学部 宮崎 真至 教授



1 アドヒーシブを20秒塗布。



2 弱いエアでアドヒーシブが動かなくなるまで約5秒間乾燥。



3 10秒間光照射。(ハロゲンランプ照射器の場合)



4 レジン充填、形態修正・術後。

対応可能な被着体


エナメル質 | 象牙質 | コンポジットレジン | ジルコニア | アルミナ | ガラスセラミックス | 金属



これまでの汎用性に、新たな付加価値をプラス

+ 優れた“ぬれ性”と“歯質浸透性”

粘度の低減による優れたぬれ性と歯質浸透性によって、窩壁部や複雑な窩洞にも塗り広げやすく、塗りムラや液だまりなどの発生リスクを抑えます。均一な被膜（約 5µm）は審美修復にも適します。

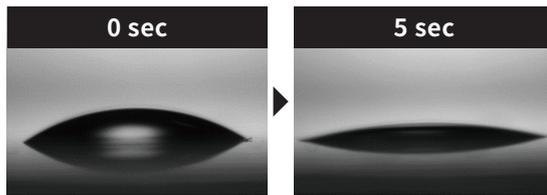

3M 社内データ




3M 社内データ


+ 湿潤環境下でも安定した接着力

ビトラボンド コポリマーの配合最適化によって、乾燥が難しい歯面においても安定した接着力を発揮します。う蝕影響象牙質へもしっかり浸透し、健全象牙質と同等の接着力を発揮します。

湿潤環境下：ヒト抜去歯象牙質に対するせん断接着強さ

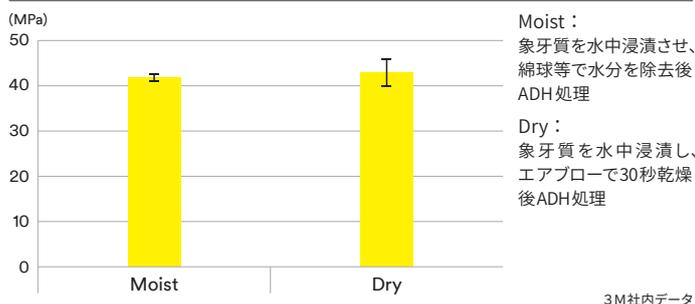

う蝕影響象牙質：ヒト抜去歯象牙質に対するせん断接着強さ

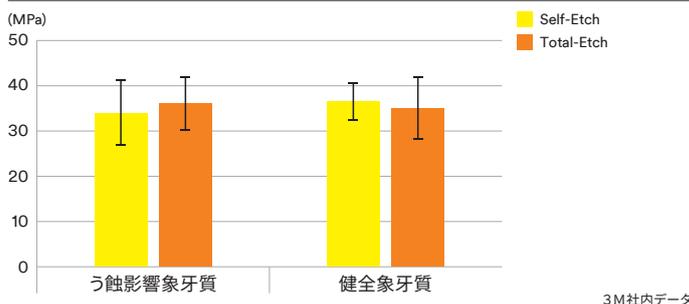

+ 象牙質と同等の X 線造影性付与


業界初* 象牙質と同等の X 線造影性を有しており、二次う蝕の診断や経過観察を助けます。

*一液性のユニバーサルボンディング材として、業界ではじめて製品化しました (3M 社内調べ 2021年1月時点)



知覚過敏処置も、窩洞・支台歯のシーリング材としても使用可能 保険適用

ボンディング材が象牙細管に浸透し、レジンタグを形成。象牙細管を封鎖します。

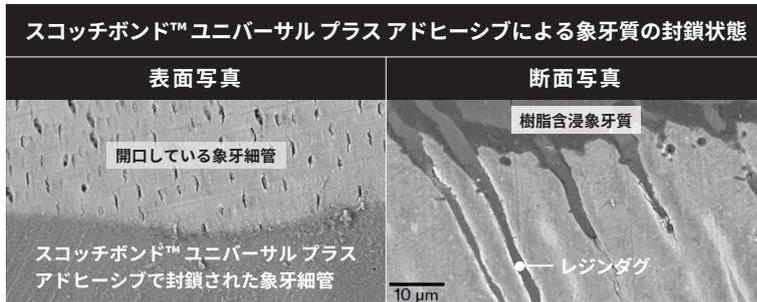

1本で多用途

CR 充填用接着材のほかリライエックス™ ユニバーサルレジンセメントの前処理剤、知覚過敏抑制材料、窩洞・支台歯のシーリング剤としてご利用いただけます。



使用可能時間 30分 (遮光下)

揮発性の低い、水とエタノールを溶媒としているため、滴下後約 30分使用可能。複数窩洞の処置にも余裕をもって対応できます。



常温保管できるので、いつも手元に

品質管理の煩わしさがなく、いつでも安心して使用でき、ケアタイムも短縮できます。



NEW ボトルデザイン

キレがよく液だれしにくいボトルデザインです。個包装のユニドースタイプも準備しています。

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ

新発売キャンペーン

キャンペーン期間：2021年2月22日(月)～5月31日(月)

ボトルタイプ

内容：

- ・ボトル(5mL)×1本
- ・ボトル(1.5mL)×1本

製品番号：

41294JSP



ボトル(1.5mL)
×1本

ユニドースタイプ

内容：

- ・ユニドース×100本
- ・ユニドース×10本

製品番号：

41298JSP



ユニドース
×10本

キャンペーン希望医院価格

12,600円

キャンペーン希望医院価格

12,600円

通常品 (近日発売予定)



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ イントロキット

内容：

- ・ボトル(5mL)×1本
- ・ディスポーザブル アプリケーターブラシ (XSサイズ)×50本
- ・ディスポーザブル 混和皿×48枚

製品番号：**41293J**

希望医院価格：15,800円



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ ボトルタイプ

補充品

内容：ボトル(5mL)×1本
製品番号：**41294J**
希望医院価格：12,600円

ダブルパック

内容：ボトル(5mL)×2本
製品番号：**41294W**
希望医院価格：22,700円



スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ ユニドースタイプ

100本入(11mL)

内容：ユニドース×100本
製品番号：**41298J**
希望医院価格：12,600円

50本入(5.5mL)

内容：ユニドース×50本
製品番号：**41297J**
希望医院価格：6,800円

スコッチボンド™ ユニバーサル プラス アドヒーズブ ユニドースタイプの正しい使い方



STEP 1 丸い部分を押しつぶします。



STEP 2 ブラシを引き抜いてすぐ使えます。



販売名：スコッチボンド ユニバーサル プラス アドヒーズブ
販売名：スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ

認証番号：302AKBZX00043000 / 224AKBZX00054000

販売名：リライエックス ユニバーサル レジン セメント

認証番号：302AKBZX00044000

※掲載の内容および希望医院価格は、2021年1月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

3M、Scotchbond、スコッチボンド、リライエックスは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

歯科用製品事業部

<https://www.3mcompany.jp/dental>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2021. All Rights Reserved.
DEN-1699-AJ (012180) PN/e.

Web

3M 歯科



3M コールセンター

0120-332-329

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)