



インプリンス

接着性、親水性、高弾性のいずれもご満足いただけます。

レジントレーに強固に接着

Adhesion

シリコーンと化学的に接着する専用プライマーにより、レジントレーに強固に接着。レジントレーからの剥離による失敗も防止します。

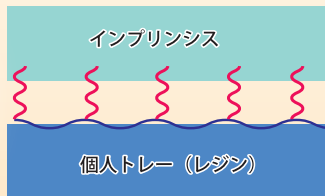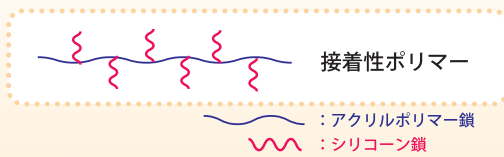


●インプリンスとレジンの接着

インプリンスをレジンから引きはがそうとしても剥離せず、最終的にはシリコーンの破断に至ります。



●インプリンスアドヒーズの厚み

アドヒーズの被膜厚さが殆どないため、均一な印象材スペースを確保できます。

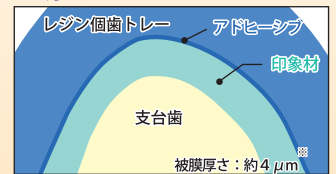


■個歯トレーによる印象採得の断面模式図
※歯トクヤマデンタルつくば研究所測定値

高い親水性

Water Affinity

親水性が高いため、水分の多い歯肉縁下でもシャープな印象が得られます。

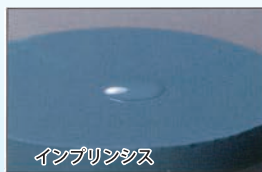


親水性が高いため、インプリンスの上に水を垂らしても水をはじきません。


高弾性により撤去が容易

アルジネート印象材並みの高い弾性を有しており、アンダーカットがあっても撤去が容易であるため、クラウンブリッジの印象にも適しています。また、模型撤去時の破折のリスクも軽減できます。

●印象材の弾性歪

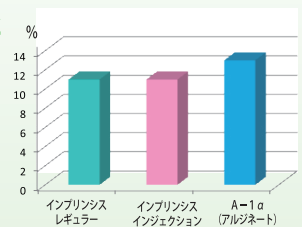

●印象材の永久歪

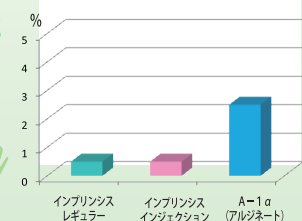

Elasticity



■印象法による各タイプの組み合わせ

目的	印象法	使用トレー	各タイプの組み合わせ
インレー、アンレー等の窩洞印象	①単一印象	既製トレー	レギュラー
	②連合印象（1回法）		パテ + インジェクション（レギュラー）
	③連合印象（2回法）		パテ（概形印象） → インジェクション（レギュラー）
クラウン、前装冠の印象	①単一印象	既製トレー 個人トレー	レギュラー
	②複合印象（1回法）	既製トレー 個人トレー	レギュラー + インジェクション
	③連合印象（2回法）	既製トレー	パテ（概形印象） → インジェクション（レギュラー）
	④個人トレー法（レジントレー）	個歯トレー + 既製トレー	レギュラー
デンチャーの印象	①単一印象	個人トレー	レギュラー（インジェクション）
	②連合印象（2回法）	既製トレー	パテ → レギュラー（インジェクション） （概形印象）

連合印象（2回法）：一次印象材としてパテタイプを使用する印象方法

■物性表

	レギュラー	インジェクション	パテ
操作余裕時間	2分	2分30秒	1分30秒
口腔内保持時間	3分	3分	3分
*弾性歪み（%）	11	11	2
*永久歪み（%）	0.5	0.5	0.2
*寸法変化（%）	-0.1	-0.1	-0.1
*石膏との適合性（ μm ）	20	20	75

（株）トクヤマデンタルつくば研究所測定 ※JIS T6513による

■包装

インプリンス レギュラータイプ （管理医療機器） 認証番号 221AFBZX00040000



レギュラー チューブセット

- ベースペースト（74mL/100g）
- キャタリストペースト（74mL/100g）
- アドヒーズP（10mL）
- リターダー（3mL）●練和紙 ●小筆

¥7,300



レギュラー チューブ シンプルセット

- ベースペースト（74mL/100g）
- キャタリストペースト（74mL/100g）
- 練和紙

¥5,600



レギュラー カートリッジセット

- カートリッジ（48mL/66g）×2
- TD II ミキシングチップ M×10

¥6,200



インジェクション チューブセット

- ベースペースト（74mL/100g）
- キャタリストペースト（74mL/100g）
- 練和紙

¥5,600



インジェクション カートリッジセット

- カートリッジ（48mL/66g）×2
- TD II ミキシングチップ S×10

¥6,200

インプリンス パテ （管理医療機器） 認証番号 221AKBZX00091000



- ベースペースト（290mL/450g）
- キャタリストペースト（290mL/450g）
- 計量スプーン × 2

¥7,400

単品

- レギュラー チューブ
- ベースペースト（74mL/100g） ¥3,300
 - キャタリストペースト（74mL/100g） ¥3,300

- インジェクション チューブ
- ベースペースト（74mL/100g） ¥3,200
 - キャタリストペースト（74mL/100g） ¥3,200

- インプリンス アドヒーズP（10mL） ¥2,400
- インプリンス リターダー（3mL） ¥600

関連製品



- （一般医療機器） 届出番号 08B2X00011000004
- トクヤママディスペンサー II

¥14,400



- （一般医療機器） 届出番号 082X00011000003
- TD II ミキシングチップ XS / S / M（各50本入）

各 ¥3,500

※パンフレットに記載のデータは弊社つくば研究所測定によるものです。※このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。価格は2022年7月現在の標準価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00（土日祝日を除く）

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>