

アルギン酸塩印象材用接着材

# トクヤマ アルジボンド

**接着性** と **清掃性** を両立。

## メタルトレーに接着



※メタルトレーの半面にボンドを塗布、印象材を盛り付け硬化後に剥がした場合。塗布した面だけ強く接着。


## レジントレーに接着



※レジントレーの半面にレジントレープライマー、続いてボンドを塗布、印象材を盛り付け硬化後に剥がした場合。塗布した面だけ強く接着。

## 硬化体にも接着

※アルギン酸塩印象材の円盤状の硬化体の半面にボンドを塗布、印象材を盛り付け硬化後に剥がした場合。塗布した面だけ強く接着。

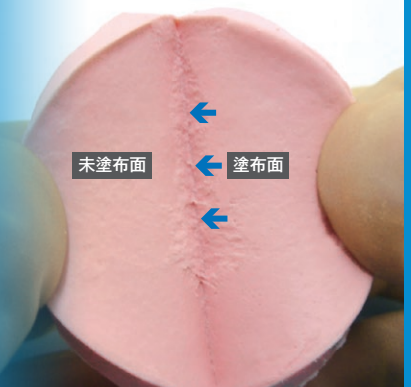

**清掃性** いつもきれいなトレーで

清掃後のトレーに  
ボンドの残渣が残りません。



清掃後のトレー



ご使用の際は必ず製品添付の使用説明書をよくお読み下さい。

## 使用方法

※詳しくは、製品に添付されている使用説明書をご覧ください。




メタルトレイ

※レジントレープライマーの塗布は不要です。




ボンドを塗布、乾燥。

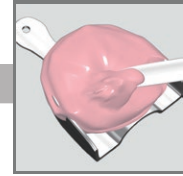

印象材を盛り付け、印象採得。




レジントレー

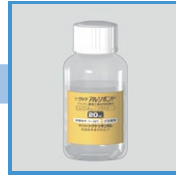

レジントレープライマーを塗布、乾燥。



ボンドを塗布、乾燥。

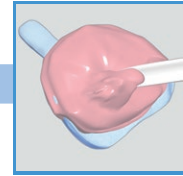

印象材を盛り付け、印象採得。



アルギン酸塩印象材用接着材

# トクヤマ アルジボンド

セット

標準医院価格 … ￥4,500

### ■セット構成

- ・ ボンド (30mL) …………… 1本
- ・ レジントレープライマー (20mL) …………… 1本
- ・ ミニブラシ (No.22) …………… 2本
- ・ カップ (No.5) …………… 1個
- ・ 筆付きキャップ (黒) …………… 1個
- ・ 筆付きキャップ (白) …………… 1個

### 単品価格

ボンド (30mL)	1本	￥3,100
レジントレープライマー (20mL)	1本	￥2,400
ミニブラシ (No.22)	2本	￥1,200 (30本入)
カップ (No.5)	1個	—
筆付きキャップ (黒)	1個	—
筆付きキャップ (白)	1個	—

## 関連製品



歯科用印象材混こう器

## トクヤマ APミキサーⅢ

(一般医療機器) 届出番号08B2X00011000114

標準医院価格 … ￥413,000

歯科用アルギン酸塩印象材 (トクヤマ APミキサー専用)

## トクヤマAP-1

(管理医療機器) 認証番号220AFBZX00071000

硬化タイプ 3種類 ノーマル、ファースト、スロー

標準医院価格 … ￥16,000

包装	単品価格
包装1箱 = 基材 1L×4本	￥2,600 (1本)
硬化材 1L×1本	￥7,300 (1本)



歯科用アルギン酸塩印象材

## トクヤマA-1α

(管理医療機器) 認証番号222AABZX00042000

硬化タイプ 2種類 ノーマル、ファースト

標準医院価格 … 5kg ￥21,000



## トクヤマAPトレクリーナー

トクヤマAP-1を収縮軟化させるタイプの液体トレクリーナーです。

包装 1本=液 2000mL

標準医院価格 … ￥7,500

※このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。価格は2022年7月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

# 株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

☎ 0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201  
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ご用命は