

歯科汎用アクリル系レジン

# トクヤマ キュアグレース

患者さんと術者に優しい  
高適合、高審美の即時重合レジン。



〈粉末色調〉6色：A1、A2、A3、ピンク、ライブピンク、クリア

## トクヤマ キュアグレース

### 粉末 250g

粉末 …………… 250g 1本  
粉末計量カップ …………… 1個

### 液 250mL

液 …………… 250mL 1本  
スポイト …………… 1本

### 粉末 50g

粉末 …………… 50g 1本  
粉末計量カップ …………… 1個

### 液 50mL

液 …………… 50mL 1本  
スポイト …………… 1本

### 関連製品

|                                                                                       |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>ラバーカップ No. 2</b><br><br>2個                                                                                          |
|  | <b>歯科用分離材<br/>トクソーレジンセパレーター</b><br><small>(一般医療機器) 届出番号08B2X00011000102</small><br><br>液 …………… 30mL 1本<br>筆 No.3 …… 1本 |
|  | <b>ダッペンガラス (6穴皿)</b><br><br>1個                                                                                         |
|  | <b>毛筆 No. 12</b><br><br>本製品にあわせて作製した特別な天然毛の筆です。操作性に優れています。<br><br>1本                                                   |

|                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | <b>スパチュラ No. 001</b><br><br>1本                     |
|  | <b>トクソー<br/>即重レジンクリーナー</b><br><br>液 …………… 100mL 1本 |
|  | <b>ダッペンガラス (6穴皿)<br/>ラバー</b><br><br>10個            |
|  | <b>トクヤマ キュアグレース<br/>収納ケース</b>                      |

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

## 株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス  
 **0120-54-1182** 受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日祭日は除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201  
 名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <http://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ご用命は

(管理医療機器) 認証番号 226AABZX00048000

ご使用の際は必ず製品添付の添付文書類をよくお読み下さい。

# トクヤマ キュアグレース それは優美な即重です。



## ピタッときまる！

低収縮で適合性の高い即時重合レジンが誕生しました！

浮き上がりが少なく、トータルの調整時間（マージン調整／咬合調整）が短くなります。

### ■ウォッシュ1回で高適合

#### 【症例1】 アンレーと連結したクラウンの症例

〔写真提供〕 滋賀県長浜市 泉 英之 先生



支台歯形成



混合法による暫間クラウン（TEK）



完成したTEK

マージンウォッシュ1回でピタッと適合

#### 【症例2】 ロングスパンブリッジの症例

〔写真提供〕 東京都文京区 齊藤 季夫 先生



適用部位




技工で作製されたロングスパン暫間ブリッジ



ウォッシュ1回後の適合性

ロングスパンの暫間ブリッジでもウォッシュ1回でピタッと適合

### ●支台歯適合試験

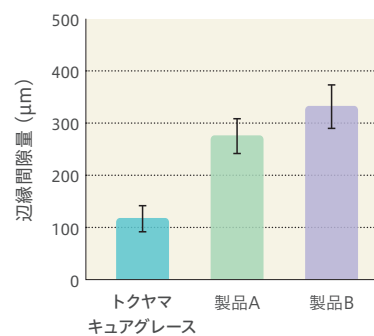


粉0.4g、液0.2mLを混和し、シリコンコアにレジン填入後金型に圧接。混和2分30秒後に金型（模擬単冠）から撤去。5分間静置後、金型に装着した時の浮き上がり量を測定。


## "臭い"から"香り"へ！

“香り成分”を配合し、即時重合レジン特有の“臭い”を感じにくくさせました。


●混和時に刺激臭が最も少ないと感じた製品。

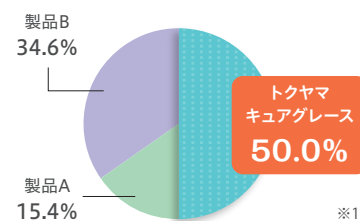

●硬化体作製時に刺激臭が最も少ないと感じた製品。

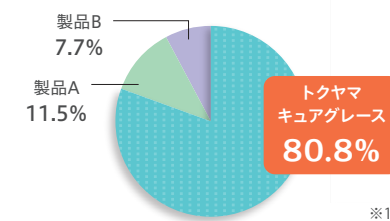


●硬化体削合時に刺激臭が最も少ないと感じた製品。

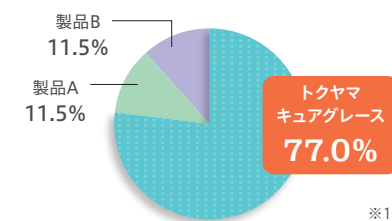

## ストレスの少ない操作性！


### 1 滑らかな練和感

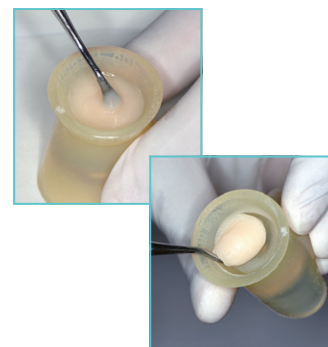

### 2 垂れにくく形をつけやすい性状




### 3 容易な切削、艶出し

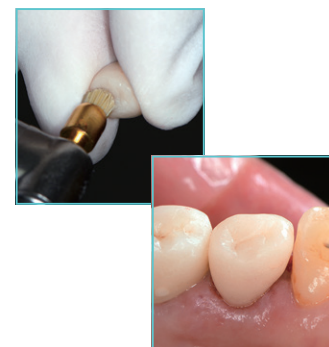

## 患者さんにも術者にも優しい低発熱！


患者さんに“熱い”思いをさせません。

### ●サーモグラフィーによる硬化時発熱温度比較

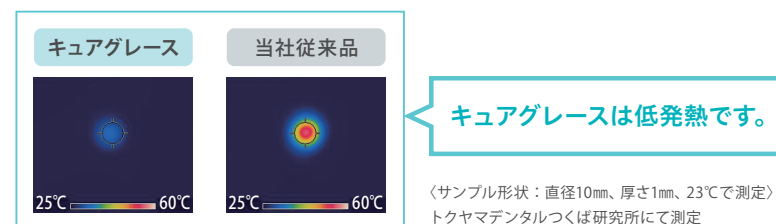

硬化時間は2分50秒\*とスピーディ。


### ●混合法による硬化時間（標準粉液比の場合）

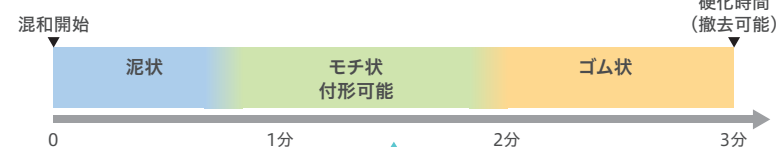

モチ状化までの時間が短く、待たずに付形開始可能。十分な付形時間の確保。

\*自社社：23℃で混和開始からピカー針による圧痕が付かなくなるまでの時間を硬化時間とする。

### ●硬化時発熱温度測定試験

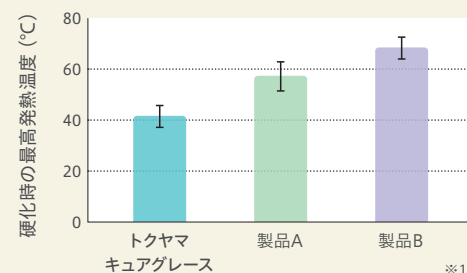


TEK作製時は有髄歯の場合、硬化時の発熱を歯髄に与えないことが重要である。口腔内で直接TEKを作製、調整する際、有髄歯への熱負荷リスクを減らすことができる点が極めて有効である。

※1) 本文より抜粋


## TEKでも高審美！

次の来院まできれいな色調が持続します。

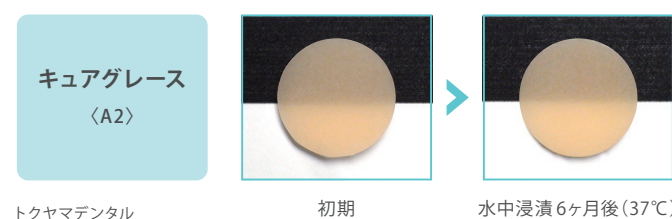

経時的な変色が少ない。

### ●色調安定性試験

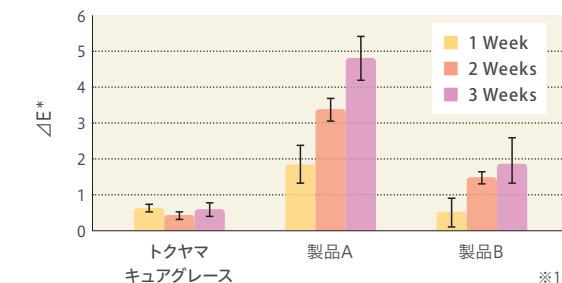

φ14.5mm厚さ0.9mmの硬化体を37℃水中に保存。各期間浸漬した後、色差計を用いてCIE L\*a\*b\*値を測定し、色差(ΔE\*)を算出。

※1) [出典] 日本歯科評論2014年9月号 (No.863 Vol.74 (9)) 低発熱で支台歯適合度が高い、新しい即時重合レジン「トクヤマ キュアグレース」の基本性能  
駒田 亘 進 千春 浦羽亜矢奈 南淵真愛 三浦宏之 東京医科歯科大学(TMDU)大学院 歯学部総合研究科 口腔機能再構築学系 摂食機能保存学講座 摂食機能保存学分野