

義歯床用硬質裏装材(光硬化・粉液型)

トクヤマ ヒカリライナー

パーシャルデンチャーの

リライニングでも簡単に取り外せます。



歯科技工用重合装置(光重合装置)

トクヤマ ポータライト
と一緒にお使いください。



トクヤマ ヒカリライナーの詳しい紹介、
臨床動画はこちら。

<https://www.tokuyama-dental.co.jp/hikareliner/>

光重合器「トクヤマ ポータライト」の
紹介はこちら。

<https://www.tokuyama-dental.co.jp/portallite/>



保険適用

義歯床用硬質裏装材(管理医療機器) 認証番号302AFBZX00091000

ご使用の際は必ず製品添付の添付文書類をよくお読みください。

義歯床用硬質裏装材(光硬化・粉液型)

トクヤマ ヒカリライナー

標準医院価格 ¥15,000/セット

セット構成	単品価格
粉末	80g ¥6,500
液	50mL ¥6,500
接着材	15mL ¥1,600
エアバリア材	30mL ¥2,800
粉末計量カップ	1個 ¥400
スポイト	1本 ¥600
ラバーカップ(No.3)	1個 ¥1,100(2個入)
スパチュラ(No.001)	1本 ¥500
ミニブラシ(No.22、白)	10本 ¥1,100(30本入)
ミニブラシ(No.23、黒)	10本 ¥1,100(30本入)
接着材用カップ	1個
接着材用ドロップ栓	1個
採取皿	1個 ¥500

色調 3色



ライトピンク



ピンク



ライブピンク
(繊維入り)

関連製品



歯科技工用重合装置

トクヤマ ポータライト

軽量で小型。訪問診療など持ち運びにも便利。使いやすいシンプル操作の光重合器です。

標準医院価格 ¥64,800/セット
(一般医療機器)届出番号14B2X00002000040



トクヤマ ポータライト キャリーバッグ

トクヤマ ポータライトと付属品、及びトクヤマ ヒカリライナーを収納し持ち運べるバッグです。

色調 1色 ブルー

標準医院価格 ¥8,000/個



トクヤマ ヒカリライナー プラケース

トクヤマ ヒカリライナーを使いやすい収納。持ち運びに便利です。

色調 1色 イエロー

標準医院価格 ¥2,000/個



歯科用象牙質接着材/
歯科セラミックス用接着材料/
歯科金属用接着材料

ボンドマー ライトレス

金属床義歯へアクリル系硬質裏装材をリライニングする場合、金属面に塗布することで接着します。

標準医院価格 ¥9,000/セット
(管理医療機器) 認証番号228AABZX00104000



歯科適合試験用材料

トクヤマフィットテスター

高い流動性で、適合判定がしやすい付加型シリコン系適合試験材。薄くなってもちぎれにくい適合試験材です。

標準医院価格 ¥4,800/セット
(一般医療機器)届出番号08B2X00011000109



入れ歯洗浄剤

トクヤマリベースクリーナー

99.99%の除菌率。強力除菌でしっかり消臭。食事を邪魔しない控えめな香りです。

標準医院価格 ¥3,300/1箱32錠入
：6箱包装
希望患者価格 ¥700/1箱(32錠入)

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。価格は2021年1月現在のものです。消費税は含まれておりません。

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00(土日祝日を除く)

札幌(011) 812-5690 仙台(022) 717-6444 東京(03) 3835-7201
名古屋(052) 932-6851 大阪(06) 6386-0700 福岡(092) 412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ご用命は

裏装操作における、先生と患者さんのストレスを低減します。

ストレスの低減

アンダーカットのある症例でも 取り外しが簡単


化学硬化型裏装材では、アンダーカットのある顎堤や、
鉤歯のアンダーカット部にレジンが入り込んで
しまうと取り外しが困難になる場合があります。
トクヤマ ヒカリライナーは、
照射前はゴム状を維持しているので、
アンダーカットに入っても簡単に
取り外すことができます。



弊社トクヤマフィットテスターにて適合試験

余裕のある操作時間


口腔内ではゴム状なので、
取り出すタイミングに余裕が
あります。

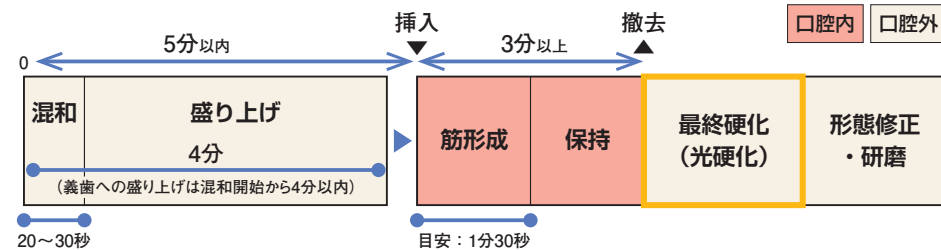

トリミングが容易

光硬化前なら、余剰部分のトリミングや、
やり直しが必要な場合の削除が容易に
行えます。

※余剰レジンのトリミングを行う場合は、弾性体となってい
るレジンを変形させる恐れがあるので最小限にとどめてく
ださい。

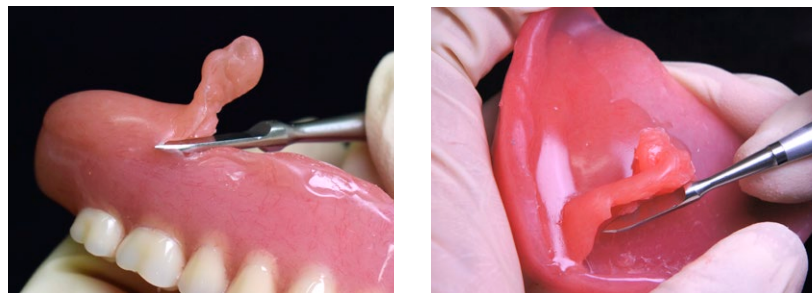

患者さんのストレスも低減


口腔内での硬化発熱による刺激がありません。
また、トクヤマリベースⅢ同様に低臭気・低刺激の原料を採用しています。

良好な混和性・流動性

- 粉末と液のなじみが良いため気泡
を巻き込みにくくなっています。
静かに20秒～30秒混和すること
で、均一なクリーム状になります。



- 混和後の流動性はゆるやかに変化します。義歯への盛り
付けのタイミングを調整することで幅広い症例にご使用
できます。

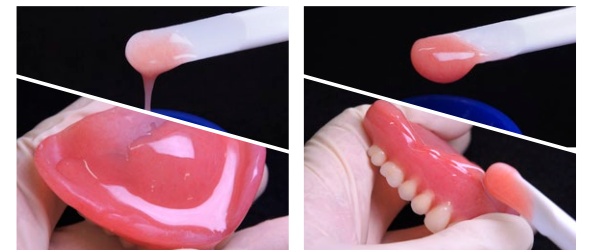


優れた機械的特性・研磨性


- 照射後は硬化性に優れながら、変形に対し柔軟
に対応するため、割れにくい物性を有しています。

- 弊社リライニング材〈化学重合型〉と比較して硬化直
後から表面硬度が高く、良好な研磨性が得られます。

■ 硬化体3点曲げ試験 (長 30mm× 幅 4mm× 厚 2mm)

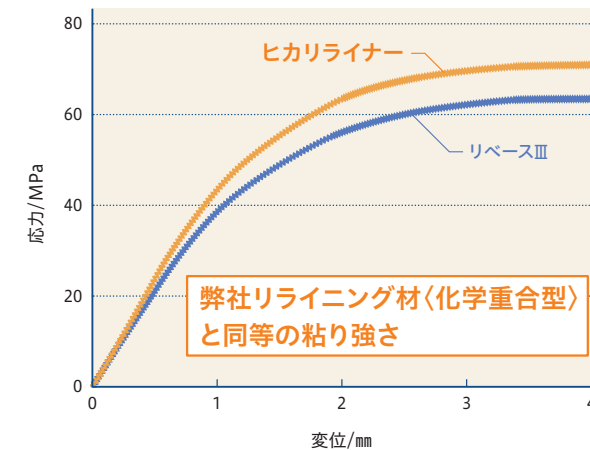

■ 硬化後の経過時間と表面硬さの関係

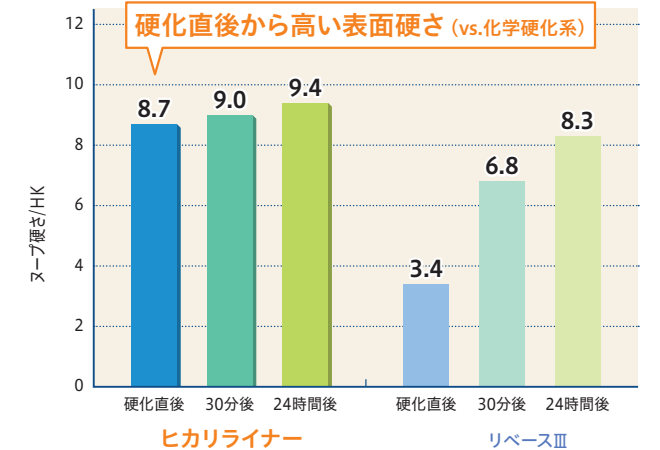

パンフレットに記載のデータは弊社つくば研究所測定によるものです。

操作手順

