

# トクヤマリベースクリーナー は…

除菌率  
99.99%  
カテキン配合

5分  
素早く洗浄

洗浄効果をもめる  
きめ細かな  
泡立ち

食事を邪魔しない  
控えめな香り

総入れ歯にも  
部分入れ歯にも  
使用可

※全ての菌を除菌できるわけではありません

## 汚れを素早く除去

★汚れがひどい場合には、浸漬後にスポンジ等で軽くこすると効果的です。

### 〈着色〉



洗浄前:  
患者が着色の除去を希望

洗浄後:  
5分浸漬、こすり洗い後

### 〈プラーク〉



洗浄前:  
染色液によるプラーク  
染め出し

浸漬状態:  
色素の浮きを確認

洗浄後:  
5分浸漬、こすり洗い後

【写真提供】神奈川県横浜市 田中歯科医院 田中五郎先生

患者・介護者

## ●毎日の入れ歯の洗浄に

入れ歯に付着した菌は12時間で  
約4,000倍に増殖します。\*

入れ歯を清潔にお使いいただくため  
に毎日洗浄剤を使用するようお勧め  
ください。

※【情報提供】二川 浩樹 先生 (広島大学大学院 教授)

歯科医師

## ●入れ歯の補修前の清掃に (裏装、床修理、増歯等)

補修前に義歯を清掃することは、より  
確実な仕上がりにつながります。



### 使用方法

① 150~200mL程度の  
水に1錠入れてください。



ぬるま湯(40°C程度)  
がより効果的。

② すぐに入れ歯全体を  
浸してください。



洗浄時間は5分程度。  
ひどい汚れは浸漬後に  
スポンジなどで軽くこす  
るとより効果的。

③ 洗浄後は水でよく  
すすいでください。



残った洗浄液はすぐに  
捨てる。  
毎日の洗浄が大切。

トクヤマリベースシリーズ、ソフリライナーシリーズで裏装された入れ歯の洗浄にもお使いいただけます。

歯科用 入れ歯洗浄剤

## トクヤマリベースクリーナー

- 用途: 入れ歯、矯正用リテーナー、マウスガードの洗浄
- 内容量: 6箱包装 (ディスプレイ箱)  
1箱32錠入り(2.8g×32)



株式会社トクヤマデンタル

〒110-0016 東京都台東区台東 1-38-9

☎ 0120-54-1182 [受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土日祭日は除く)]

■ご用命は