

トクヤマ マルチシャイン

歯科医療機関専売品 入れ歯洗浄剤

マルチに使える

デンチャー
矯正用リテーナー
マウスガード 等の
洗浄に



除菌率99.99%※

※全ての菌を除菌できるわけではありません

カテキン配合



トクヤマ マルチシャイン


はマルチにご使用
いただける洗浄剤です。



総義歯



部分床義歯

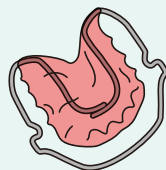

矯正用リテーナー



マウスガードなど

硬質裏装材トクヤマ リベスシリーズ/軟質裏装材ソフリライナーシリーズで裏装された義歯の洗浄にも使用可能

トクヤマ マルチシャインの特長

洗浄効果を高める、きめ細かな泡立ち

きめ細かな泡立ちで、洗浄力を強化。



汚れを素早く、しっかり洗浄

浸漬時間5分でしっかり洗浄。

就寝中のつけおき洗浄も可能で、生活スタイルに合わせて洗浄時間が選べます。

※全ての菌を除菌できるわけではありません



除菌率
99.99%



食事を邪魔しない控えめな香りづけ

洗浄直後でも食事の邪魔をしない控えめな香りを採用。



使用方法

1



150~200mL程度の水に1錠入れてください。

ぬるま湯(40℃程度)がより効果的です。

2



マウスガード、リテーナー等にも使える!

すぐに入れ歯全体を浸してください。

洗浄時間は5分程度です。

1晩程度であれば漬け置きも可能です。

ひどい汚れは浸漬後にスポンジなどで軽くこするとより効果的です。

3



洗浄後は水でよくすすいでください。

残った洗浄液は捨ててください。



歯科医療機関
専売品
入れ歯洗浄剤

トクヤマ マルチシャイン

■用途:入れ歯、矯正用リテーナー、マウスガードの洗浄 ■液性:中性 ■内容量:6箱(1箱:2.8g×32錠)
■標準医院価格:¥3,300(税抜)※1箱単価¥550(税抜) ■希望患者価格:¥700(税抜)/1箱

■ご用命は

株式会社トクヤマデンタル

〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

0120-54-1182

[受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00]

(土日祝日を除く)