


製品ラインナップ

セット品



エステポリッシャー スターターキット

トルネード10 ミディアム、ファイン
サイクロン ミディアム、ファイン
ポイント ミディアム、ファイン
カップ ミディアム、ファイン 各1本

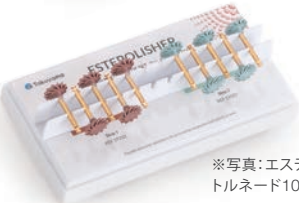

エステポリッシャー トルネード14 バリューセット

ミディアム、ファイン 各5本

エステポリッシャー トルネード10 バリューセット

ミディアム、ファイン 各5本

※写真:エステポリッシャー
トルネード10 バリューセット



エステディスク スターターキット 14mm

コース、ミディアム、ファイン、エクストラファイン 各25枚
エステディスク マンドレル RA (CA) 1本

エステディスク スターターキット 10mm

コース、ミディアム、ファイン、エクストラファイン 各25枚
エステディスク マンドレル RA (CA) 1本

※写真:エステディスク スターターキット 10mm

単品

エステポリッシャー

形状	粒度	入数
トルネード14	ミディアム	3本
	ファイン	
トルネード10	ミディアム	
	ファイン	
サイクロン	ミディアム	
	ファイン	
ポイント	ミディアム	
	ファイン	
カップ	ミディアム	
	ファイン	

エステブラシ

形状	入数
カップ	1本
	5本
フラット	1本
	5本
ポイント	1本
	5本

エステディスク

種類	粒度	入数
14mm	コース	100枚
	ミディアム	
	ファイン	
	エクストラファイン	
10mm	コース	100枚
	ミディアム	
	ファイン	
	エクストラファイン	
マンドレル RA (CA)	—	3本

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
価格は2026年8月現在のものです。消費税は含まれておりません。

ご使用の際は最新の注意事項等情報をお読みください。

エステポリッシャー	一般医療機器	歯科用ゴム製研磨材	届出番号 08B2X00011000120	製造元 EVE Ernst Vetter GmbH(ドイツ連邦共和国)
エステブラシ	一般医療機器	歯科用研磨器材	届出番号 08B2X00011000119	
エステディスク	一般医療機器	歯科用研磨器材(歯科用マンドレル)	届出番号 08B2X00011000118	
エステライトSクイック	管理医療機器	歯科充填用コンポジットレジン	認証番号 219AFBZX00101000	
エステライトユニバーサルフロー	管理医療機器	歯科充填用コンポジットレジン	認証番号 228AFBZX00080000	
エステライトアステリア	管理医療機器	歯科充填用コンポジットレジン	認証番号 225AFBZX00146000	
オムニクロマフロー	管理医療機器	歯科充填用コンポジットレジン	認証番号 302AFBZX00087000	

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス
0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00,13:00~17:00 (土日祝日を除く)

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <https://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ご用命は



トクヤマデンタルの コンポジットレジン研磨システム

歯科用ゴム製研磨材

エステポリッシャー

ESTEPOLISHER

歯科用研磨器材

エステブラシ

ESTEBRUSH




歯科用研磨器材

エステディスク

ESTEDISC

“こだわりのコンポジットレジン修復の
最終仕上げをサポート”

部位や形態に合わせて選べる多彩なラインナップ

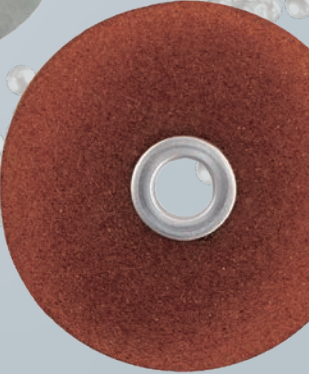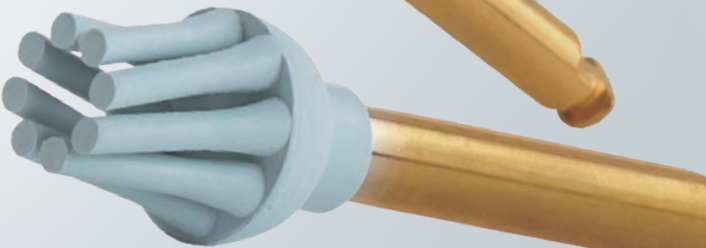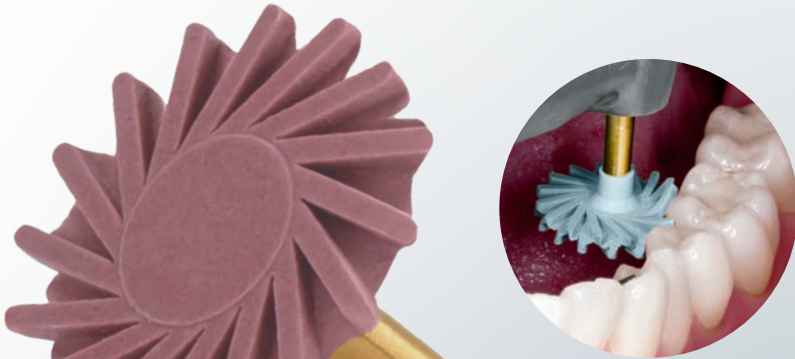

歯科用ゴム製研磨材

エステポリッシャー

ESTEPOLISHER

ダイヤモンド砥粒含有
オートクレーブ滅菌可能:134℃(推奨5分)

推奨回転数:3,000-8,000rpm
最大回転数:20,000rpm

使用方法
●カーバイドバー等で形態修正後、
注水下・推奨回転数・ソフトタッチで使

ダイヤモンド砥粒含有。コンポジットレジンを2ステップで高光沢に仕上げる研磨ポイントです。

中仕上げ用
ミディアム
medium

14 10

トルネード
TORNADO

14 10

最終仕上げ用
ファイン
fine

前歯から臼歯咬合面までオールマイティーに使用可能

サイクロン
CYCLONE


咬合面の小窩裂溝、隆線など

ポイント
POINT

細部、隣接面、歯頸部など

カップ
CUP

咬合面、前歯唇側面など

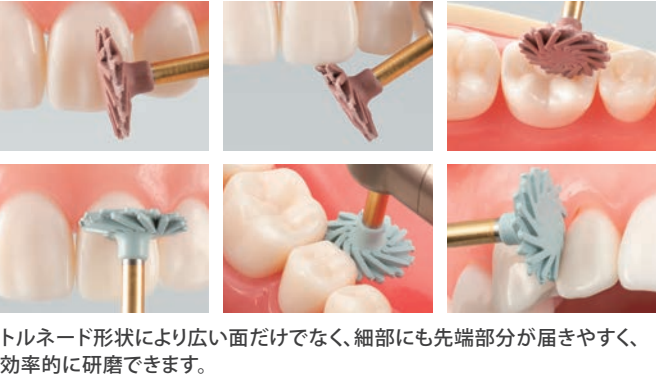

トルネード形状により広い面だけでなく、細部にも先端部分が届きやすく、効率的に研磨できます。



特殊形態で小窩裂溝にフィットするため、咬合面の研磨に特化しています。



小型のポイント形状が隣接面や歯頸部にフィットします。



小型のカップ形状により、唇側の表面性状や咬合面の解剖学的形態を壊さずに滑沢化します。

歯科用研磨器材

エステブラシ

ESTEBRUSH

シリコンカーバイド粒子含有
オートクレーブ滅菌可能:134℃(推奨5分)

推奨回転数:5,000-7,000rpm
最大回転数:10,000rpm

使用方法
●研磨ペースト不要。注水下・推奨回転数・ソフトタッチで使

シリコンカーバイド粒子含有。適度にしなりがあるブラシが修復部位の細部まで届きやすく、研磨ペーストを使わずに最終研磨まで行えます。

カップ
CUP

唇側面の仕上げや咬合面のツヤ出しに

フラット
FLAT

咬合面や広い面などの研磨に

ポイント
POINT

臼歯部の隣接面や小窩裂溝の研磨に

歯科用研磨器材

エステディスク

ESTEDISC

アルミナ粒子コーティング
ディスク:単回使用
マンドレル:オートクレーブ滅菌可能:134℃(推奨5分)

推奨回転数:7,000-10,000rpm
最大回転数:20,000rpm

使用方法
●コンポジットレジン等にディスクを押し当てて回転させ、
推奨回転数・ソフトタッチで使

コンポジットレジン充填後の平滑面や隣接面の最終仕上げまで行える研磨ディスクです。薄く、柔軟性があるため、自然な形態を維持したまま研磨が可能です。

コース
coarse

14mm

10mm

ミディアム
medium

ファイン
fine

エクストラファイン
extra fine

切縁隅角の形態修正や研磨に。

切縁の形態修正や研磨に。

唇側平滑面の研磨に。部位に合わせ表裏返して使用が可能。

隣接面の研磨に。部位に応じたサイズ選択が可能。

※粒度は濃い色(荒目)から薄い色(細目)に色分けされています

エステディスク マンドレル RA(CA) 全長:25mm
※専用のマンドレルでご使用ください