



開発者: Dr. Carl Misch

MISCH

# POWER ELEVATORS

REVOLUTIONARY FULCRUM EXTRACTION TECHNOLOGY  
Elevating Dentistry One Tooth At a Time


## ミッシュ パワーエレベーター



Bear Claw



Pad

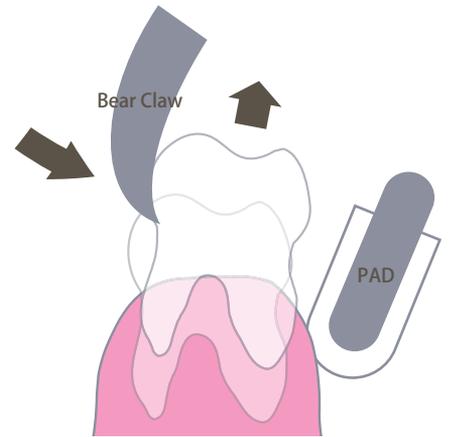

歯牙を把持する側 (Bear Claw) と 支板となる側 (Pad) の先端で  
**歯牙を挟むだけで、揺さぶらずに** 抜歯を行います!

周囲組織の破壊を最小限に抑え、インプラントの即時埋入を有利にします。




POWER ELEVATORS  
REVOLUTIONARY FULCRUM EXTRACTION TECHNOLOGY  
Elevating Dentistry One Tooth At a Time

ミッシュパワーエレベーター

届出番号: 13B1X00053AB0002



開発者: Dr. Carl Misch

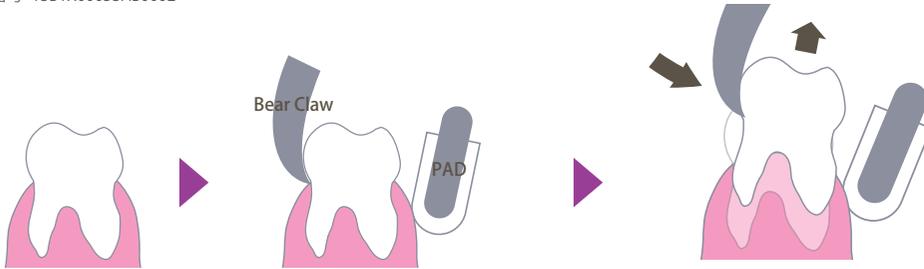

ミッシュパワーエレベーター先端のBear Claw側とPAD側で歯牙を頬舌的につかみます。

さらに挟むと、強い力を用いずに、揺さぶることもなく抜歯されます。PADは支板となるとともに、歯槽骨を保護する働きもあります。

- 把持する側 (Bear Claw) と、支板となる側 (Pad) の先端が歯牙を挟むだけで、**揺さぶらずに抜歯**します!
- PAD側が歯槽骨を保護し、**骨壁の破壊を抑えます!**



ミッシュパワーエレベーター M-1



ミッシュパワーエレベーター M-2



Pad側は自在に回転し、面としてポイントを支えます。

201-10001 ミッシュパワーエレベーター セット

ミッシュパワーエレベーター M-1 & M-2  
PADカバー 知歯用 & ユニバーサル各12コ  
カセット #2

107,000円 (税別)



[交換用] PAD側に被せ、滑りを抑えます。

201-00005 PADカバー 知歯用 / 薄 (12イリ)

1,000円 (税別)



201-00006 PADカバー ユニバーサル / 厚 (12イリ)

1,000円 (税別)



使用例



Padを唇側で使用



Padを口蓋 (舌) 側で使用

〔上下前歯部〕



Padを頬側で使用



Padを口蓋 (舌) 側で使用

〔上下臼歯部〕



Padを頬側で使用



Padを口蓋 (舌) 側で使用

〔上下最後臼歯部〕

※使用の際はPAD側に専用カバーを装着し、前歯部の場合はさらにガーゼを当てて使用してください。

## TWIST ELEVATOR

FOR CUTTING MESIAL & DISTAL SURFACE

# パワーツイストエレベーター

届出番号: 13B1X00053AB0003

### 従来のエレベーターでは、

- 歯牙の破折や破壊が…  
不十分な接触が原因です。
- 特殊で繊細な技術が求められる症例で…  
挿入深度が不十分であれば、歯根膜の剥離や歯根の挙上が困難です。
- 抜歯窩周囲の骨や歯周組織の破壊が…  
インプラントの抜歯即時埋入等、次の外科処置を困難にします。

### パワーツイストエレベーターの特徴

- 歯根膜の切除や剥離がしやすい  
ペリオトームで脱臼→ツイストエレベーターを溝形状に沿ってツイストさせて挿入→回転しながら垂直的に歯牙が挙上されます。
- 先端の歯根に沿った挿入  
ツイストさせながら、スムーズに挿入されます。
- 歯槽骨、歯周組織の保存  
歯槽骨や歯周組織のダメージが小さく、抜歯即時のインプラント埋入や骨増生処置に有利です。



201-00009	201-00007	201-00008	201-00010
<b>L曲</b>	<b>L</b>	<b>R</b>	<b>R曲</b>
左側 臼歯部舌側用 右側 臼歯部頬側用	左側 前歯部用	右側 前歯部用	右側 臼歯部舌側用 左側 臼歯部頬側用

各9,800円(税別)

201-10002 **パワーツイストエレベーター セット**  
パワーツイストエレベーター (L、L曲、R、R曲)  
カセット#2

45,000円(税別)



部位を選ばず、切断無しで短時間に撤去!

## POWER CROWN REMOVERS

Innovative Crown Removal Instruments

# パワークラウンリムーバー

届出番号: 13B1X00053AB0001

咬合面に形成した穴と、側面を支点に、クラウンを撤去します。

- ジルコニアクラウン
- インプラントクラウン
- テンポラリークラウン の撤去に!




パワークラウンリムーバー L

パワークラウンリムーバー R



頬(唇)側

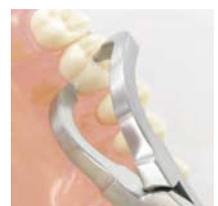

口蓋(舌)側

201-10000 **パワークラウンリムーバー セット**  
パワークラウンリムーバー L & R  
カセット#2

60,000円(税別)

※パワーエレベーター使用前に、当器具で歯根膜の剥離を行うことをお勧めします。

**POWER PERIOTOME**  
for cutting buccal & lingual periodontal ligaments

**パワーペリオトーム**

届出番号: 13B1X00053AB0004

頬・舌側の歯根膜剥離!



両刃仕上げ



201-00011 パワーペリオトーム 9,000円(税別)

**POWER SURGICAL CURETTE**  
for cleaning sockets post extraction

**パワーサージカルキュレット**

届出番号: 13B1X00053AB0005

抜歯窩の搔爬に!



201-00012 パワーサージカルキュレット 86S



刃部最大径3.5mm

201-00013 パワーサージカルキュレット 86AS

各6,000円(税別)

201-10004

**ミッシュ エクストラクションキット**

- ミッシュパワーエレベーター(M-1 & M-2)
- PADカバー 知歯用/薄(12イリ)
- PADカバー ユニバーサル/厚(12イリ)
- パワーツイストエレベーター(L, L曲, R, R曲)
- カセット#1

152,000円(税別)



201-10005

**ミッシュ エクストラクションフルキット**

- ミッシュパワーエレベーター(M-1 & M-2)
- PADカバー 知歯用/薄(12イリ)
- PADカバー ユニバーサル/厚(12イリ)
- パワーツイストエレベーター(L, L曲, R, R曲)
- パワーペリオトーム
- パワーサージカルキュレット(86S & 86AS)
- カセット#1

170,000円(税別)

届出番号: 13B1X00053AB0006



**注文書**

電話  
番号

FAX  
番号

注文書  
記入日

ご使用  
予定日

診療所名

ご芳名

ご住所  
〒

都 道  
府 県

市 区  
郡

商品コード

商品名

注文数

商品コード

商品名

注文数

商品コード

商品名

注文数

こちらへFAX **FAX:03-5850-8505**

ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、当社ホームページをご参照ください。http://www.itx.co.jp

製造販売元 / 発売元



本社: 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル  
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505

ご指定納入店

製造元 **Dental USA** (米国)  
Exceptional Quality & Value