

管理医療機器  
歯科用象牙質接着材

# クリアファイル® DC ボンド



デュアルキュアのボンディングが  
1ステップに

**D**ual  
**C**ure  
Bonding  
system

# デュアルキュア型ボンディングの操作性をよりシンプルに!

ボンドA液、ボンドB液の等量混和により、1ステップで接着処理が可能なデュアルキュア型ボンド(光・化学重合型)です。

※必ずボンドA液・ボンドB液を混和してご使用ください。ボンドA液は粘性があり、ボンドB液はサラッとした液状です。採取の際は採取性の違いにご注意ください。



## 「DCボンド」の使用ステップ概要

※ご使用の前には必ず製品の添付文書をお読みください。

**case A** 歯科用支台築造材料を用いた支台築造

レジンコアに

- 1 歯科用ボンドの表面処理方法  
金属ボンドの場合「アロイプライマー」の塗布・エアフロー  
ガラスファイバーボンドの場合「リジンエポキシ樹脂処理後」「クリアフィルセラミックプライマー」の塗布・エアフロー
- 2 ボンドA液・B液の混和  
※必ず等量で混和。5秒間以上攪拌してください。
- 3 ボンドの塗布
- 4 強めのエアフローでしっかりと乾燥
- 5 余剰ボンドを除去
- 6 再度強めのエアフローでしっかりと乾燥
- 7 光照射  
※照射器と照射時間の関係については、表1をご参照ください。
- 8 支台築造用CRの填入・ボンドの固定
- 9 支台築造用CRの築造・支台成形

---

**case B** 光重合型の歯科充填用コンポジットレジンを用いた充填修復

CR充填に

- 1 ボンドA液・B液の混和  
※必ず等量で混和。5秒間以上攪拌してください。
- 2 ボンドの塗布
- 3 強めのエアフローでしっかりと乾燥
- 4 光照射  
※照射器と照射時間の関係については、表1をご参照ください。
- 5 光重合型CRの充填
- 6 光照射  
※照射器と照射時間の関係については、表1をご参照ください。

---


**case C** 化学重合型の歯科充填用コンポジットレジンを用いた充填修復

化学重合CRに

- 1 ボンドA液・B液の混和  
※必ず等量で混和。90秒以内に使用してください。
- 2 ボンドの塗布
- 3 強めのエアフローでしっかりと乾燥
- 4 光照射  
※照射器と照射時間の関係については、表1をご参照ください。
- 5 化学重合型CRの練和・充填・硬化・仕上げ研磨

## 接着強さと照射時間

### ■「クリアフィル®AP-X」との接着強さ (MPa)

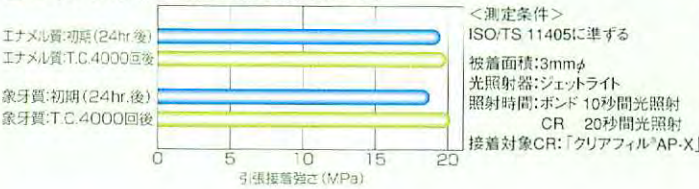

### ■表1. 「クリアフィル®DCボンド」の照射時間について

照射器	歯科用支台築造材料を用いた支台築造	その他の症例
従来型ハロゲン照射器、LED照射器	20秒間光照射	10秒間光照射
高出力ハロゲン照射器、プラズマアーク照射器	10秒間光照射	5秒間光照射

使用可能な照射器については、添付文書をご参照ください。

### クリアフィル® DC ボンド



- セット内容**
- ボンドA液 (4mL) 1個
  - ボンドB液 (4mL) 1個
  - 遮光板 1個
  - 混和皿 1個
  - スポンジ小片 1個
- メーカー希望小売価格 **17,000円** (242-512)
- 単品**
- ボンドA液 (4mL) 1個
  - メーカー希望小売価格 **9,000円** (242-512)
  - ボンドB液 (4mL) 1個
  - メーカー希望小売価格 **9,000円** (242-513)
- ※医療機器承認番号 216ABBZXC0039002

### クリアフィル® DC ボンド コア ビルドアップ キット



- セット内容 (ホワイト、又はデンチン)**
- クリアフィル®DCコア オートミックス® キャリリスト 9.9g (4.5mL) 1個
  - ユニバーサル9.9g (4.5mL) 1個
  - クリアフィル®DCボンド ボンドA液 (1mL) 1個
  - ボンドB液 (1mL) 1個
- 付属品 (ホワイト、デンチン共通)**
- ミキシングチップ 20個
  - ガイドチップ 20個
  - ガイドチップ (組) 5個
  - 遮光板 1個
  - 混和皿 1個
  - スポンジ小片 1個
  - 小筆ホルダー 1個
  - ディスポ小筆チップ 50個
- メーカー希望小売価格 **17,000円** (212-350・351)
- 医療機器認証番号: 216ABBZXC0042000  
クリアフィル®DCボンドコアビルドアップキット  
クリアフィル®DCコアオートミックスとクリアフィル®DCボンド (少量タイプのボンドA・B各1mL)のセットです。

### クリアフィル® セラミック プライマー



- 単品内容**
- クリアフィル®セラミックプライマー (4mL)
  - メーカー希望小売価格 **7,000円** (242-550)
- 医療機器認証番号: 216ABBZXC00041000

●メーカー希望小売価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品のメーカー希望小売価格は2006年8月21日現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税は含まれておりません。  
●「クリアフィル」「オートミックス」は株式会社クラレの登録商標です。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。  
●ご使用に際しましては製品の添付文書を必ずお読みください。●データ測定はクラレメディカル株式会社です。●「アロイプライマー」管理医療機器 歯科金属用接着材料 医療機器承認番号: 20900BZZ00723000

製造販売元 **クラレメディカル株式会社**  
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)

連絡先 **クラレメディカル株式会社**  
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)  
〒530-8611 大阪府大阪市北区梅田1-12-39 (新阪急ビル)  
フリーダイヤル: 0120-330922  
http://www.kuraray.co.jp/dental

販売元 **株式会社モリタ**  
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161  
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525  
www.dental-plaza.com