

Super Porcelain AAA

ERABIAN

ERABIAN

PRESS


LF

インターナル ステイン フルオロ

Internal Stain Fluoro

蛍光性+

インターナルステイン Fluoro(フルオロ)とは
fluorescence(蛍光性)を付与するためのステインタイプの陶材です。

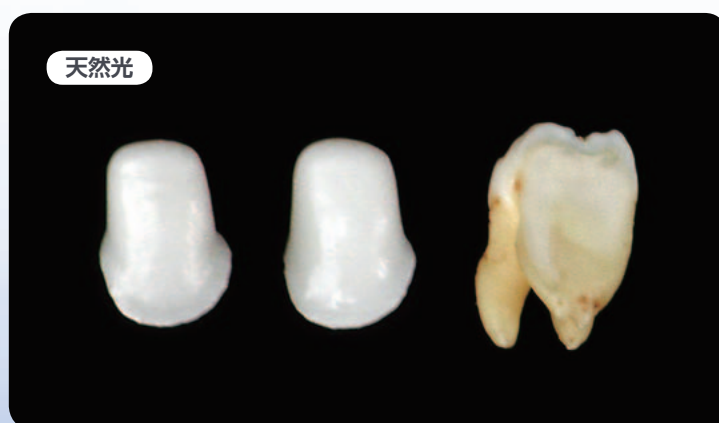

※1 : 365nm

※2 : 臼歯を垂直方向に切断したもの

インターナル ステイン フルオロ

通常蛍光性を持たないジルコニアフレーム※3に蛍光性を付与したり、ペーストオパークやオパーク、マージンポーセレンなどの焼成後の表面に塗布することで、容易に蛍光性を強めることが可能です。また、ボディやエナメル、インターナルステインなどの従来からご使用いただいている陶材※4と併用、混合いただくことで、陶材の蛍光性を強めることも可能です。

※3 : ジルコニアとは3Y-TZPと呼ばれる酸化ジルコニウム(ZrO_2)に少量の酸化イットリウム(Y_2O_3)が固溶したものを指します。

※4 : ノリタケスーパーポーセレンAAA(以下スーパーポーセレンAAA)陶材にはスーパーポーセレンAAAインターナルステインFluoroをご使用ください。各商品の併用、混合することなどはできません。

Fluoro製品構成

品 名			容 量
スーパーポーセレンAAA	インターナルステイン	Fluoro	メタルフレーム用陶材
セラビアンZR	インターナルステイン	Fluoro	ジルコニアフレーム用陶材
セラビアンZRプレス	LFインターナルステイン	Fluoro	ジルコニアフレーム(ロー・フュージング)陶材



■ スーパーポーセレンAAA インターナルステイン



■ セラビアンZR インターナルステイン



■ セラビアンZRプレス LFインターナルステイン

インターナルステイン ラインナップ 全19色(各3g)

White ホワイト	Incisal Blue1 インサイザル ブルー 1	Incisal Blue2 インサイザル ブルー 2	Mamelon Orange1 マメロン オレンジ 1	Mamelon Orange2 マメロン オレンジ 2	Cervical1 サービカル 1	Cervical2 サービカル 2	Cervical3 サービカル 3
Earth Brown アースブラウン	Reddish Brown レディッシュブラウン	Salmon Pink サーモンピンク	Red レッド	A+	B+	C+	D+
Bright ブライト	Fluoro フルオロ	Gray グレー (セラビアンZRのみ)	—	—	—	—	—

※練和には IS リキッド(10ml)をご使用ください。

焼成スケジュール

	乾燥時間	焼成開始温度	真空開始温度	昇温速度	真空値	真空解除温度	保留時間	焼成温度	冷却時間
	分	℃	℃	℃ / 分	MPa	℃	分	℃	分
スーパーポーセレン AAA インターナルステイン	5	600	—	55	0	—	0	830	0
セラビアン ZR インターナルステイン	5	600	—	50	0	—	0	900	4
セラビアン ZR プレス LF インターナルステイン	5	600	—	45	0	—	0	800	4

※各陶材の併用、混合は避けてください。

●ノリタケスーパーポーセレン AAA
歯科メタルセラミック修復用陶材 管理医療機器
医療機器認証番号 222AFBZX00050000

●セラビアン ZR
歯科用陶材 管理医療機器
医療機器認証番号 222AFBZX00045000

●セラビアン ZR プレス
歯科用陶材 管理医療機器
医療機器認証番号 222AFBZX00053000

ノリタケ デンタル インフォメーションセンター
受付時間/月～金 AM9:30～PM5:00
〒470-0293 愛知県みよし市三好町東山300 FAX(0561)32-9302

(0120)49-1100

販 売 株式会社モリタ
[大阪] 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL(06)6380-2525(代)
[東京] 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL(03)3834-6161(代)
http://www.dental-plaza.com/
○掲載製品の標準価格は2011年1月現在のものです。標準価格には消費税は含まれておりません。 ○外観、価格は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
○製品本来の色調と若干異なる場合がございます。

製造販売 株式会社 ノリタケ デンタル サプライ
愛知県みよし市三好町東山300 〒470-0293 TEL(0561)32-8953
www.noritake.co.jp/ceramic/nds/