

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料 歯科金属用接着材料

クリアフィル[®] セラミックプライマー プラス

陶材、シリカ系ガラスセラミックス、
CAD/CAMレジン、ジルコニア、
金属まで使用可能なプライマー




1本で様々な補綴物に適用可能

1本で様々な補綴物に適用可能


「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」は、シランカップリング剤に加え、リン酸エステル系モノマー「MDP®」も含有することから、陶材、シリカ系ガラスセラミックス、CAD/CAMレジン、ジルコニア、金属の前処理材として有効です。



MDPとシランカップリング剤の反応機構

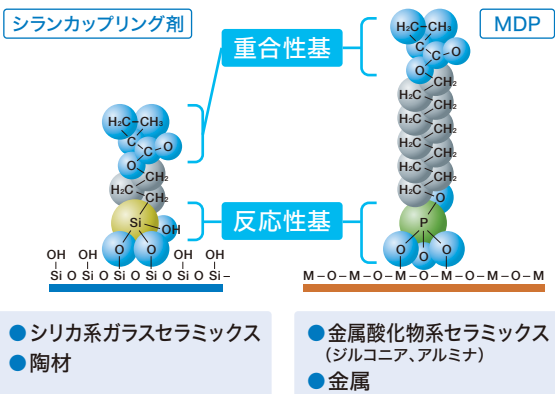

各種補綴物への接着強さ (サーマルサイクル3,000回後)

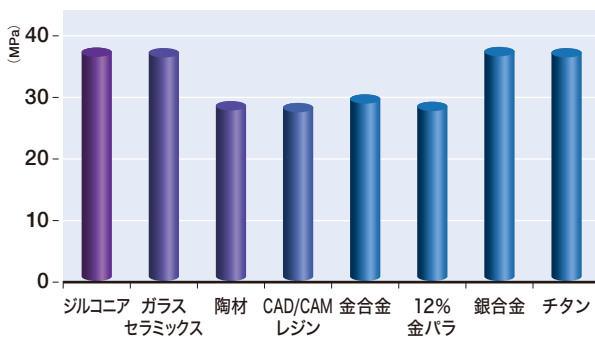



測定条件:
サンドブラスト処理(ジルコニア、金属、CAD/CAMレジン)、#1000研磨(陶材、ガラスセラミックス)、被着面積: 5mmφ、被着体に本品適用後、「バナビア® V5ペースト」を塗布して圧接し、マージン部へペンキュア2000で2方向から10秒光照射
37°C水中に1日浸漬し、サーマルサイクル(4~60°C、3000回)後、測定

測定装置:
オートグラフ AG-100kN (島津製作所)
クロスヘッドスピード: 1mm/min

クラレノリタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。

補綴物の処理

※サンドブラスト処理の方法に関しては補綴物の添付文書を確認してください。添付文書に記載がない場合は以下を参考に処理してください。

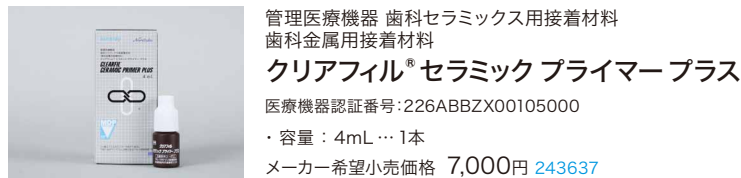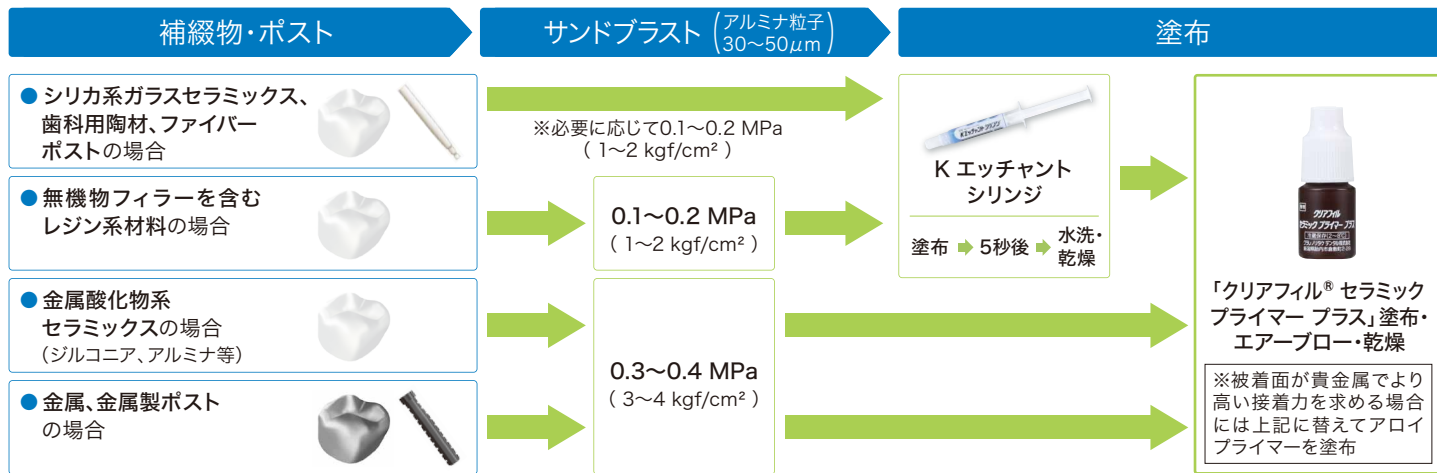

●メーカー希望小売価格の後の6ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。

●出典のない測定データはクラレノリタケデンタル株式会社によるものです。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

「バナビア® V5 ペースト」 管理医療機器 歯科用コンビジットレジンセメント 医療機器認証番号: 226ABBZX00102000 「アロイプライマー」 管理医療機器 歯科金属用接着材料 医療機器認証番号: 20900BZX00723000

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922 月曜~金曜 10:00~17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元 クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先 クラレノリタケデンタル株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

販売元 株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL: (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL: (03) 3834-6161
お客様相談センター: 0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com