

管理医療機器
歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料、歯面処理材)
医療機器認証番号：301ABBZX00015000


カタナ[®] クリーナー

支台歯・補綴装置への汚染を
シンプルなステップで清掃



唾液などの汚染により、 歯科用接着材の **接着力** は **低下** します

「ノリタケ カタナ®ジルコニア」HTに対する
「パナビア®V5」のせん断接着強さ（人工唾液汚染）

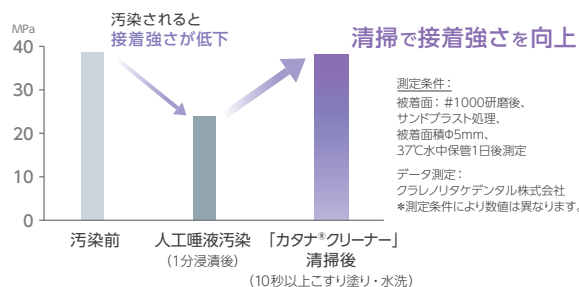


※1 試適時などに生じる唾液や血液などの汚染をリン酸エステル系モノマー「MDP®」と塩基性成分から形成される塩（MDP塩）の界面活性作用により清掃。汚染面に対する接着材料の接着性を高めます。
※2 約pH4.5 測定方法：JIS Z 8802：2011

高い洗浄効果

○色素結合法を用いた染色試験（人工唾液汚染）



○「パナビア®V5」のせん断接着強さ（人工唾液汚染）

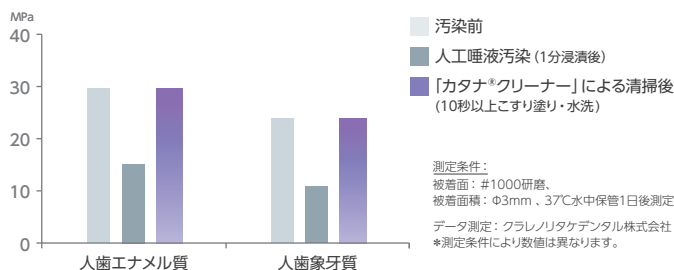

口腔内外で使用可能

- 歯質
- 補綴装置
 - ・セラミックス
 - ・コンポジットレジン
 - ・歯科用ポスト
 - ・歯科用金属



シンプルなステップ

症例写真提供：高輪歯科 加藤正治 先生



- ※1 使用前に通法にしたがい仮封材・仮着材を除去・防湿。
本品を塗布・10秒以上こすり塗り ※マイクログラシ・小筆・綿球・スポンジで使用可能。
※2 本品の色が完全になくなるまで水洗した後、エアーにて乾燥。
※3 併用する歯科用接着材、又は歯科用セメントの添付文書にしたがい接着操作。

管理医療機器
歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料、歯面処理材)

カタナ® クリーナー

医療機器認証番号：301ABBZX00015000
● 単品 4mL



関連製品

「カタナ® クリーナー」は「パナビア® V5」「SAルーティング® Multi」や「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER」などの接着前の清掃に使用できます。

管理医療機器 歯科用セメントキット
パナビア® V5

医療機器認証番号：226ABBZX00106000
● スターターキット (ユニバーサル)



管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
SAルーティング® Multi

医療機器認証番号：230ABBZX00096000
● オートミックス 単品 ● ハンドミックス 単品

●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
管理医療機器 歯科根管管用ポスト成形品 医療機器認証番号：301ABBZX00019000 クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ
管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：223AFBZX00185000 ノリタケ カタナ®ジルコニア ディスク 管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：226AFBZX00116000 カタナ® アベンシア® ブロック
管理医療機器 歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材料) (歯科金属用接着材料) (歯科用知覚過敏抑制材料) 医療機器認証番号：228ABBZX00065000 クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)
フリーダイヤル：0120-330-922

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 **株式会社 モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020
<http://www.dental-plaza.com>

クラレノリタケデンタル公式アプリ



Download on the
App Store

Google Play
で手に入れよう

クラレノリタケデンタル

検索

サポート OS バージョン iOS9.0 以上 / Android 5.0 以上