





# ワムキー クラウンリムーバー

## 早くて簡単な クラウンリムーバー

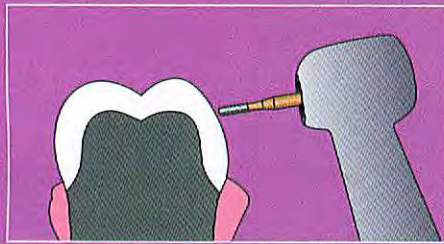

カーバイトバーでクラウンに  
穴を開ける

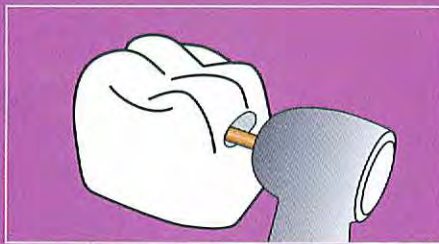


ワムキークラウンリムーバー  
No.1 を穴に入れる



ワムキークラウンリムーバー  
No.1 をひねりクラウン除去する



クラウン除去完了

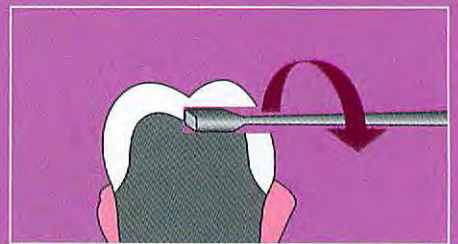

除去後のクラウン 開けた穴  
以外の形状が変わっていない



クラウン除去後の状態

## —— ワムキークラウンリムーバーを使った先生の感想 ——

**手にした瞬間、鳥肌が立った！**

決して大げさではない。

20年も歯科医をやっていると、滅多なことでは感動しなくなってくる。そんな私が、まさに久々にボディブローをくらった感じだった。

「まちがいないける！」

瞬時にそう思いながら、ほくそ笑んだ。

削り出しで出来た鋼の塊は、製作者のクラフトマンシップさえ感じられる重量感があり、何度も握りながらそのバランスの良さに感動さえ覚えるのである。

勿論、ワムキークラウンリムーバーはこれらの使用前の直感を裏切ることはなかった。ワムキークラウンリムーバーに出会うまでは、FCKを外す時は、カーバイトバーで頬側と咬合面にしっかりとスリットを入れてからこじって外していた。

ところがである。

ワムキークラウンリムーバーは、**頬側にわずか5mm幅の穴をあけるだけで**良いのである。そして、ワムキークラウンリムーバーNo.1を挿入し**45度ほど軽くひねるだけで**、いともたやすく快感を実感できるのである。文章を読んでいてわかると思うが、つまるところ**所要時間は、約4分の1に**短縮されるのである。患者さんの負担を数値では表わすことはできないが、負担の軽減が歯科医師への信頼を生むのは、いまさら言うまでもない。

ちなみに

ワムキークラウンリムーバーNo.1のみで全体の約7割は、除去できる。ワムキークラウンリムーバーNo.2は、25%。

ワムキークラウンリムーバーNo.3まで使用するのは、5%ぐらいかと思われる。

さらに、除去時にマージンを変形させることがほとんど無いため、TEKとしてそのまま利用可能なのである。

誠にありがたい話である。

不思議なもので、この仕事を重ねてくると、良き仕事の為の良きツールは、ファーストインプレッションでわかるようになってくるのは、私だけではないはずだ。

もっとも、それは数多くの期待外れの商品に騙され続けた結果なのだが・・・（人生に似ているかもしれない?!）

**一度、握ってもらえばわかるはず！**

**是非！！**

若松歯科医院（埼玉県三郷市）

小島理史先生



※本記事は、個人の感想であり、効能・効果を保障するものではありません。  
ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。



## ワムキークラウンリムーバー

ワムキークラウンリムーバーは以下の事例で非常に有効です。

- クラウンの中を確認して治療方法を確定したい時
- 部分的に接着が弱くなっているブリッジ  
ブリッジの除去においてブリッジのクラウンを分割する必要はありません。

ただひねるだけ！

ワムキークラウンリムーバー No.1 を穴の一番奥まで入れ、クラウンを外すために器具をやさしくひねります。作業はクラウンの厚みに関係ありません。

指先だけを使います！

手首を使ってしまうと関節の構造上持ち上げる動きをしてしまいます。指先で器具を操作することで、適切な力でひねることができます。

クラウンが外れないときは？

もし作業中（ひねっているとき）不自然な抵抗を感じたら、可動域を増やすために穴を広げて下さい。このような抵抗はクラウンの調整位置が高いことに起因することもあります。この問題は白歯部の高くて大きいクラウンで起きることが多いので、ワムキークラウンリムーバー No.1 や No.2 で無理やり作業せず、No.3 が入る大きさに穴を広げてから再度作業して下さい。よりクラウンに力が伝わります。

# WAMkey



左からワムキークラウンリムーバー No.1、No.2、No.3 の先端部の拡大図  
(No.1 の先端の形状は非対称)

医療機器届出番号 13B1XC0133000032

記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

注意

- 絶対に持ち上げる動きはしないでください  
器具やプレパレーションにダメージを与えることがあるので上下に動かさないでください。  
必ずワムキークラウンリムーバー No.1 から始めるようにしてください。ワムキークラウンリムーバー No.2 や No.3 から始めてしまうと、持ち上げる動きをしてしまいます。
- 補綴物の除去以外の目的に使用すると破損するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。
- 使用前に 134℃ で 20 分間オートクレーブをかけてください。

失敗したときは

強い抵抗を感じる時は無理に作業を続けしないでください。歯やプレパレーションを傷つけるおそれがあります。

この場合、通常の方法でクラウン除去してください。



解説 CD

ワムキークラウンリムーバー  
全長 145.5mm

商品名 **ワムキークラウンリムーバー**

セット内容 標準価格 40,000 円 (税別)  
ワムキークラウンリムーバー No.1  
ワムキークラウンリムーバー No.2  
ワムキークラウンリムーバー No.3、各 1 本、計 3 本、解説 CD

各 1 本 標準価格 15,000 円 (税別)  
ワムキークラウンリムーバー No.1  
ワムキークラウンリムーバー No.2  
ワムキークラウンリムーバー No.3

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋 1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060  
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : [cf@yoshida-net.co.jp](mailto:cf@yoshida-net.co.jp)

製造販売元：株式会社吉田製作所