



FENDERMATE®




歯間に合わせてあらかじめ曲げてあるフェンダーメイトを差し込む




自然なコンタクトポイントを形成



余剰無く歯頸部を充填

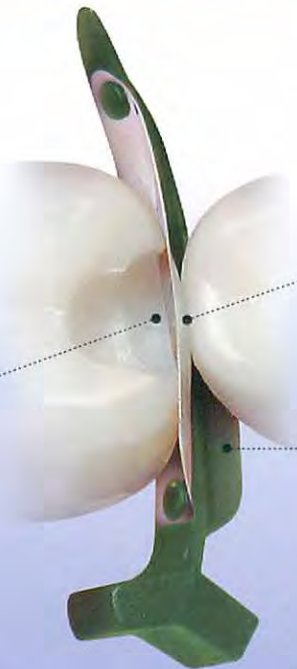

適切に余剰なく歯頸部に充填

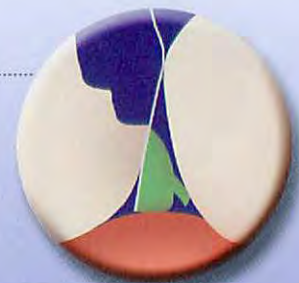

歯間を広げながら歯頸部を押さえる

早くて簡単なマトリックス



1 フェンダーウェッジ・プロを使用し形成を完了



2 歯間を広げながらフェンダーメイトを差し込みます



3 充填し、圧接形成します



4 フェンダーメイトを抜き取って余剰分を形成します



5 良好な修復状態が続いている

注意

- ・フェンダーメイトを差し込む前にボンディング材を塗布してください。
- ・歯間を広げるようにして差し込んでください。
- ・よりきつく差し込んだ方が、自然な仕上がりになります。
- ・使用後に歯間が多少開いていても自然に戻ります。
- ・差し込みができないときは種類を変えるか、使用を止めてください。



商品名 **フェンダーメイト**

アソート 標準価格 25,200 円 (税別)
(レフトM, レフトL, ライトM, ライトL 各 18 個) 計 72 個入

単品各 1 箱 標準価格 6,840 円 (税別)
(レフトM, レフトL, ライトM, ライトL) 18 個入