

ディスプレイザブルの保持器具として、小さくて壊れやすいもの(インレー、オンレー、クラウン、ラミネートベニア、バンド、ブラケット、クラスプ、ポストなど)を確実に保持できます。



【セラミックインレーでの使用例】



石膏模型



BéR 根岸由紀子製作



模型上におけるハイブリッドセラミックインレー



模型上のハイブリッドセラミックインレーにスティックンプレイスを押しつけ保持させる



模型から外す



口腔内試適



適合を確認してエッチング処理



洗浄後乾燥させる



シランカップリング処理及びボンディング処理



セメント塗布



余剰セメントの除去



光照射



スティックンプレイスの取外し



セット後





【ファイバーポストでの使用例】



ファイバーポストをスティックンプレイスに保持させる



マーキングする



試 適



ファイバーポストの切断



切断後

**STIK-N-PLACE®**



**スティックンプレイス**

50本入り (1プレート10本×5プレート)

標準価格 **2,500円** (税別)

医療機器届出番号13B1X00133000019

〈注 意〉

- ・唾液や水分が付いた状態で使用すると粘着力が低下します。充填材、修復材等は、十分乾かしてから保持してください。乾燥下で一度保持させた後は、水分があっても粘着力が低下することは少なくなります。
- ・補綴物は、近心窩及び遠心窩に近いところで保持させます。
- ・スティックンプレイスは補綴物着材の硬化後に取り外して下さい。硬化前に取り外しますと、補綴物が浮き上がり、気泡の混入の原因となってしまいます。また外す際には少しねじると外しやすくなります。
- ・スティックンプレイスと補綴物の間にセメントが接触した場合、粘着力は低下し保持できなくなります。
- ・直射日光とほこりを避けて冷暗所に保管してください。
- ・再使用禁止。1回の処理に1本をお使いください。

記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1080  
URL : http://www.crossf.com E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所