



## 簡単に洗い流せる歯垢染色液（ペレットタイプ）

### 3ステップの簡単プラークチェック



Step 1  
歯垢染色液がペレットに染み込んでいるため  
1ステップで適応箇所に塗布できる



Step 2  
うがい後に青色LED（波長250-490nm）を  
照射し黄色の蛍光色に光るプラークを確認  
\*市販の青色LEDをご使用ください



Step 3  
ブラッシング指導等を終えた後簡単に洗い流せる

## 患者さんの嫌がるプラークチェックを 気軽にできます

### プラークテクト・ペレットの特徴

- ✓ ペレットタイプなので液の飛散がない
- ✓ スピットンに液が残らないので清掃の必要がなく、清潔で患者さんの印象が良い
- ✓ 十分に液が染み込んでいるため、余分に液を使わなくて済む
- ✓ 水で簡単に洗い流せる
- ✓ 洗い残しがあっても色が目立たず快適
- ✓ 患者さんにも分かりやすく、やさしい黄色い蛍光色

「裏面の東京都健康長寿医療センター 平野 浩彦先生の記事をご覧ください。」



従来の染め出し液では気になる汚れも  
プラークテクト・ペレットでは気にならない



商品名 プラークテクト・ペレット  
標準価格 3,500円(税別)/200個入



清潔で使いやすい  
ペレットタイプ

記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060  
URL: <http://www.crossf.com> E-mail: [cf@yoshida-net.co.jp](mailto:cf@yoshida-net.co.jp)

輸入元：株式会社吉田製作所

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-3631-2204 FAX 03-3635-1060

お問い合わせは

# 液の飛散を気にしないで歯垢染色が出来る ブラクテクト・ペレットについて

口腔衛生を評価する方法として、歯垢染色は最もポピュラーな方法です。従来様々なタイプの製品があり、歯垢を赤や青で染め可視化し、歯面清掃の補助や歯面清掃指導に用いるものが主流です。これらの製品は、診療室での使用を主目的としたものがほとんどでした。

以前、介護予防を目的とした地域在住高齢者の方々へ、口腔衛生に関するお話しをする機会があり、地域公民館での歯垢染色をすることを企画しました。従来製品では、衣服に染めだし液が付着したり（エプロンが必要）、染め出し後の歯面に付着した薬剤を除去することが困難（染め出し後のブラッシングが必要）なことから、その企画をあきらめかけていました。その時に会った製品が「ブラクライト」（アメリカ製）でした。付属歯垢染色液（ブラクライト液）を少量口腔内に滴下しライトで歯垢を照らし出すシス

テムで、従来製品の前述した欠点を補うものでした。診療室以外の、公民館、研修施設などでの使用がし易く（床、洗面台などへの染色液飛散がない）、歯垢自体が染色されることがないことから、参加者がそのまま帰宅できる利便性などから、高齢者対象の多くの研修会で使用しました。しかし、「ブラクライト」がしばらくして、製造中止となり使用機会も減っていきました。今回紹介する「ブラクテクト・ペレット」（スウェーデン製）は「ブラクライト」のシステムを踏襲するものと伺い、早速ためしてみました。染色方

法が、液を滴下するのではなく、染色液を含んだ「ブラクテクト・ペレット」で歯面に塗布するシステムに変化していますが、市販の青色LEDライト（波長 250-490nm）で歯垢が照らし出され、「ブラクライト」と同様の使用感でした。

歯科診療室という医療現場だけでなく、高齢者向けの介護予防教室（口腔機能向上）などでの使用に適した製品が再度製品として広く用いられることを期待します。



東京都健康長寿医療センター  
研究所 社会科学系 専門副部長

平野 浩彦



\*本記事は、個人の感想であり、効能・効果を保証するものではありません。