

スウェーデンの歯科医師によってデザインされた
ラクスエーター・ルートピッカー

Luxator[®]
Root Picker

NEW!

〽〽 抜歯中に使える新感覚のインスツルメント

曲

滑りにくいホール加工

直

歯科医師考案の安定した
把持が可能な先端部

特徴

小さくてつかみにくい歯根の一部は通常のツイザーやプライヤーで把持するのは困難です。先端に特徴のあるラクスエーター・ルートピッカーは把持及び除去が可能です。手になじんで滑りにくいホール加工をハンドルに採用。



使用例



残存歯抜歯前



残存歯をラクスエーター・ルートピッカーで把持

ツイザーでは滑ってしまい把持が困難な残存歯でもラクスエーター・ルートピッカーを使用することでストレスなく安定した残根の除去が可能

写真提供: 歯医者 森 俊道 (埼玉県越谷市)

用途

- ・ 残根歯の把持および除去。
- ・ 歯周靭帯に強固に付着している歯根の把持および除去。

商品名 **ラクスエーター・ルートピッカー**

直 (1本入り) 標準価格 8,500円 (税別)

曲 (1本入り) 標準価格 8,500円 (税別)

2本セット (直、曲) 標準価格 16,000円 (税別)

医療機器届出番号 13B1X00133000033

Luxator[®] **FORTE** ラクスエーター・フォルテ



ラクスエーター・フォルテ F25

74mm




ラクスエーター・フォルテ F32

74mm



ラクスエーター・フォルテ F40

74mm

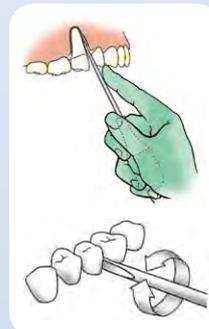

標準価格 1本 9,500円 (税別)

- ハンドルは滑りにくいプラスチック製。(ラクスエーター・プラスと同じハンドル)
- 通常のエレベーターとしてお使いいただけます。
- ラクスエーター・プラスの補完品としてお使いいただけます。

滅菌方法: オートクレーブ、ケミクレーブ
変色することがございますが品質には問題ありません

注意: ラクスエーター・プラスとは製品が異なります。
ラクスエーター・プラスは、通常のエレベーターとしてはご利用できません。

医療機器届出番号 13B1X00133000024

力に頼らない、無理のない抜歯ができる ラクスエーター・プラス Luxator® Plus

当社実施アンケート結果 (有効回答数: 33)



総合評価

時間は？

処置は？

<p>グリーン 残根/根尖</p> <p>2S 9,500円 (2mm Straight)</p>	<p>S2S 9,500円 (2Sの短いもの)</p> <p>グリーン 残根/根尖</p>
<p>ブラック ※全部位</p> <p>3C 9,500円 (3mm Curve)</p>	<p>S3C 9,500円 (3Cの短いもの)</p> <p>ブラック ※全部位</p>
<p>グレー ※全部位</p> <p>3S 9,500円 (3mm Straight)</p>	<p>S3S 9,500円 (3Sの短いもの)</p> <p>グレー ※全部位</p>
<p>ブルー 舌側/口蓋側/臼歯遠心</p> <p>3CA 9,500円 (3mm Contra Angle)</p>	<p>S3CA 9,500円 (3CAの短いもの)</p> <p>ブルー 舌側/口蓋側/臼歯遠心</p>
<p>ライトブルー 舌側/口蓋側/臼歯遠心</p> <p>3IC 9,500円 (3mm Inverted Curve)</p>	<p>1S 9,500円 (1mm Straight)</p> <p>ライトグリーン 残根/根尖</p>
<p>ブラウン 大白歯</p> <p>5C 9,500円 (5mm Curve)</p>	<p>DE3 11,000円 (Dual Edge 3mm)</p> <p>グレー 残根</p>
<p>ライトブラウン 大白歯</p> <p>5S 9,500円 (5mm Straight)</p>	<p>DE5 11,000円 (Dual Edge 5mm)</p> <p>ライトブラウン 残根</p>

シャープニングツール 2,200円

※全部位=残根、根尖、舌側、口蓋側、臼歯遠心

ラクスエーター・プラス 標準価格 (税別)

- K4 (スタンダード4本) 34,000円
4本セット (3C 3S 5C 5S) + シャープニングツール1本 / 解説CD-ROM付き
- ◆ SK4 (ショートモデル4本) 34,000円
4本セット (S2S S3C S3S S3CA) + シャープニングツール1本 / 解説CD-ROM付き
- K7 (スタンダード7本) 56,000円
7本セット (2S 3C 3S 3CA 3IC 5C 5S) + シャープニングツール1本 / 解説CD-ROM付き

- 1本 1S, 2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC 9,500円
5C, 5S, S2S, S3C, S3S, S3CA
- 1本 DE3, DE5 11,000円
- シャープニングツール 2,200円

〔使用方法〕

1. 歯牙長軸方向に対して真直ぐに挿入します。



2. 歯牙に沿わせて歯槽骨を圧迫しながら歯周靭帯を切り進めていきます。




3. 根長の3分の2程度切断していくと楔効果により歯牙を脱臼できます。



〔注意〕

エレベーターのように使用できません。間違った使用方法によるブレードの破損や折れは保証の対象になりません。

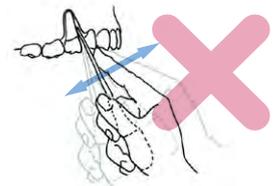

医療機器届出番号 13B1X00133000007

本製品は鋭い刃先を持っています。取扱にはご注意ください。

記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-3631-2204 FAX 03-3635-1060