

CR修復用マトリックス フェンダーメイト

FENDERMATE

早くて簡単なマトリックス

・フェンダーウェッジ・プロにて隣接歯を 保護しながら形成すると歯間が広がって いるので、よりフェンダーメイトを入れ やすくなります。





適切に余剰なく歯頸部に充填







歯間を広げながら歯頸部を押さえる



CR 修復



フェンダーメイトを差し込みます









歯間に合わせた形の フェンダーメイトを

余剰無く歯頸部に充填

差し込む

フェンダーメイトを抜き取って 余剰分を形成します

夏さ =0.05mm

良好な修復状態

写真提供:藤本歯科医院(千葉県八千代市)藤本真存先生



レフト Narrow (ライトグリーン)

商品名 フェンダーメイト











(ライトブルー)

医療機器届出番号 13B1X00133000028

標準価格 22,320 円 (税別) @310円 (レフト N, レフト R, ライト N, ライト R 各 18 個) 計 72 個入 単品 各 1 箱 標準価格 6,120 円 (税別) @340円(レフトN,レフトR,ライトN,ライトR) 18 個入 単品バリューパック 各1箱

レフト Regular

標準価格 26,000 円 (税別) @260円 (レフトN, レフトR, ライトN, ライトR) 100 個入

フェンダーウェッジ・プロ&フェンダーメイト イントロキット 医療機器組出番号 1381 X00133000036 標準価格 7,000円 (税別) (フェンダーウェッジ・プロ / SS3個、S3個、M1個、L1個) 計8個入

(フェンダーメイト / レフトN8個、レフトR2個、ライトN8個、ライトR2個) 計20個入

形成も可能な小児用マトリックスが登場

FENDERMATEPRIME

小児用に早く簡単で安全な **隣接歯保護と修復をサポート**

- ・乳歯のプレパレーション時に隣接歯を傷つける心配がありません。
- ・ボート形にデザインされた先端は、歯肉の破損を抑え、 出血の危険性を減らします。
- ・必要に応じて左右に曲げられます。







プレパレーション時に隣 接歯と歯肉の保護が可能





曲げられるマトリックス 近、遠心面の充填も可能



. 形成·CR 修復



安心して形成できます



隣接歯を傷つける心配がないので、 形成後、近遠心面の充填が同時に行なえ、診療時間の短縮になります

兼元妙子先生のコメント

で非常に役立つ製品です。


勧めします。

写真提供:タエ小児歯科クリニック(千葉県船橋市「日本小児歯科学会専門医指導医」)兼元妙子先生

ロング ネオングリーン





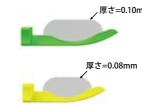

商品名 フェンダーメイト

医療機器届出番号 13B1X00133000028

プライム アソート

プライム 単品各1箱

標準価格 6,480 円 (税別) @180円

標準価格 3.600 円 (税別) @200円

(プライムロング、プライムショート 各 18 個) 計 36 個入

プライムロング (ネオングリーン)

18個入り

プライムショート (ネオンイエロー)

18個入り

・フェンダーメイトを差し込む前にボンディング材を塗布してください。 ・歯間を広げるようにして差し込んでください。

フェンダーメイトのプライムは小児歯科のCR修復

今までよりも早くて簡便に使えるプライムは、患児

の処置時間が短く負担を軽減でき、多くの症例でお

※本記事は、個人の感想であり、効能・効果を保証するものではありません。 ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

よりきつく差し込んだ方が、自然な仕上がりになります。

歯間乳頭部の腫れがある際は使用しないで下さい。 近遠心面同時にCR修復する際はプライムのプレート両面に分離剤

を塗布すると外しやすくなります。

- ・使用後に歯間が多少開いていても自然に戻ります。
- 差し込みができないときは種類を変えるか、使用を止めてください。

クロスフィールドWEB

検索
■ ホームページで動画がご覧いただけます。