



Geko Tweezers®

ワムゲコツイーザー



セルフロック式の安全で簡単な 多目的ツイーザー

ツイーザーが補綴物を把持しているので
強く握り続ける必要がなく疲れにくい。

ワムゲコツイーザー

クラシック

New

- セルフロック式の安全で簡便な把持及び試適が可能。
例：クラウン、コットン、ポストなど

先端部溝入り



*実寸大

Classic Tweezers®

商品名

ワムゲコツイーザー クラシック

標準価格 3,200 円 (税別)

医療機器届出番号13B1X00133000037



人工歯、補綴物等



圧排糸



コットン



ポストコア、オンレー等

ワムゲコツイーザー

エンド

New

- 小さくて掴みにくい物も用途に合わせた使い方で把持が可能。
- ツイーザー先端部の内面に溝が3つ形成されているので、大きさ、角度などを変えて把持が可能。
例：ガッタパーチャポイント、ファイバーポスト、ペーパーポイントなど



*実寸大

Endo Tweezers®

商品名

ワムゲコツイーザー エンド

標準価格 3,800 円 (税別)

医療機器届出番号13B1X00133000037



ガッタパーチャ



ペーパーポイント



スクリューポスト



ポスト




Geko Tweezers®

ワムゲコツィーザー
セルフロック式の安全で簡単な多目的ツィーザー



ワムゲコツィーザー オリジナル

- ツィーザーが補綴物を把持しているため、強く握り続ける必要がなく疲れにくい。
- 補綴物が落ちる心配がほとんどない。

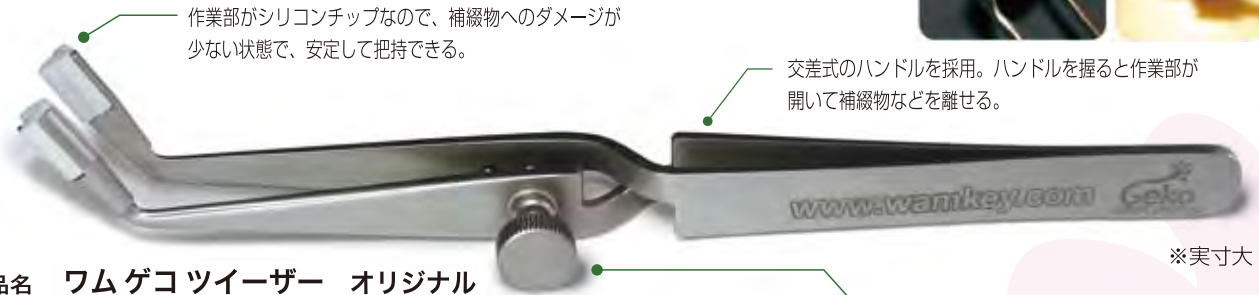

作業部がシリコンチップなので、補綴物へのダメージが少ない状態で、安定して把持できる。

交差式のハンドルを採用。ハンドルを握ると作業部が開いて補綴物などを離せる。


※実寸大

商品名 **ワムゲコツィーザー オリジナル**

セット内容 標準価格 **26,000 円 (税別)**

| | |
|-----------------|------------|
| ワムゲコツィーザー オリジナル | 1 個 |
| ワムゲコシリコンチップ | 1 袋 (20 入) |
| ワムゲコペースト | 1 個 (5ml) |
| 調整ネジ | 1 個 |

医療機器届出番号 13B1X00133000037

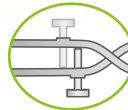

調整ネジはどちら側でも使用できる。


調整ネジを締めるとストッパーが働き、把持力が弱まるので補綴物へのダメージを少なくできる。(調整ネジを外しても使用できる)

クラウン除去でお困りの先生をサポートします




ワムキー クラウンリムーバー


早くて簡単なクラウンリムーバー

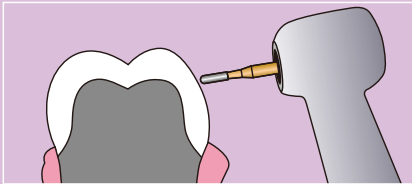


カーバイドバーでクラウンに穴を開ける

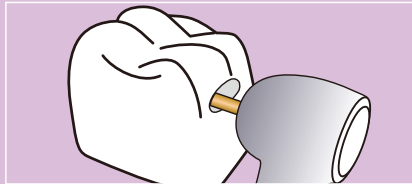


ワムキー クラウンリムーバー No.1 を穴に入れる

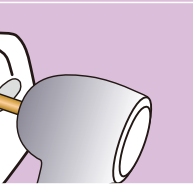

ワムキー クラウンリムーバー No.1 をひねりクラウン除去する

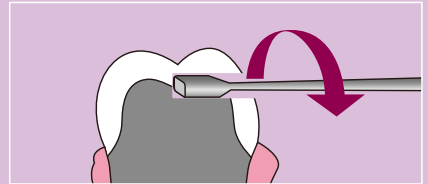

クラウン除去完了

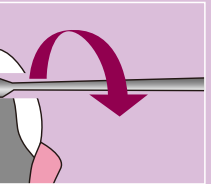

除去後のクラウン 開けた穴以外の形状が変わっていない

クラウン除去後の状態

医療機器届出番号 13B1X00133000032

商品名 **ワムキー クラウンリムーバー**

セット内容 標準価格 **40,000 円 (税別)**

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| ワムキー クラウンリムーバー No.1 | 各 1 本 | 標準価格 15,000 円 (税別) |
| ワムキー クラウンリムーバー No.2 | | |
| ワムキー クラウンリムーバー No.3、 | | |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| ワムキー クラウンリムーバー No.1 | 各 1 本 | 標準価格 15,000 円 (税別) |
| ワムキー クラウンリムーバー No.2 | | |
| ワムキー クラウンリムーバー No.3 | | |

詳しくは単品カタログをご覧ください

長くご使用いただくために、絶対にグリップを握って上下に動かさないで下さい。曲がる原因になります。



解説 CD

ワムキー クラウンリムーバー
全長 145.5mm



左からワムキー クラウンリムーバー No.1、No.2、No.3 の先端部の拡大図
(No.1 の先端の形状は非対称)

記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは



販売元: **クロスフィールド 株式会社**

〒130-8516 東京都墨田区江東橋 1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所