




# ボンディング液、エッチング液等の使用量を 必要最小限に抑えるアплиケーター

## アплиケーター・ネオ


用途：ボンディング液・エッチング液・キャビティライナー・知覚過敏抑制材等の塗布

実寸大

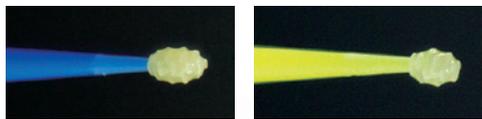


TPE 素材のヘッドは薬液を吸収しにくいいため  
余分な薬液を使わず経済的

接着剤を使用していないヘッドは、繊維が落ちないため衛生的

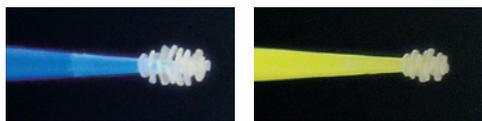

毛細管現象により必要量の薬液を確実に吸着し、  
ほぼ同じ量をリリース

先端：TPE 素材

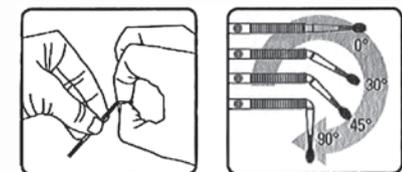

\*用途に合わせて折り曲げてお使いください  
(反復しますと折れやすくなります)

使いやすいフレキシブルヘッド

ハンドル：PP 素材



\*イントロキット ●●●●●  
各種 100 本入り 計 400 本入り

商品名：アплиケーター・ネオ (単回使用)

イントロキット ●●●●●

400 本入り ● ブルー (レギュラー/ノーマル) ● グリーン (レギュラー/ソフト)  
● イエロー (ファイン/ノーマル) ● ピンク (ファイン/ソフト)  
標準価格 5,000 円 (税別) 各種 100 本入り

単品

100 本入り ● ブルー (レギュラー/ノーマル) ● グリーン (レギュラー/ソフト)  
● イエロー (ファイン/ノーマル) ● ピンク (ファイン/ソフト)  
標準価格 1,300 円 (税別)


医療機器届出番号：13B1X00133000041

You do precision work.  
We create your tools.

transcōdent®

一般的にディスポーザブルアプリケーションは、先端部にブラシを用いたものと、非吸収性・耐薬品性の繊維やスポンジを用いたものに大別される。



アプリケーション・ネオは、特殊加工した TPE 製の先端を用いることで、薬液が吸収されることなく必要量を的確に採取することができる。

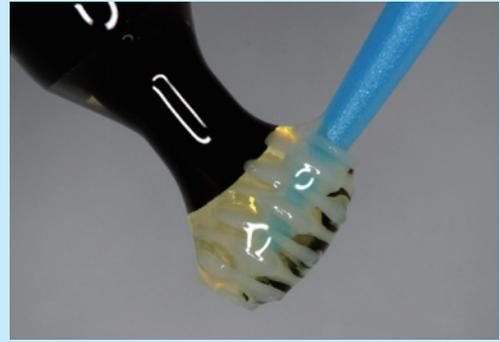

### 使用例



アプリケーション・ネオは、エッチング液・プライマー液・ボンディング液など薬液の種類を問わず用いることができる

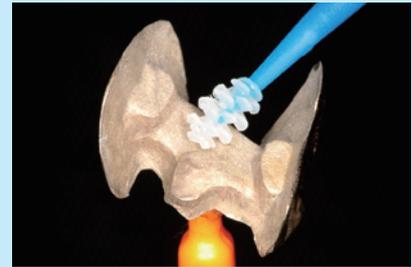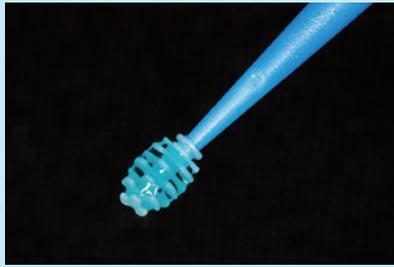

アプリケーション・ネオに採取した薬液で補綴物内面処理を行う（補綴物把持にステイクンプレイスを使用）



アプリケーション・ネオに採取した薬液で歯面処理を行う



インレー装着後

記事提供:ナカエ歯科クリニック(神奈川県葉山町) 前畑 香 先生

\*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

## Four colours – two softnesses, two sizes – for flexible and precise application.

サイズ (ヘッド径)	柔らかさ	カラー
レギュラー ( $\phi$ 2.0mm)	ノーマル	ブルー
レギュラー ( $\phi$ 2.0mm)	ソフト	グリーン
ファイン ( $\phi$ 1.8mm)	ノーマル	イエロー
ファイン ( $\phi$ 1.8mm)	ソフト	ピンク



記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060  
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : [cf@yoshida-net.co.jp](mailto:cf@yoshida-net.co.jp)

製造販売元：株式会社吉田製作所

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-3631-2204 FAX 03-3635-1060

お問い合わせは