

# フレキシブル ペリオトーム

**曲がる、しなる、  
だから折れにくい  
そして永く使える**

フレキシブル ペリオトーム 直



曲がる しなる

ステンレススチール製

力が加わると“しなる”ため、折れにくく、永く使用できます。

フレキシブルな先端は歯根膜への挿入を容易にし、診療中のストレスが軽減されます。

- 先端部はブレード、両側面は鋸歯状の構造からなり、左右にぶれにくい挿入をサポート



商品名 **フレキシブル ペリオトーム**

医療機器届出番号 : 13B1X00133000054  
オートクレーブ対応 (121℃)

- 持ち易く、滑りにくい加工

- マレット対応



\*実寸大 (151mm)

- **フレキシブル ペリオトーム 直**  
標準価格 16,500 円 / 本 (税別)



\*実寸大 (153mm)

- **フレキシブル ペリオトーム 曲**  
標準価格 16,500 円 / 本 (税別)



マレット非対応

\*実寸大 (148mm)

- **ルート エクストラクター**  
標準価格 16,500 円 / 本 (税別)

\*ルート エクストラクターはしなりません

## ■ 抜歯時のマストアイテム ■

抜歯時の歯頸部周囲の愛護的処置は、その後の処置を優位に進めるために大切なポイントとなる。このことは、抜歯後同部位がブリッジのポンティックになる場合や、特にインプラントになる場合には、歯肉形態の審美性に影響を与えるため、十分な配慮が求められる。

歯冠部が崩壊し残根状を呈する歯の抜歯は、抜歯鉗子の掛かる部分が存在しない場合が多い。そのため、歯頸部周囲歯肉の挫滅や歯頸部周囲骨への過度な損傷を与えることが少なく無い。

歯頸部周囲組織を愛護的に扱いながら、短時間で抜歯を行うためには、歯冠乳頭に損傷を与えることなく、歯根膜腔に確実に挿入することの出来るインスツルメントが求められる。

この目的に最も適するインスツルメントが「フレキシブル ペリオトーム」である。このフレキシブル ペリオトームは特殊加工が施されたステンレススチールで造られているため、ほど良くしなる特性を有している。この性状が歯根膜腔への無理のない挿入を可能にすると同時に、より深部に到達することを可能としている。また、しなることでマレットリング時に破折が生じる危険性を防ぐ利点も有している。

さらに「ルート エクストラクター」は根管内に回転させながら挿入する。タップが付与されたネジ状の形状は、歯根を確実に保持することができ、フレキシブル ペリオトームで垂脱臼した歯根を、歯周周囲組織に侵襲を加えることなく歯根を引き抜くことができる。

「フレキシブル ペリオトーム」と「ルート エクストラクター」は確実性と安全性の2つの高い有用性を併せ持つインスツルメントであり、歯科臨床のマストアイテムである。



上顎右側側切歯は歯肉線下で残根状を呈する



術後の処置を考慮し、抜歯は周囲組織の損傷を必要最低限に抑える必要がある



探針にて歯周靭帯を切離



フレキシブル ペリオトーム 直を、口蓋近心隅角部に突押し挿入、歯根膜を徐々に拡大する



口蓋側を同様に処置



拡大した歯根膜腔に2本目のフレキシブル ペリオトーム 直を突押し、歯根を動揺させる



ルート エクストラクターを回転させながら押し込み、歯根を保持する



歯軸方向に牽引しながら抜歯を行う



歯周組織の損傷は僅かであり、出血も少量



良好な歯肉が観察できる



通法より低侵襲な愛護的抜歯を行う事ができた



良好な術後 14 日の口腔内

記事提供：松本歯科大学臨床教授  
東京ステーション歯科クリニック（東京都中央区）  
院長 小川 洋一

\*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書をよくお読みください。

記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは