

SpotIt

スポット イット ハンドル付きフロス型 コンタクトマーカ―

- クラウンやブリッジ等、補綴物のコンタクトポイントを容易に識別
- たて型（ストレート）とよこ型（アングル）の2タイプ
- 咬合紙不要の高い操作性
- 短時間で正確にコンタクトポイントの調整が可能

商品名

スポット イット

医療機器届出番号 13B1X00133000057

標準価格 各 4,860 円（税別） / 18 個入り @270 円

たて型 18 個入り

よこ型 18 個入り

アソート 18 個入り（たて型 9 個 よこ型 9 個）



*糸の太さは 400 デニール（約 0.1mm）

ありそうでなかった便利アイテム ハンドル付きフロス型 コンタクトマーカ― 「スポット イット」

複雑インレー、クラウン&ブリッジのセット時、避けて通れないのがコンタクトポイントの調整作業。きつすぎるコンタクトを調整する際の便利なアイテムが「スポット イット」だ。使い方は簡単。まず修復物を装着し、コンタクト面にフロスを挿入する要領で入れるだけ。そして修復物を取り出してみると、当たっている部分にブルーの色が付く。そのマークを調整していくというわけだ。たて型（ストレート）とよこ型（アングル）の2種類があるので、前歯部、臼歯部など部位によって使い分けられる。使い勝手としては、片手で修復物を押さ

ササマ歯科クリニック
（東京都渋谷区）
院長 笹間康弘



えながら、もう一方の手で「スポット イット」を入れられるので、術者が一人で出来る。抑えにくい臼歯部も Y 字形に大きく空間が開いているので、ストッパー等の器具や手指で押さえることも容易である。滑沢に研磨されたセラミックにもハッキリとマークが付くので強く当たっているところ（調整すべき部分）が明確に解り、調整作業が容易に行え、時間も短縮できる。1 個ずつシングルパックになっており、衛生的に使える。ありそうでなかった便利アイテムだ。



スポット イットよこ型で臼歯部でも簡単にコンタクト面をマーキング



滑沢に研磨されたセラミックでもはっきりとマーキング

*本記事は、先生のご経験に基づくものであり、効能・効果等を保証するものではありません。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元：株式会社吉田製作所