

スウェーデンの歯科医師によってデザインされた
ラクセーターシリーズに耐久性を追求したチタンコーティング

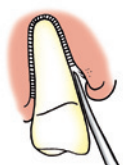
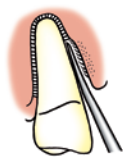
- 歯根膜への挿入が容易
- 生体親和性が高いチタンコーティング
- シャーピング不要

商品名
ラクセーター・プラス

医療機器届出番号 13B1X00133000007

! エレベーターのように使用できません
不適切な使用法によるブレードの破損や折れ、
及びシャーピングによるコーティングの剥がれは
保証の対象になりません。

使用方法

- 
- 
- 
1. 歯の長軸方向に対して真直ぐに挿入します
 2. 歯に沿わせて歯槽骨を圧迫しながら歯周靭帯を切り進めていきます
 3. 根長の3分の2程度切断していくと楔効果により歯を脱臼できます

New!

New!

New

品番	3S チタン	2S チタン	DE3 チタン	3A チタン
ブレード幅	3mm	2mm	3/1.5mm	3mm
形状	ストレート	ストレート	ストレート	アングル
シャンク部	約 74mm	約 74mm	約 74mm	約 74mm
色	グレー	グリーン	グレー	パープル
推奨使用部位	全部位 (残根/根尖/舌側/口蓋側/白歯遠心)	残根 / 根尖	残根	遠心、口蓋



3A チタンの使用例

約 15mm

3A チタンの先端部

1.5mm
3mm

DE3 チタンの先端部



15,000 円 / 本 (税別) 15,000 円 / 本 (税別) 16,000 円 / 本 (税別) 16,000 円 / 本 (税別)

* オートクレーブ対応 (135℃)
本製品は鋭い刃先を持っています。
取扱にはご注意ください。

記載されている価格に消費税は含まれません。また、内容・価格は予告なく変更される場合があります。無断転載禁止

お問い合わせは



販売元: クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
URL: http://www.crossf.com E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所