

“アメリカで生まれたホワイトニングシステム”

# NITE ホワイト

エクセル



# NITE ホワイト

## エクセル

### アメリカで生まれたホワイトニングシステム



承認番号: 213008ZG00047000

NITEホワイト・エクセルはアメリカで生まれて、『白くきれいな歯』への意識の高い審美歯科の先進国アメリカで高いシェアを持つホワイトニング材です。


NITEホワイト・エクセルは、同システムの中では早くに厚生労働省の承認を受けました。

歯科医師により作製されたマウストレーにNITEホワイト・エクセルのジェルを用いて使用します。1日2時間の使用で、個人差にもよりますが、およそ2週間という短い期間で着色歯面の改善を行うことができます。

NITEホワイト・エクセルの主成分は過酸化尿素です。過酸化尿素は刺激が少なく、患者さんの自由な時間に、ご都合に合わせて使用頂くことができます。

NITEホワイト・エクセルは、主に加齢による着色、喫煙等外因性による着色、遺伝による着色の改善に使用が可能です。「後戻り」が少なく長い効果の持続が期待できます。

### NITE ホワイト・エクセルのホワイトニング メカニズム

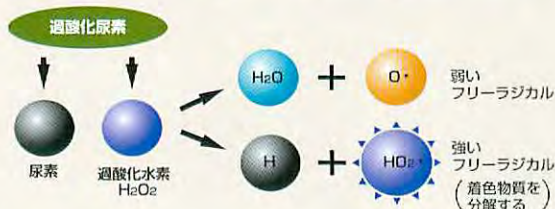

口腔内で化学分解された酸素基がエナメル質や象牙質に浸透し、着色部分だけに作用するため、歯牙の構造を変えずに色調を明るくすることができると考えられています。(上記参照)

Ronald E. Goldstein, DDS David A. Garber, DMD 著 "Complete Dental Bleaching" より引用

### NITE ホワイト・エクセル の使用方法

1 インフォームドコンセントを行い、ホワイトニングについて注意事項の説明をします。

2 口腔内全体の診査をします。この時にホワイトニングの適応症かどうかを判断してください。

3 ホワイトニングの前処置として口腔内全体の除石・清掃を行います。

4 ホワイトニング前の状態でシェードの診査を行い、色調を記録します。

5 口腔内撮影用カメラ等を用いてホワイトニング前の状態を記録します。

6 ホワイトニングする歯列の印象採得を行い、マウストレーを作製します。マウストレー作製後、患者に試着を行い変形がないことを確認してください。

7 マウストレーにホワイトニング材を注入し、患者の口腔内で試適を行います。

8 ホワイトニングは1日2時間以内で、期間は2週間以内となるように患者に指導してください。また、3日に一度は来院させ、トレーの変形・予後の確認をしてください。

### ホワイトニング商品一覧 <NITE ホワイト・エクセル 単品販売>

商品コード	品名	価格
JP15-1216	シェードガイド (25枚入)	¥3,000
JP1047	NWE 患者用小冊子 (V2010) 20枚入	¥800
JP1048	NWE 患者用小冊子 (V2010) スタンドセット	¥1,000
JP1011	患者向プレゼンテーション用ビデオ	¥2,400
JP1013	メンテナンスポストカード (20枚入)	¥600



シェードガイド (25枚入)



患者向プレゼンテーション用ビデオ



NWE 患者用小冊子 (V2010) 20枚入 NWE 患者用小冊子 (V2010) スタンドセット



メンテナンスポストカード (20枚入)

# ホワイトニング商品一覧 <NITE ホワイト・エクセル キット販売>

※ご注文は別紙注文用紙に商品コード・数量・価格・合計金額を明記のうえ、お申し込みください。

商品コード  
JPP1001

NITEホワイト・エクセル スターターキット (ポーチ付) ¥26,700



NITE ホワイト ポーチ



トレーケース

A

EVAシート  
(トレー作製用)

B

※EVAシートのみ。



<キット内容>

- ホワイトニングジェル(シリンジ) 3g×6本
- シリンジ用チップ(トレー注入用) 6個
- トレーケース(トレー保存用) 1個
- EVAシート(トレー作製用) 2枚
- シェードガイド 1枚
- NITE ホワイト ポーチ 1個

× 3 +

- 患者用小冊子(20枚入)
- 患者用小冊子スタンド
- ディスプレイスタンド
- ポスター (モノクローム3枚入)
- ポスター (ファイブモデルカラー 1枚)

※NITEホワイト・エクセル ジェルの有効期間は米国にて製造時から2年間となります。

ポスター  
(モノクローム3枚入り)



ポスター (ファイブモデルカラー 1枚) G



C




患者用小冊子  
(20枚入り)

D



患者用小冊子スタンド

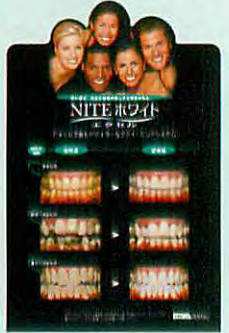

ディスプレイスタンド F

※CとDのセットです。

商品コード  
JPPNWE1300

NITEホワイト・エクセル デラックスキット (ポーチ付) ¥8,900



<キット内容>

- ホワイトニングジェル(シリンジ) 3g×6本
- シリンジ用チップ(トレー注入用) 6個
- トレーケース(トレー保存用) 1個
- EVAシート(トレー作製用) 2枚
- シェードガイド 1枚
- NITE ホワイト ポーチ 1個

商品コード  
JPPNWE1301

NITEホワイト・エクセル デラックスキット×5箱 ¥43,000

商品コード  
JPPNWE1302

NITEホワイト・エクセル デラックスキット×10箱 ¥84,000

商品コード  
JPPNWE1303

NITEホワイト・エクセル デラックスキット×30箱 ¥240,000

商品コード  
JPNWE1093

NITEホワイト・エクセル ミニキット ¥2,900



<キット内容>

- ホワイトニングジェル(シリンジ) 3g×2本
- シリンジ用チップ(トレー注入用) 2個

商品コード  
JPNWE1094

NITEホワイト・エクセル ミニキット×10箱 ¥28,000

商品コード  
JPNWE1095

NITEホワイト・エクセル ミニキット×20箱 ¥54,000

商品コード  
JPNWE1096

NITEホワイト・エクセル ミニキット×50箱 ¥125,000

商品コード	品名	価格	商品写真番号
JP15-1080	トレーケース(10個入)ブルー	¥2,700	A
JP15-1192	EVAシート(12枚入)	¥1,800	B
JP1002	患者用小冊子(20枚入)	¥800	C
JP1003	患者用小冊子スタンド	¥500	D
JP1004	患者用小冊子セット <セット内容>患者用小冊子(20枚入)、小冊子スタンド(1個入)	¥1,300	E

商品コード	品名	価格	商品写真番号
JP1005	受付用ディスプレイスタンド	¥650	F
JP1006	ポスター(ファイブモデルカラー 1枚入)	¥1,800	G
JP1007	ポスター(モノクローム 3枚入)	¥1,500	H
JP1012	NITEホワイト ポーチ(3個入)	¥2,400	I

商品コード JP1050 NITEホワイト・フォーマー DX ¥59,000



NITEホワイト・エクセル専用のEVAシートと、あらかじめ作製したU型（歯列全体）石膏模型をセットし、加熱・吸引することによりマウストレーの成型をする機械です。

届出番号：14B2X00036000003  
製造販売元：株式会社東京技研

商品コード JP1032 スピードストーン ¥3,800



速硬性の硬石膏で5分以内で硬化するため、マウストレー作成の時間短縮が可能となります。「スピードストーン」100gに対して水24mlで、20～30秒の練和の後、印象面に注入します。作業時間は60～90秒です。「スピードストーン」はマウスガードやカスタムトレーの他、矯正装置用模型、義歯の修理、咬合器への作業模型の装着にも応用できます。硬化15分後の圧縮強度は420kg/cmです。

内容量：2kg

届出番号：13B1X00020000012

商品コード JP1042 スピードリリース ¥2,500



EVAシートと石膏模型の分離材です。シリコンを主成分とした分離材で対称面の潤滑性を高め着脱を容易にします。また、マウストレーへの石膏の焼きつきを防止するため、より透明に仕上がります。

内容量：341g

商品コード JP1043 スピードスプレー ¥1,800



印象採得した印象面にスプレーする表面活性材です。使用することにより気泡の発生を防ぎます。また細部まで、鮮明な石膏模型を作製することが出来ます。

内容量：236ml

商品コード JP09211036 歯肉ハサミ ¥16,000



マウストレー等の軟質プレートの辺縁をカットします。ハサミの先端は細く、また、全体がSシェイプ（ダブルシェイプ）となっているので、操作性に優れ、細かい部分のカットに適しています。

届出番号：13B1X00012011002  
製造販売元：日本マーチン株式会社

# supersmile

ホワイトニング&メンテナンス

ホワイトニング後の  
メンテナンスに

白く健康な歯は、あなたに自信と輝きを与えます。

商品コード JP2001 スーパースマイル スターターキット ¥26,880

スーパースマイルは、アメリカで開発された  
ホワイトニング&メンテナンスのみがきです。

スーパースマイル (12本)

スーパースマイル  
商品ディスプレイスタンド

スーパースマイルの秘密



ただ今、販売を  
中止しております。

rox® & フッ素 & ベーキングソーダの配合にあります。alprox® がステイン（汚れ）・プラーク・バクテリア等が付面に繰り返し形成されるたんぱく質の薄い膜（プロテインベ）を除去して白い歯を取り戻し、歯のざらつき感をなくします。

フッ素成分（モノフルオロリン酸ナトリウム）が歯質を強化してむし歯を予防します。

ベーキングソーダが息を爽やかに保ち、健康な歯茎を作ります。スーパースマイルで白く健康な歯、爽やかな息を実感してください。

尚、スーパースマイルには粗い研磨剤は一切使用しておりませんので、エナメル質を傷つける心配はなく、ご使用いただけます。また、ホワイトニング治療を受けた方のメンテナンスに適した歯磨き粉です。

注：このスーパースマイルは日本向けの仕様で、  
過酸化水素は配合されていません。

製造販売業者：スモカ歯磨株式会社  
販売業者：株式会社ミクラーシェ

患者向け価格  
1本 ¥2,940 (税込)

医薬部外品

承認番号：21320DZY00001000

注：キットのみの販売です。単品の販売はしていません。

●NITE ホワイト・エクセルについてのお問い合わせ、ご質問はこちらへ  
専用フリーダイヤル ☎0120-4618-68 注文専用FAXフリーダイヤル ☎0120-4618-67



製造販売業者 アストラテック株式会社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-7-16 専用ホームページ <http://www.astratech.jp/> E-mail アドレス whitening@astratech.jp

お問い合わせ