

歯科用硬質石膏

ニュージプストーン

N E W

強度、硬度、精度、価格の
バランスに優れた
当社のベストセラー商品

G Y P



用途で選べる
6色
バリエーション!!

SSS
NEW GYPSTONE
Dental Stone

Ivory
Yellow

NET WT. 3 kg

SAN-ESU GYPSUM CO., LTD.



S T O N E

※模型の色調は、印象から脱型した直後のものであり、写真撮影のため実際の色とは異なります。

強度、硬度、精度、価格のバランスに優れた、
当社のベストセラー商品です。

DENTAL STONE [6 COLORS]
NEW GYPSTONE
歯科用硬質石膏 ニュージブストーン

歯科用硬質石膏ニュージブストーンは、
歯科医療模型用として、使い易く、各種用途に適しています。

アイボリー
イエロー

ホワイト

ピンク

ブルー

グリーン

グレー

の6色をご用意いたしておりますので用途に応じて色調を
お使い分けいただけます。

特長

- 1 高強度、高硬度です。
- 2 滑らかな模型が得られます。
- 3 高精度の模型が得られます。
- 4 シリーズ6色あります。

用途

インレー、クラウン、ブリッジ、局部義歯、総義歯、矯正用
模型等の製作用。

用法・用量

- 1 粉末100gに対し、水24mlを標準としてください。
操作に支障のない限り水量を少なくすると、より強度、
硬度の大きい模型が得られます。
- 2 練和時間は、真空機械練和では30秒、手練和では
60秒が適切です。
- 3 印象等への注入の際、バイブレーターなどを用いると、
気泡のない模型が得られます。

色調

アイボリーイエロー、ホワイト、ピンク、ブルー、
グリーン、グレー

包装

3kg 箱入 (3kg アルミ) ×6/PC

物理的性質

試験項目 Test Items	測定値(注) Values determined
混水比 (W/P) Water / Powder ratio	0.24
硬化時間 Setting time (min)	10
硬化膨張 <2時間後 (2hr)> Setting expansion (%)	0.20
圧縮強さ Compressive strength (MPa)	49

試験方法: JIS T6605による

Test Method: Based on JIS T6605

(注) 測定値は、弊社での代表的な値であり規格値ではありません。

歯科用硬質石膏 一般医療機器

ニュージブストーン

届出番号27B2X00022000012

SSS サンエス石膏株式会社

URL: <http://www.san-esugypsum.co.jp> E-mail: honbu@san-esugypsum.co.jp

■大阪本社 / 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
〒564-0063 TEL (06)6339-0870(代)

■東京営業所 / 東京都新宿区西新宿7-8-11 美笠ビル5F
〒160-0023 TEL (03)5330-0981(代)

■中部営業所 / 瀬戸市苗場町113
〒489-0983 TEL (0561)82-9185(代)

■関西営業所 / 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
〒564-0063 TEL (06)6339-0870(代)

■福岡営業所 / 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
〒812-0013 TEL (092)413-5220(代)

■お問い合わせ・商品のお求めは下記へ