

DFロック ーホワイトー

2006.01.31（第2版） 歯科材料 8 歯科用石こう及び石こう製品

一般医療機器歯科用硬質石こう（コード 70897020）

届出番号27B2X00022000013

【物理性能】	混水比	0.20
	硬化時間	10分
	硬化膨張	0.08%
	圧縮強さ	63MPa

【性状・成分】粉末 成分：硫酸カルシウム半水塩、その他

原理：本材は水と練和することにより水和硬化する。

【色調】ホワイト、ブラウン色

【容量】1. 5kg×2／化粧箱×6／PC

【使用目的・効能又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる硬質石こう

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 混水量は、本品粉末100gに対し、水20mlが標準です。
- 2) 練和は、30～60秒間、均一になるまで行います。
- 3) 印象に注入します。
 - ・印象に注入する際にバイブレーターを使用すると、より気泡の少ない美しい模型が得られます。
- 4) 模型の場合は石こうが充分硬化した後、印象から取り外して下さい。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意・本材を扱う際（硬化体を研削する場合も含む）には、粉塵による人体の影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
 - ・本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどの防具を使用すること。
 - ・本材は、歯科用硬質石こうの用途以外に使用しないこと。
 - ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ・本材が目には入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

[貯蔵・保管方法]・本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。

- ・開封後は、密封して保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[使用期限] 本材は包装に記載の使用期限までに使用すること。 添付文書が必要な方はお申し出下さい。



製造販売業 サンエス石膏株式会社

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目23番101号
大同生命江坂ビル13F 電話番号 06-6339-0870