

仕上がりなめらか! 各種石膏に適合!

# ニューアルジスター®

歯科用アルギン酸塩印象材 粉末状

クリーンです。  
ダストフリーで清潔です。  
カンタンです。  
水なじみがよくカンタンに練和できます。  
なめらかです。  
面荒れの心配はありません。



Slow  
セット



Normal  
セット



Fast  
セット

サンエス石膏株式会社

**粉末飛散がなく、練りやすく、なめらかな仕上がりで、  
各種石膏と適合します!**

**NEWALGISTAR**  
DENTAL ALGinate IMPRESSION MATERIAL [DUST FREE]  
歯科用アルギン酸塩印象材 粉末状

## 特 長

### 1 粉末が舞い上がらない “ダストフリー” タイプ。

ニューアルジスターには、特殊加工処理がしてあるので、計量や練和の時にフワッと舞い上がるようなことはありません。扱いやすく、作業台や診療室は清潔です。

### 2 “水になじむ” から、 練和もカンタン。

練和の時も、粉末の飛散がないので、すんなりと水になじみます。スピーディーに、均一に練和できます。

### 3 硬石膏、超硬石膏どちらでも なめらかな仕上がり。

硬石膏または超硬石膏のどちらを用いても、模型面はなめらかに仕上がります。

### 4 シャープに硬化、ピッタリ接着。

口腔内でシャープに硬化しますから、印象採得の失敗もなく、精度の高い印象が得られます。

## 用 途

一般印象用、概形印象用



## 使用 方法

- 1 使用前に粉末をよくほぐしてから計量して下さい。
- 2 計量はニューアルジスター専用スプーン、水量計を使用して下さい。
- 3 スパチュラで約30秒手早く練和して下さい。  
機械で練和する場合は、機械メーカーの説明書に従って下さい。
- 4 硬化時間は水温に影響されますので、23℃を標準として下さい。
- 5 印象は流水で洗浄後、必要に応じて消毒を行って下さい。
- 6 余剰水分を取り除き、できるだけすみやかに歯科用石膏を注入して下さい。(トップストーンDF、DFロックを推奨します。)  
すぐに注入できない場合は保湿箱に入れて下さい。
- 7 使用後の印象は医療廃棄物として廃棄して下さい。

|               | スローセット           | ノーマルセット          | ファストセット          |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 口 腔 内<br>保持時間 | 2分<br>↓<br>2分30秒 | 1分30秒<br>↓<br>2分 | 1分<br>↓<br>1分30秒 |
| 色 調           | ホワイト             | ピ ン ク            | グリー ン            |

### ■推奨石膏



DFロック  
トップストーンDF

## 包 装

5kg 箱入(1kg アルミ×5)×2/PC

管理医療機器 ファスト認証番号 第219AABZX00188000号  
ノーマル認証番号 第219AABZX00189000号  
スロー認証番号 第219AABZX00190000号  
製造販売元:サンエス石膏株式会社 製造販売業許可番号 27B2X00022

## SSSサンエス石膏株式会社

URL: <http://www.san-esugypsum.co.jp> E-mail: [honbu@san-esugypsum.co.jp](mailto:honbu@san-esugypsum.co.jp)

■大阪営業部/吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F  
〒564-0063 TEL(06)6339-0870(代)

■東京営業所/東京都新宿区西新宿7-8-11 美笠ビル5F  
〒160-0023 TEL(03)5330-0981(代)

■中部営業所/瀬戸市苗場町113番地  
〒489-0983 TEL(0561)82-9185(代)

■福岡営業所/福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F  
〒812-0013 TEL(092)413-5220(代)

■お問い合わせ・商品のお求めは下記へ