

縮めて剥がす



AL リムーバー

アルギン酸塩
印象材用清掃材

とってもカンタン、
ラクラクリムーバー

トレー清掃を「溶かして取る」から、
発想の転換＝「縮めて剥ぎ取る」方式の
トレークリーナーです。
今までに比べて素早く処理ができて、
トレーも長持ち。沈殿物も残らないので、
とっても清潔です。

トレークリーナー

アルギン酸塩印象材用清掃材

AL リムーバー

縮めて剥がすトレークリーナー

サンエス石膏株式会社



あっという間に...

START!!



縮んで...



剥がれる

GOAL!!



AL リムーバー 縮めて剥がすトレークリーナー

What is AL Remover?

特長


① 処理時間を大幅に短縮します。

(片顎ネットトレーで最短15分です。)



② アルジネート印象材を溶かさず収縮させ剥がします。

トレーをブラシなどで擦ったり、長時間浸漬する必要がないので、トレーを傷めにくくなります。

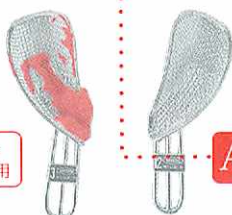

溶かさずタイプの液体トレークリーナーを使用

AL リムーバー

●印象トレー処理後、指で軽く印象材を取り除いた状態

③ 液が汚れにくく、より清潔にご使用いただけます。



溶かさずタイプの液体トレークリーナーを使用

AL リムーバー

●印象トレー12個処理後の液体

④ 抗菌性能があります。

⑤ 減容ボトルを使用し、環境にも配慮しています。

用途

トレーからのアルジネート印象材の除去

標準処理時間

	標準処理時間	SSS ニューアルジスター
片顎ネットトレー	15分～30分	15分
全顎ネットトレー	30分～60分	30分
片顎穴あきトレー	45分～90分	45分
全顎穴あきトレー	60分～120分	60分
片顎穴無しトレー	75分～150分	75分
全顎穴無しトレー	90分～180分	90分

*印象材の種類や温度などの使用条件により変動します。

*石膏を混練するペーストタイプの印象材の場合、片顎ネットトレーなら10分が目安です。

使用方法

① 原液のままご使用下さい。
水で薄めずに使用して下さい。



② 事前にアルジネート印象材をトレーから除去(前処理)する必要はありません。そのまま投入して下さい。

③ 標準処理時間が過ぎましたらトレーを液から取り出して下さい。

④ 速やかにアルジネート印象材を外した後、トレーは流水中で洗浄して下さい。

⑤ 液中に白い沈殿物が発生したり、液全体が白く濁ったら、新しい液と交換して下さい。

*一晩中など、毎回長時間トレーを浸漬すると液の寿命が短くなります。

*トレーの種類や状態により、トレーが変色したり、腐食することがあります。

*40℃以上の液で処理すると、トレーが変色しやすくなります。

*15℃以下の液で処理すると、効果が遅くなりますので常温でご使用ください。

*処理能力の目安は、ALリムーバー2ℓあたり片顎で660個、全顎で300個です。

使用上の注意事項

- ① 本品は弱酸性の薬剤です。
- ② 万一、飲み込んだ場合は、多量の水を飲み、吐いた後医師の診断を受けること。
- ③ 万一、目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ④ 皮膚に付着した場合は、大量の流水で良く洗い落とすこと。
- ⑤ 詳細な内容が必要な場合は、MSDSをご請求下さい。

包装

2,000ml・ポリ容器×4 / PC

*空き容器は折りたたんで廃棄できます。

SSS サンエス石膏株式会社

URL <http://www.san-esugypsum.co.jp>

e-mail honbu@san-esugypsum.co.jp

■大阪本社…〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL.06-6339-0870代

■大阪営業部…〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL.06-6339-0870代

■東京営業所…〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-8-11 美笠ビル5F
TEL.03-5330-0981代

■中部営業所…〒489-0983 瀬戸市苗場町113
TEL.0561-82-9185代

■福岡営業所…〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
TEL.092-413-5220代

■お問い合わせ・商品のお求めは下記へ