



水に溶かして使える！！

院内ふきとり除菌！！

ネオクロールスティック



### スターセット

- 100包入り×1パック
- 専用容器付き



### リフィルセット

- 100包入り×3パック

## ネオクロールスティックの特長

- 院内の床やユニットなどを簡単に除菌できます。
- 顆粒タイプで1回分ずつの個別包装なので、取り扱いが簡単です。
- 速やかに溶解します。
- 長期保存が可能です。（未開封の場合）

サンエス石膏株式会社  
SAN ESU GYPSUM CO.,LTD.

## ご使用方法（500ppmの次亜塩素酸の水溶液）

- ① 2ℓの水にネオクロールスティックを1包入れる。※しっかり溶かし切ってください。
- ② 手袋を着用した手で、次亜塩素酸の水溶液に布巾をつけ、よく絞る。
- ③ 布巾で除菌したい場所を拭きとる。

## ご使用方法例

- ユニット、待合室、家具、床etc.  200～500ppm
- 布マスク、衣類、リネン類  500～1,000ppm
- 嘔吐物等で汚れた床の清掃  5,000ppm



## ※ご注意ください

- 布や革製品にご使用の場合には、目立たない箇所で試してからご使用ください。
- ドアノブなどの金属部分を拭いた後は、必ず水拭きを行ってください。
- 変色しますので、銀製品には使用しないでください。
- 次亜塩素酸の水溶液を、スプレーなどで噴霧しないでください。
- 手指の消毒には使えません。また、ご使用の際は手袋など保護具を着用してください。
- 色付きの衣服類等は脱色する恐れがありますので、目立たない箇所で試してからご使用ください。
- 使い終わった次亜塩素酸の水溶液は排水溝から捨ててください。（1回使い切り）



品名	住宅用除菌剤	液性	中性 (pH6.0-8.0)
成分	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム	内容量	粒状 1.6g/包
反応式	$C_3Cl_2N_3O_3Na + 2H_2O \rightarrow C_3H_2N_3O_3Na + 2HClO$ ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム + 水 → イソシアヌル酸ナトリウム + 次亜塩素酸		
用途	拭き掃除（ドアノブ・手すり、トイレ、床、壁、テーブルなど） 浸漬除菌（食器・まな板、布マスク・衣料・リネンなど）		

## 使用上の注意

本商品は強力な酸化剤ですので、貯蔵及び取扱いの際には次の点にご注意ください。



- 他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素等との直接混合での使用は絶対に避けてください。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こします。
- 酸、アルカリ、脱塩素剤（チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ）、油脂類その他可燃物と直接触れないようにしてください。
- 本商品は飲み込むと有害です。
- 眼や呼吸器を刺激します。
- 使用中に眼にしみたり、気分が悪くなった時は、直ちに離れ、洗眼し、新鮮な空気のある場所へ移動し、使用を中止してください。

**塩素系** **まぜるな危険**



- ① 火気、熱（機械室、ボイラー室等）、直射日光等避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ② 金属を腐食しますので使用する容器等は、樹脂製の材質をお選びください。
- ③ 取扱い時は家事用手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用してください。
- ④ 火災の原因になりますので、ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないでください。処分する場合は販売店にお問い合わせください。
- ⑤ 皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに払い落とし、水で十分に洗い流してください。異常がある場合は医師の手当てを受けてください。
- ⑥ 眼、鼻、口へ入らないようにしてください。万一眼に入った場合は、擦らないで15分以上洗浄してください。また、誤って飲み込んだ場合は直ちに医師の手当てを受けてください。
- ⑦ 火災時は現場から遠ざけて類焼を避けてください。消火の場合は大量の水をかけてください。
- ⑧ 子供の手の届かない所に保管してください。
- ⑨ **水ぬれには注意してください。（容器内に水、湯が入らないようにお取り扱いください。）**
- ⑩ 商品が変色する恐れがありますので、入浴剤等の香料が配合された他の薬剤を近くに置かないでください。

製造元：  **四国化成工業株式会社**

販売元：  **サンエス石膏株式会社**

TEL. 06-6339-0870 FAX.06-6339-0871

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>

E-mail : [headquarter@san-esugypsum.co.jp](mailto:headquarter@san-esugypsum.co.jp)

お問合せ・商品のお求めは下記へ