

いつものブラッシングに加えて、磨きにくい部位をケア

SINGLE TUFT#01S/#01M/#01MH

バトラーシングルタフト #01S/#01M/#01MH



BUTLER

いつものブラッシングに加えて、磨き シングルタフトに毛のやわらかいタイ

1

耐久性と弾力性に優れた

PBT*フィラメントを採用。

*ポリブチレンテレフタレート




拡大図 ▲


2

前歯にも奥歯にもベングリップで安定して磨きやすい

ダブルグリップ&ラバーハンドル。

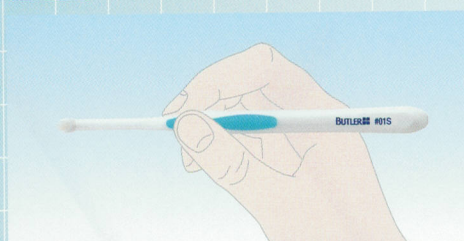

▲前歯を磨くとき

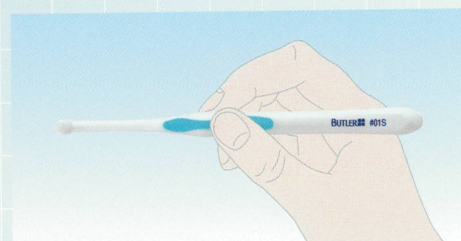


▲奥歯を磨くとき

3

使い易さを追求した

10°ネック設計。

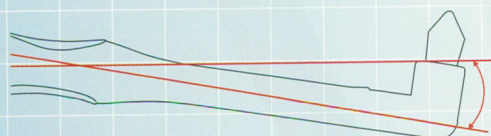

10°



原寸大

#01シリーズは全ライフステージに

乳幼児期

学童期

思春期

成

- 仕上げ磨き
- 乳歯う蝕
- 咬合面う蝕



#01M または **#01MH** がおすすめ

- 萌出期の
第一大臼歯



#01M または **#01MH** がおすすめ

- 矯正治療中の
ブラケット周囲



#01MH がおすすめ

- インプラント
周囲の清掃

#01S または

にくい部位を集中ケア。 プを追加！


SINGLE TUFT#01S / #01M / #01MH

バトラーシングルタフト #01S / #01M / #01MH

炎症が強く
痛みが強い時期に
#01S を使用します。

炎症が改善してきたら、
#01M でプラークコントロール
を継続します。


局所的に歯肉が
退縮しているケース

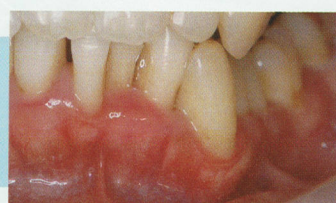

歯肉の高さが
不揃いのケース



下顎臼歯舌側歯頸部

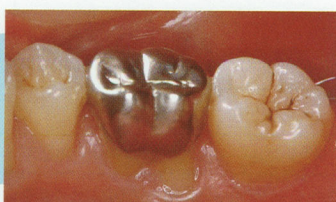


おけるリスク部位に幅広く対応します。



◎お口の状態に合わせて選べる3つのかたさ



ハンドルカラーは、
2色をご用意しました。

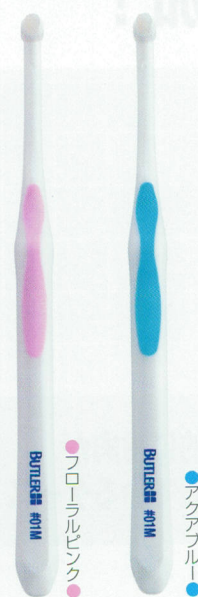


商品名	タイプ	ヘッド部分	毛の太さ	販売単位	患者様希望価格
バトラーシングルタフト #01S	ソフト	4.5mm 8.5mm	0.085mm	1ダース 12本入	1本 250円 (税抜価格)
バトラーシングルタフト #01M	ミディアム	3.5mm 7.5mm	0.100mm		
バトラーシングルタフト #01MH	ミディアム ハード		0.150mm		


臨床試験

13名の歯科医療従事者を対象に、プラーク蓄積を行った後、バトラーハブラシ#025Mおよびバトラーシングルタフト#01MHを使用させ、ブラッシング前後のプラーク量を測定した。プラーク評価方法は口腔内全体を対象にプラーク染色を行い、鈴木氏法を用いて1歯を頬舌側それぞれ近心部、中央部、遠心部に分け、歯肉辺縁部からのプラークの高さを0.5mm単位で測定を行った。

ハブラシ3分間使用後、シングルタフトを1.5分「追加使用」した場合 (n=13)

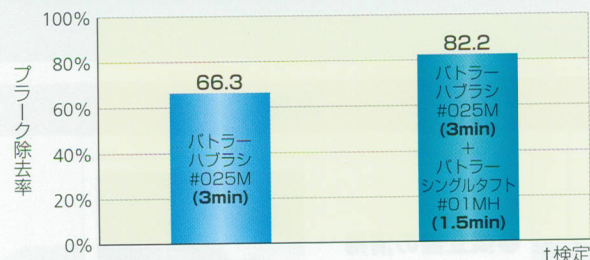

3分間に、ハブラシ+シングルタフトを各1.5分「組合せ使用」した場合 (n=13)

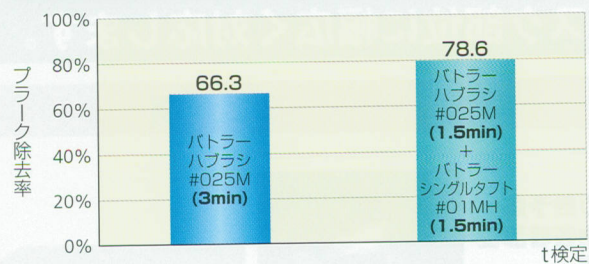

結果

バトラーハブラシ#025Mに、バトラーシングルタフト#01MHを加えて使用した場合、〔プラーク除去率〕は相対的に高い値を示し、バトラーハブラシ#025Mのみとバトラーシングルタフト#01MHを併用し、ブラッシング時間を同じにした場合でも、高い併用効果が認められた。

2005年9月～11月 当社臨床試験データ

商品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号
TEL:072-682-4733
FAX:072-684-5669